

歯科技工用成型器

ミニスター S scan II 新発売記念！ マウスガードで歯を守ろうキャンペーン

【実施期間】 2017.12.21～2018.2.20 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、歯科技工用成型器ミニスター S scan II の新発売を記念いたしまして、「ミニスター S scan II 新発売記念！マウスガードで歯を守ろうキャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

ミニスター S scan II と

矯正から審美、予防まで これ1台で幅広い症例に対応
適合の良いオーラルアプライアンスの製作が可能です

仕様
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 750VA
加圧力(P) 4.0 bar (0.5～4.0 bar)
外形寸法 W500×D400×H210mm
質量 約9kg

■標準価格 398,000円 新206360600 旧636600

販売名 ミニスター S scan II
一般的名称 歯科技工用成型器
医療機器届出番号 2781X00109000325
医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
製造販売 株式会社モリタ



スプリント作製用 デュランプラス と 1.5mm(クリア)

■標準価格 4,100円 新206360205 旧636205

ハードタイプの中でも
弾力性に富んだ
透明度の高いプレート

販売名 デュラン
一般的名称 歯科矯正用レジン材料
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
医療機器承認番号 21200BZY00634000
製造販売
株式会社ロッキーマウンテンモリタ
東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶の水西雲ビル14F

マウスガード作製用 バイオプラス と 3.0mm(クリア)

■標準価格 6,750円 新206360062 旧636062

色やパターンを組み合わせ
カスタムマウスガードの製作に
おすすめ

販売名 バイオプラス
一般的名称 義歯床用熱可塑性レジン
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)
医療機器承認番号 20500BZY00731000
製造販売
株式会社ロッキーマウンテンモリタ
東京都千代田区神田駿河台2-2 御茶の水西雲ビル14F

患者さんに マウスガードスプレー リーフレット ×20枚



スプリントやマウスガードなど今すぐ作れるキットを

詰め合わせて

特別価格にてご提供！

キャンペーンコード 新206360900 旧636900

●セールを実施していない地区がございます。予めご了承ください。 ●掲載商品の標準価格は2017年12月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 ●価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

ミニスター S scan II

①バーコードをスキャンして


プレートに印字されたバーコードを読み込むことで、加熱時間/冷却時間が自動的に設定されます。



※コード入力機能が新たに追加。

②4.0barの加圧力でプレス

ヒーターで加熱した面を模型に圧接するため、適合性のよいプレスが可能になります。

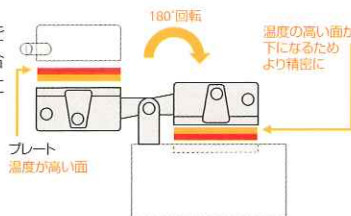

③精度の高い オーラルアプライアンスが完成



裏面の作成事例もご確認ください！ >>>

マウスガード

色だけでなく、適合や外形、咬合まで患者さんに合わせてカスタムメイドできます
4.0気圧の圧力で形成する為フィット感がよく、スポーツ中も外れません。
カラフルなプレートで患者さんオリジナルのマウスガードが作れます。

オススメのプレート バイオプラスト、カラーバイオプラスト



バイオプラスト用分離剤を模型に塗布しバイオプラストを1次プレス



空気穴を明け、1次プレスした上にバイオプラストの2次プレス



研磨後、フィニッシングキッドで表面のつや出し



いびき防止装置

下顎を前方位で固定し、舌根の沈下を防ぐことで「いびき」を軽減します
医科での治療だけでなく、口腔内装置を用いることで歯科的アプローチが有効な場合もあります。

オススメのプレート デュランプラス



いびき防止装置装着
気道を確認し、いびきを防止



シルキッドでブロックアウト後上下顎装置の作成



下顎前方位の設定



NKコネクターIIで上下顎装置の固着



仕上げ

リテーナー/スプリント

硬質プレートでも加圧成型器なら精密な装置が製作できます
成長期の矯正治療だけでなく、大人になってからのプチ矯正にも適応できます。
歯列を整えながら同時にホワイトニングも可能です。

オススメのプレート デュランプラス、ニューインプレロンS PD、ニューデュラソフトPD



模型の前準備と設置



加圧



仕上げ

関連商品



石膏分離材
バイオプラスト用分離剤 500mL
4,700円 新206360125 IB636125



マウスガード用脱出材
フィニッシングキッド 250mL
9,450円 新206360200 IB636200



いびき防止用コネクター
NK コネクターII
12,800円 新206360401 IB636401



ブロックアウト用シリコン
シルキッド150g
クリア 3,800円 新206360135 IB636135
レッド 3,800円 新206360193 IB636193



マウスガード除菌・洗浄スプレー
100mL 760円 新202320001 IB232001
希望患者価格 900円(税別)
アース製薬

製 造 ショイデンタル (ドイツ)

製造販売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com