

期間 2018 1.22 ▶ 2.20

NEX NiTi FILE Ms

発売記念キャンペーン

New

GC




平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、「NEX NiTi FILE Ms 発売記念キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

“MS” 形状記憶効果をもつマルテンサイト相(M相)のは柔らかく、しなやかに曲がる 曲げるもどる

キャンペーン期間中、NEX NiTi FILE MsアソートセットA(21mmまたは25mm)またはNEX NiTi FILE MsアソートセットB(21mmまたは25mm)と、キャンペーンセット品『セーフティメモディスク(SMD)12個入特別仕様』を組み合わせでご提供!!

NEX NiTi FILE Ms アソートセットA

Aセット クラウンダウン法 歯冠側から始まり、根尖側で終わる根管形成

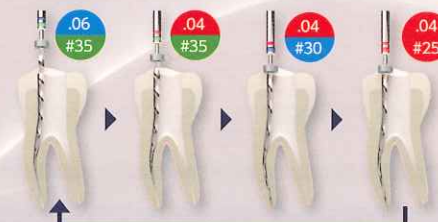

- 作業長まで到達しない場合は最初のファイルに戻って作業を繰り返します。
- 途中で作業長へ到達する場合があります。
- 作業長に到達しさらに根尖部の拡大を行う場合は逆の順番でファイルを作業長まで到達させ拡大形成を行います。(Aセットでは#40/.04まで拡大できます)

POINT


- フルレンジステックと比較して
 - ・ファイル先端が根管壁に比較的拘束されにくい
 - ・破折のリスクが比較的低い
 - ・レッチャートランスポーターションがおきるリスクが比較的高い
 - ・根管の彎曲に追従しにくい

【セット包装・希望医院価格】
 アソートセットA 1函:6本入(#35/.08*, #35/.06, #35/.04, #30/.04, #25/.04, #40/.04 各1本入)=¥10,500
 21mmまたは25mm ※印は長さ19mmです。
 管理医療機器 225AABZX00077000

または

NEX NiTi FILE Ms アソートセットB

Bセット フルレンジステック ファイルを作業長まで到達させながら行う根管形成

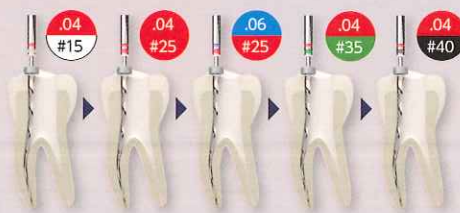

POINT

- クラウンダウン法と比較して
 - ・ファイル先端が根管壁に比較的拘束されやすい
 - ・破折のリスクが比較的高い
 - ・根管形成が比較的きれいにできる
 - ・根管の彎曲に追従しやすい
 - ・ファイルの交換回数が少ない

【セット包装・希望医院価格】
 アソートセットB 1函:6本入(#25/.08*, #15/.04, #25/.04, #25/.06, #35/.04, #40/.04 各1本入)=¥10,500
 21mmまたは25mm ※印は長さ19mmです。
 管理医療機器 225AABZX00077000

キャンペーンセット品


セーフティメモディスク(SMD) 12個入特別仕様

期間限定販売品 希望医院価格 ¥1,500

使用回数が確認できるSMD

セーフティメモディスクは、ファイルの使用回数の目安としてご使用いただけます。ファイルを使用するごとに*1枚ずつちぎり、8枚全てがなくなったらファイルを交換してください。

*負荷のかかる拡大形成に使用した場合は、2~3枚ちぎってください。

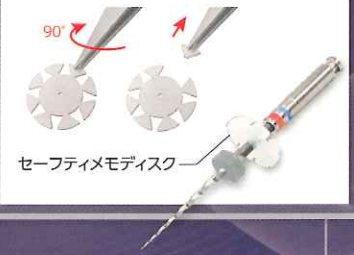

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間:2018年1月22日~2月20日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL (_____) _____

お取引販売店 _____

| NEX NiTiファイルMs | ご注文数 | キャンペーンセット品 |
|--------------------------|------|---------------------------|
| アソートセット A (クラウンダウン法) | 21mm | セーフティメモディスク(SMD) 12個入特別仕様 |
| | 25mm | |
| アソートセット B (フルレンジステック) | 21mm | |
| | 25mm | |

*ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務に活用させていただきます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。