

期間・数量限定

フジルーティング EX & ルーティング VErsa

バーサ

2018 2.1 ▶ 2.28



ご愛用感謝キャンペーン



平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「フジルーティング EX/ルーティング VErsa ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

約30秒間

余剰セメントの除去可能時間

口腔内保持時間

2分45秒以上

「フジルーティング EX」、「ルーティング VErsa」いずれか2函と
セメントTOOTH!タイマー (EX/VE用) 1個を
組み合わせてご提供!

シャープな硬化の
フジルーティングEX

ゆるやかな硬化特性で
操作余裕のある
ルーティング VErsa

約90秒間

余剰セメントの除去可能時間

口腔内保持時間

5分以上



接着性ガラスアイオノマー系レジンセメント

ジーシー フジルーティング EX

色調 ● 1色 = ライトイエロー


包装・希望医院価格 ● 1函・カートリッジ13.3g (7.2mL) 2本、
練和紙 (No.22) 1冊 = ¥10,000

キャンペーンセット品

余剰セメント除去の
タイミングを3つのボタンに
設定できます!

ボタンの初期設定
(余剰セメント除去目安)

- EX [1分]
- VE [1分半]
- Free [自由設定]

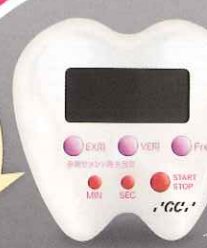

マグネット付で
便利!

【期間限定販売品】
希望医院価格 ● ¥3,500
タテ67mm × ヨコ67mm
厚み23mm



接着性ルーティングセメント

ジーシー ルーティング VErsa

色調 ● 1色 = ホワイト

包装・希望医院価格 ● 1函・カートリッジ12.0g (7.2mL) 2本、
練和紙 (No.22) 1冊 = ¥12,500

診療スタイルにあわせて選べる2タイプの合着材

接着性ガラスアイオノマー系レジンセメント

ジーシー フジルーティング EX

シャープな硬化特性により、
早いタイミングで余剰セメントを除去。
患者さんに対して負担が少なく、
チェアタイムも短くて済みます。



練和
しっかり10秒間



セット



【適用症例】
メタルインレー、
メタルクラウン、
メタルブリッジ、
メタルコアなど。

接着性ルーティングセメント

ジーシー ルーティング VErsa


ゆるやかな硬化特性により、
余剰セメントの操作余裕時間が長く、
ゆとりをもって除去作業ができます。



練和
しっかり10秒間



セット

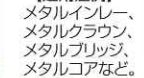

簡単な
片付け
など

余剰
セメント除去
【セット後:
1分~1分30秒】

約30秒間

セット後
2分45秒
以上
(口腔内保持時間)

最終硬化

完了

セットから
半硬化までの時間で

片付け
カルテ記入
PC入力
など

約90秒間

余剰セメント除去
【セット後: 1分30秒~3分】

セット後
5分
以上
(口腔内保持時間)

最終硬化

※上記写真はルーティング VErsaを使用した症例です。 ※イメージ図
※ VErsa (バーサ)はVERSATILE (融通が利く) という新しい発想から生まれた商品名です。
※ 23℃で練和開始からセットまでの操作余裕時間: フジルーティング EXは約2分、ルーティング VErsaは約4分です。

ご注文書

キャンペーン期間: 2018年2月1日~2月28日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL (_____) _____

お取引/販売店 _____

対象製品	ご注文数	キャンペーンセット品
フジルーティング EX		セメント TOOTH! タイマー (EX/VE用)
ルーティング VErsa		

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受注発注業務に活用させていただきます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

※ご注文数の合計が2の倍数になるようお願いいたします。

株式会社 ジーシー

ご用命は

- 支店 ● 東京 (03) 3813-5751
● 大阪 (06) 4790-7333
営業所 ● 北海道 (011) 729-2130
● 東北 (022) 207-3370
● 名古屋 (052) 757-5722
● 九州 (092) 441-1286