

この資料は、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士様への案内です

# クラレ ノリタケ デンタル

## 2018 2月号

# Campaign News

キャンペーンニュース



平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。  
 このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、  
 『クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース2月号』といたしまして、  
 キャンペーンを企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。



クリアフィル ユニバーサルボンド Quick



クリアフィル DCコートオートミックス ONE

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2018年1月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●效用に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
 新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
 東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
 <歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

# クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick

## Campaign ① クリアフィル®ユニバーサルボンド® Quick 接着修復推進キャンペーン

数量限定

期間 2018年1月22日~2月20日

期間中、下記対象商品を 特別価格 にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



クリアフィル®  
ユニバーサルボンド Quick  
単品1箱を ○内容 5.6mL×1本

■標準価格  
13,400円 新 202430572 旧 243572



クリアフィル®  
ユニバーサルボンド Quick  
Wパック1箱を ○内容 5.6mL×2本

■標準価格  
24,120円 新 202430573 旧 243573

詰め合わせて

特別価格にてご提供!

詰め合わせて

特別価格にてご提供!

●販売名 クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ●一般的な名 歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材) (歯科金属用接着材) (歯科用知覚過敏抑制材料) ●生産検査批准番号 228AB82X0006500 ●生産機器の分類 管理記録機器 (クラスII)



- 高接着
- 塗布後の待ち時間なし
- ユニバーサル(多用途)ユース
- アミド系モノマー採用で硬化しにくいエリアもしっかり硬化



CR充填修復に!

光重合型CR充填修復



ポスト植立 / 支台築造に!

ポスト植立 / 支台築造




CAD/CAM冠のセメント接着に!

セメント接着



(MPa) 人歯象牙質に対する微小引張接着強さ

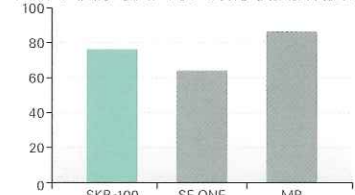

データ測定: 東京歯科大学歯学部歯学分野  
測定条件: 測定条件: #600研磨面、被着面積1.0x1.0mm<sup>2</sup>、37℃水中浸漬、24hr後  
SKB-100:「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick」  
SE ONE:「クリアフィル®ボンド SE ONE」  
MB:「クリアフィル®メガボンド®」



ユニバーサルボンド Quickと



DCコアオートミックスONEと

1 築造窩洞の形成




根管形成・根管充填を行った後、X線写真等でポスト径を確認し、ピーソーリーマーにてポスト孔を形成。

2 ポストの試適



選択したADファイバーポストにて試適。

3 ポストの長さ調節

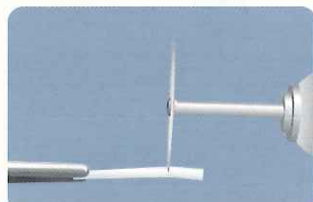

ダイヤモンドディスク等を用いて適切な長さにて調節し、エタノールを染みこませたガーゼ等で汚れを拭きとります。

4 ポストの表面処理



Kエッチャントシリンジを塗布、5秒後水洗・乾燥後、セラミックプライマーペースを塗布、乾燥。

# クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE

## Campaign ② クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE ご愛顧感謝キャンペーン

数量限定

期間 2018年1月22日～2月20日

期間中、下記対象商品を 特別価格 にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。



クリアフィル® DCコア デンチン  
オートミックス® ONE または  
ホワイト

単品1箱

■標準価格 各9,500円 デンチン 新 202420942 旧 242942 ホワイト 新 202420943 旧 242943  
■内容 Aペースト 8.9g(4.5mL) Bペースト 9.0g(4.5mL) 1本/ミキシングチップ 20個/ガイドチップ(太) 10個/  
ガイドチップ(細) 10個


特別価格にてご提供!

●販売名 クリアフィル DCコア オートミックス ONE ●一般的名称 歯科用支台築造材料 ●医療機器承認番号 223A8BZX00086000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

### 良好な賦形性


「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」は当社独自のフィラー表面処理技術を採用することで、ペーストが注ぎ易く垂れにくくなりました。

ペーストの賦形性

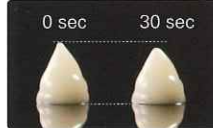

### 組み合わせ自由

「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」は歯質との識別に優れた「ホワイト」、審美修復に適した「デンチン」の2種類の色調から選択できます。ガイドチップは症例に応じて「太」と「細」から選択できます。さらに、押し出しには手押しとディスペンサー(別売)から選択できます。

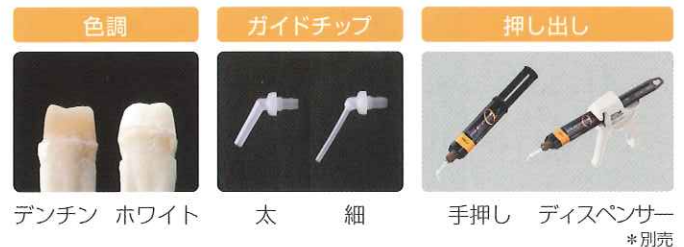

## ADファイバーポストを使用した直接法による支台築造

5 ペーストの填入




築造窩洞内にユニバーサルボンド Quickで歯面処理を行った後、DCコアオートミックス ONEのペーストを填入。

6 ポストの植立



ADファイバーポストの植立後、添付文書にしたがい所定時間光照射して固定。

7 ペーストの築盛・光照射

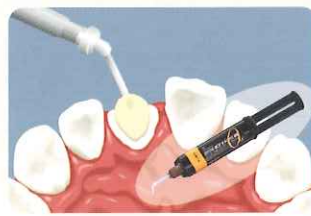

ポスト周辺にDCコアオートミックスONEのペーストを築盛し、所定時間光照射。

8 支台歯形成



光硬化深度以上に築盛した場合は、6分以上静置してから、支台歯形成を行う。

# 接触重合の仕組み



クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick

ボンドのみ


クリアフィル® メガボンド® 2

プライマー

ボンド+本品 (混和)

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick  
「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick」は「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」と接触すると硬化を開始しますので根管内にも使用することが可能です。

クリアフィル® メガボンド® 2  
「メガボンド®2」と「DCアクティベーター」を混和することで「DCコアオートミックス®ONE」と接触すると硬化を開始します。

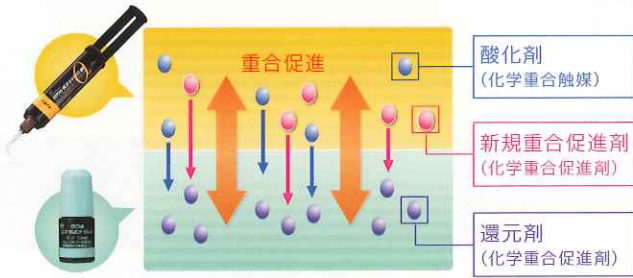

## レジンで支台築造を行う際の接着処理

### 1. コアの前処理について

レジンで作製したコアは前処理が必要です。

- ① サンドブラスト処理
- ② リン酸エッチング 塗布・5秒後、水洗・乾燥
- ③ セラミックス処理材の塗布



### 2. 「クリアフィル® AD ファイバーポスト」の表面処理について

「クリアフィル® AD ファイバーポスト」は表面処理が必要です。

- ① リン酸エッチング材塗布5秒後、水洗・乾燥
- ② セラミックス処理材の塗布・乾燥



組み合わせるボンディング材について  
コア用レジンと併せて使用するボンディング材はデュアルキュア性能があるもの、もしくは下図の組み合わせをおすすめします。



## 関連商品のご紹介



### クリアフィル® AD ファイバーポスト

■標準価格 各8,900円 新 202430900~202430903 旧 243900~243903  
○内容 No.3, No.4, No.5, No.6 各10本  
●販売名 クリアフィル AD ファイバーポスト  
●一般名 歯科用樹脂用棒状成形体  
●医療機器認証番号 228ABZ2X00065000  
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



### クリアフィル® セラミック プライマー プラス

■標準価格 7,000円 新 202430637 旧 243637  
○内容 4mL×1本  
●販売名 クリアフィル セラミック プライマー プラス  
●一般名 歯科セラミックス用接着剤(歯科金具用接着剤材料)  
●医療機器認証番号 226ABB2X00105000  
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



### クリアフィル® DC アクティベーター

■標準価格 5,300円 新 202430250 旧 243250  
○内容 4mL×1本  
●販売名 クリアフィル DC アクティベーター  
●一般名 歯科用象牙歯接着剤  
●医療機器認証番号 228ABZ2X00065000  
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



### K エッチャント シリンジ

■標準価格 3,000円 新 202430252 旧 243252  
○内容 3mL×1本  
●販売名 K エッチャント シリンジ  
●一般名 歯科用エッチング材  
●医療機器認証番号 226ABB2X00065000  
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)