

# フィジオクリーンキラリ錠剤 ご愛顧感謝 歯石くりん付きキャンペーン

期間 2018年1月22日~3月20日

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「フィジオクリーン キラリ錠剤  
ご愛顧感謝 歯石くりん付きキャンペーン」を企画いたしました。期間中、「フィジオクリーン キラリ錠剤」6箱と「フィジオクリーン キラリ錠剤」1箱と  
「フィジオクリーン 歯石くりん」1箱を詰め合わせて特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

患者さん用 義歯洗浄剤

## フィジオクリーン キラリ錠剤

■標準価格 4,500円

優れた洗浄・除菌力で色素汚れはもちろん、  
バイオフィルムのヌルヌル感を落とし  
カンジダ菌などをスッキリ除菌します。

6箱と

## フィジオクリーン キラリ錠剤

1箱と

■標準価格 30錠入(3g×30) 750円  
希望患者価格 900円(税別)



患者さん用 義歯洗浄剤

## フィジオクリーン 歯石くりん

1箱を

■標準価格  
30錠入(3g×30) 1,000円  
希望患者価格 1,200円(税別)



詰め合わせて

# 特別価格にてご提供!!

キャンペーンコード 番204530367 品453367

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2018年1月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。  
●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。

製造 NISSIN

東日本営業所 東京都台東区台東 4-14-8 〒110-0016 T 03.3836 3691  
西日本営業所 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 513 京都第一生命泉屋ビル 8F  
〒604-0847 T 075.257 7255  
<http://www.nissin-dental.jp>

発売 株式会社 MORITA

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>

[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)

# 歯石くりんが義歯をキレイにする



## 歯石溶解力


酸のチカラでゆるやかに歯石を除去!

歯石くりんはpH2.5の酸性でゆるやかに歯石を溶かし除去します。洗浄開始から約15分で0.45gの歯石を溶かし、金属を使った義歯でも30分の洗浄で十分な効果が期待できます。



1時間で0.5gの歯石を除去!

歯石溶解量 (g/150mL)

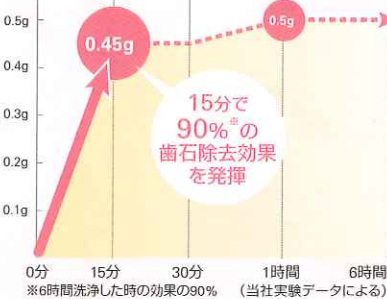

ガンコな歯石も毎日使用でしっかり除去

頑固に付着した大きな歯石も歯石くりんを毎日使用することで少しずつ歯石を除去していきます。毎日使用することで新たな歯石の付着も予防することができます。



●毎日、9時間洗浄

## 除菌力

30分の洗浄でカンジダ菌を強力除菌!

義歯性口内炎などの原因になるデンチャープラークは、カンジダ菌やその他細菌で構成されています。歯石くりんはそれら細菌に30分の洗浄で優れた除菌効果を発揮し、義歯を清潔に保ちます。

カンジダ菌除菌 生菌数/mL



### ● 使いやすい錠剤タイプ



歯石くりんは錠剤タイプを採用し、粉末タイプのように開封時にこぼれたり飛散することはありません。150mLのぬるま湯に1錠入れるだけなので非常に簡単です。ぬるま湯に入れると発泡しながら溶解し、薄いピンク色になり、一晩のご使用で無色になります。

### ● 義歯材料への影響

歯石くりんの使用で、金属など一部の義歯材料に変色などの影響が出るものがあります。歯石くりんを使用しても問題ないか義歯材料を確認してから使用してください。

	材料	影響	備考
床裏装材	人工歯	○	
	床用レジン	○	
	ノンメタルクラス用樹脂	○	
	軟質裏装材(シリコン系)	○	
	軟質裏装材(アクリル系)	○	
	ティッシュコンディショナー	×	
金属材料	コバルトクロム合金	△	30分以内の使用
	金銀パラジウム合金	△	30分以内の使用
	チタン系	×	変色、くすみ
	歯科用銀口ウ	×	変色、くすみ
	銀合金	×	変色、くすみ

⚠ 金属を使用した入れ歯は30分で取り出してください。(銀合金、銀口ウ材、チタンはご使用いただけません)

### ● こんな患者さんにオススメです!

きちんと清掃していても歯石がつきやすく困っている



あまりマメに清掃をしておらず歯石の蓄積がよく目立つ



歯科医院へ通いにくいのでできるだけ自宅で手入れをしたい



## 使用方法



### 1 清掃

洗浄前に入れ歯に付着したものをブラシ等を用いて、流水で洗い流してください。



### 2 準備

150mL程度のぬるま湯(〜40℃)に歯石くりん1錠を入れてください。洗浄液がうすいピンク色になります。

※保温洗浄容器(別売)のご使用をおすすめします。



### 3 洗浄

入れ歯は30分以上浸けてください。一晩浸けていただくとう効果的です。

※金属を使用した入れ歯は30分で取り出してください。

※銀合金、銀口ウ材、チタンはご使用いただけません。

※一晩たつと洗浄液は無色になります。誤飲にご注意ください。



### 4 すすぎ

洗浄後、入れ歯に洗浄剤の成分が沈殿付着します。人体には無害ですが、ブラシ等を用いて流水でよくすすいでください。