

インプリント™ 4 印象材 ペンタ™

# トライアル キャンペーン

ペンタ™ ミキシングチップレッド ×10個を組み合わせでご提供いたします。



## 印象撤去が容易なソフトトレー ボディ

ヘビーボディに比べ弾性歪みが高く、単冠やブリッジの症例に適しています。一方で永久歪みは従来品と同等で、高精度な印象採得が可能です。

ソフトトレー ボディでクラウンの印象を採得

**.01**

圧排系を挿入した支台歯。



**.02**

ライトボディを口腔内に注入する。



**.03**

ソフトトレー ボディは弾性歪みが高く、撤去が容易に行える。



### キャンペーンセット内容

インプリント™ 4 印象材 ペンタ™  
ソフトトレー ボディ × 1箱

+

ペンタ™ ミキシングチップレッド  
× 10個



製品番号

71550SP

—— キャンペーン希望医院価格(本体価格) ——

**27,220円**

**2**

種類のトレー材で症例による使い分けをお奨めします。



## インプラントに適したヘビー ボディ

インプリント™ II 印象材以降、インプラントに広く採用されているヘビーボディの特製を引き継ぎ、インプラント、ロングスパンブリッジやフルマウスの症例に適しています。

ヘビー ボディでインプラントの印象を採得

**.01**

トランスファーコーピングを固定。




**.02**

流動性の低いレギュラーボディを注入。トランスファーコーピングの周りにとどまる。



**.03**

ヘビー ボディ、レギュラーボディによる連合印象1回法の印象面。

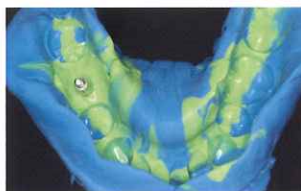

臨床写真提供：藤田 大樹 先生 (東京都開業)

### キャンペーンセット内容

インプリント™ 4 印象材 ペンタ™  
ヘビー ボディ × 1箱

+

ペンタ™ ミキシングチップレッド  
× 10個



製品番号

71484SP

—— キャンペーン希望医院価格(本体価格) ——

**31,220円**

# 超親水性を実現

インプリント™ 4 印象材は、今までにない親水性を実現しました。歯肉縁下の細部、内側性窩洞に流れ込み、クリアな印象採得が可能です。硬化後の親水性も高く、石膏注入時に界面活性剤を使用する必要がありません。



2種類の硬化前印象材（練和後40秒程度）の中心に、水滴を落とします。




水滴は、より親水性の高い印象材の方に引かれます。インプリント™ 4 印象材の高い親水性がわかります。

# シャープな硬化で変形リスクを低減


3M独自のセルフウォーミング機能（自己発熱機能）で、作業時間はしっかりキープしたまま、口腔内での硬化時間のみを短縮しました。（当社従来品比）

## 経過時間による硬化の比較


3M 社内データ

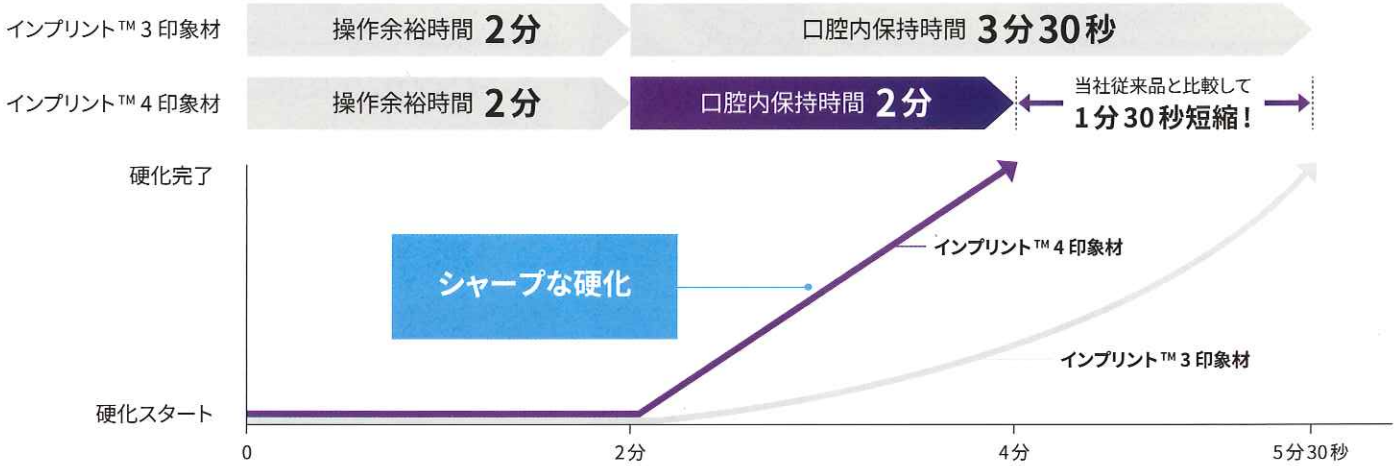

練和直後はすべての硬化剤が未反応

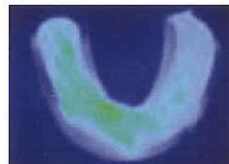

硬化剤（ビニルポリシロキサンとSi-Hポリシロキサン）が反応を開始

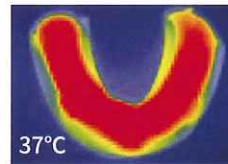

架橋剤と発熱成分の反応により、37°Cまで温度が上昇し、速やかに硬化が完了

3Mの新技术セルフウォーミング機能（自己発熱機能）が、速やかな硬化を実現しました。

## 関連製品

### インプリント™ 4 印象材 レギュラー ボディ

内容：50mL×2本  
ギャラン™ ミキシングチップイエロー ×5本  
3 M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ×5本  
製品番号：71557  
希望医院価格：7,500円



### インプリント™ 4 印象材 ライト ボディ

内容：50mL×2本  
ギャラン™ ミキシングチップイエロー ×5本  
3 M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ×5本  
製品番号：71558  
希望医院価格：7,500円



### ペンタ™ ミキシングチップ レッド

内容：50個  
製品番号：77949  
希望医院価格：6,100円



単品購入より  
**約15%お得な  
ダブルパック**

通年でご購入可能



### インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ソフトレー ボディダブルパック

内容：ベースペースト 300mL×4本  
キャタリストペースト 60mL×4本  
製品番号：71550W  
希望医院価格：45,000円



### インプリント™ 4 印象材 ペンタ™ ヘビー ボディダブルパック

内容：ベースペースト 300mL×4本  
キャタリストペースト 60mL×4本  
製品番号：71484W  
希望医院価格：52,000円

販売名：インプリント 4 印象材 認証番号：225AKBZX00168000 / 販売名：インプリント 3 印象材 認証番号：220AKBZX00165000 / 販売名：ペンタ ミキシングチップ レッド 届出番号：13B1X10109000127  
販売名：ギャラン ミキシングチップ 届出番号：13B1X10109000210 / 販売名：3M ESPE イントラオーラル シリンジ 届出番号：13B1X10109000254

**3M** スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー 歯科用製品事業部

Web    
http://www.mmm.co.jp/hc/dental/

3M コールセンター ☎ 0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金（土・日・祝を除く）  
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3157をご利用ください。

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2018年1月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。  
※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3M、ESPE、インプリント、ペンタ、ギャランは、3M社またはその関連会社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2018. All Rights Reserved. DEN-1542-AJ (011890) DN/DN