

根管長測定機能付 超音波スケーラー



ソルフィーFご愛顧感謝キャンペーン

《特別キャンペーン期間》

2018年1月22日～3月30日

数量限定!

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

この度、**福岡支店限定**で日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、

『エンドチップA【EH1】+ソルフィーウルトラソニックファイル【アソート】』
もしくは『ソルフィーFペリオチップ【P2】』を選択できるご愛顧感謝キャンペーンを実施いたします。

①エンドチップA【EH1】+ソルフィーウルトラソニックファイル【アソート】
根管洗浄・拡大などに使用し易いチップの組み合わせです。

②ペリオチップ【P2】

歯肉縁上、縁下、根分岐部のスケーリング、洗浄、清掃に効果的なチップです。

この機会にぜひご利用ください!!



ソルフィーF

■標準価格 248,000円 107903

ソルフィーF ライト付き

■標準価格 288,000円 107904

ソルフィーF ボトル、ライト付き


■標準価格 358,000円 107905

特別価格にてご提供!

- ①エンドチップA【EH1】(コード: 107054 標準価格: 8,500円)+
ソルフィーウルトラソニックファイル【アソート】(コード: 107056-ASS 標準価格: 1,900円)



エンドチップAと、ウルトラソニックファイルの組み合わせで、根管の洗浄を効率よく行うことができます。

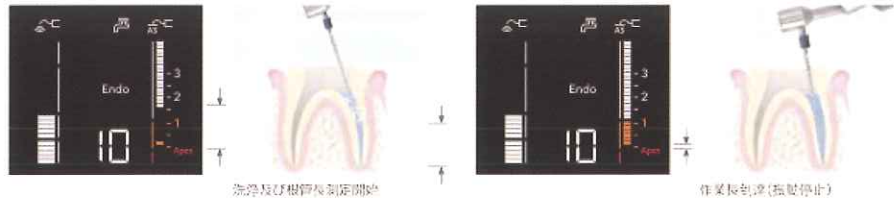

超音波エンドファイルを使用し根管洗浄を行う際、根管長測定機能を運動させファイル先端位置が根尖付近にあることを確認しながら洗浄が行える。作業長を越えると超音波振動も止まる。

- ②ペリオチップ【P2】(コード: 107923-P2 標準価格: 7,500円)




ペリオチップ P2

ペリオチップP2は、ポケットプローブと同程度の太さで歯肉縁下への挿入が容易である。メンテナンス時にポケット内のプラーク除去に効果的である。



ペリオチップP2の効果的な使用法。
ペリオチップP2では、歯冠の豊陰部をよけてポケット底部まで無理なく挿入できる。

垂直歯根破折歯を救え!
(クインテッセンス出版)
8,400円(税抜)
こちらもおススメです!

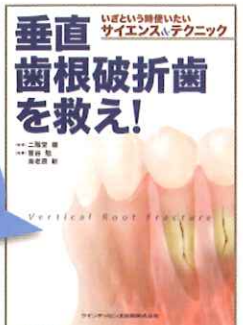

広い臨床に対応するワイドパワーレンジ

ペリオ分野で使用する弱い振動から、クラウン除去などに使用する強い振動まで25段階のパワーレンジにより、幅広い臨床に対応することが可能です。

根管長測定機能

根管長測定機能使用時は、根管内に挿入されたチップやファイル先端の根管内位置が、ディスプレイに表示され、測定しながら洗浄・拡大することにより、精度の高い治療を実現します。根管長測定器として使用することも可能です。

高い操作性

直感的に操作できるアイコンと見やすい液晶ディスプレイは、治療中でも認識しやすく操作ミスを防ぎます。また、操作パネルはフラットで日々のメンテナンスも容易です。

40種類を超える豊富なチップラインナップ
スケーリング、ペリオはもちろん、エンドでの使用もサポートするチップを取りそろえています。



Solfy F

臨床使用例

ルートブレーニングチップ P5



ルートブレーニングチップP5はポケットプローブと形状が似ており、歯肉縁下への挿入がプロービングと同様の感覚で行える。



ルートブレーニングチップP5による歯肉縁下スケーリング
歯根の幅が狭い下顎前歯の唇側の深いポケットでも、ポケット底部まで無スケーリングが行える。

アンカーチップ E10



先端が円錐形になっており、ガッタパーチャを粉砕しながら除去する。




アンカーチップE10によるガッタパーチャ除去
古く硬いガッタパーチャも容易に粉砕でき、溶解剤を使用した場合と異なり根管壁に溶けたガッタパーチャが残ることはなく、超音波洗浄すると根管壁から残らず除去できる。


超音波ファイル+エンドチップ M



超音波エンドファイルとエンドチップM、超音波エンドファイルは先端が#25、長さは19mm(シングル)と28mm(ダブル)がある。

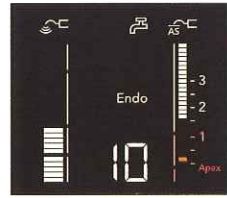

洗浄及び根管長測定開始

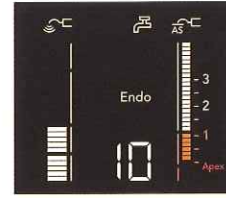

作業長到達(振動停止)

超音波エンドファイルを使用し根管洗浄を行う際、根管長測定機能を連動させファイル先端位置が根尖部付近にあることを確認しながら洗浄が行える。作業長を越えると超音波振動も止まる。

キュレットチップ P1



断面が台形でエッジ部分で根面の切削が可能。



キュレットチップP1によるSRP
ハンドスケーラーと同様の使用法が良いが、根面には軽圧で触れることが重要。



キュレットチップP1の効果的な使用法
シャンクを根尖にむけて挿入すると歯肉の抵抗が強い場合、水平ストロークの要領で使用。

p販売名：ソルフィーF

一般名称：歯科用多目的超音波治療器 機器の分類：管理医療機器（クラスII）特定保守管理医療機器 医療機器認証番号：224ACBZX00016000

一般名称：電動式歯科用ファイル 機器の分類：管理医療機器（クラスII）医療機器認証番号：22000BZX01628000

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2014年2月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●お問い合わせは、お出入りの歯科商店までお願いいたします。

製造販売・製造 株式会社モリタ製作所

本社工場 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533 TEL:075-611-2141
久御山工場 京都府久世郡久御山町市田新珠城190 〒613-0022 TEL:0774-43-7594

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161
www.dental-plaza.com

●この印刷物は、環境にやさしい「植物性インク」「植林木使用紙」を使用しています。

PUB NO.M232.2003-1-000.1402.63.690N-I0