

矯正装置・マウスガード・義歯用除菌洗浄剤

# デントムース

## 発売1周年記念セット

を期間限定で発売いたします  
(なくなり次第終了します)

# 1st

### 発売1周年記念

デントムース発売1周年を記念しまして、  
記念セットを発売いたします。是非この機会に  
ご注文賜りますようお願い申し上げます。

## デントムース発売1周年記念セット

### セット内容



デントムース  
×3本



デントムース患者説明用  
リーフレット×10枚



デントムース  
詰め替え用×1本



デントムース  
歯科医院様用販売促進アイテム  
お申し込み用紙×1枚



キャンペーン期間：2018.2.21(水)～3.20(火)

### ご注文記入欄

<b>デントムース発売1周年記念セット</b>		ご住所 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		都道府県
参考医院価格 4,500円(税別)	セット			
歯科医院名		TEL		FAX
歯科材料店名	担当者名			

ご記入頂きました個人情報につきましては、個人情報取扱規定により厳正に管理を行います。また、当社製品開発、お客様サービス向上及び品質・安全情報提供に使用させていただきます。

いつまでも元気にずっと美味しく

# デントムース

パパッと洗浄！すっきり除菌！わずか30秒！

## 泡で手軽に洗浄できる義歯除菌洗浄剤

機械的洗浄  
(ブラッシング等)

+

化学的洗浄  
(義歯洗浄剤等)

義歯ケアで重要なのは、デンチャープラークコントロール！  
デントムースはブラッシングと合わせることで効率的に除菌洗浄出来ます。

毎食後のお手入れにも適した短時間洗浄！

用途： パーシャルデンチャー、フルデンチャー、マウスガード、ナイトガード、  
矯正用リテーナー、ノンクラスプデンチャー、ブリーチングトレイ、  
床拡大装置等の洗浄

使い方いろいろ！使用シーンに合わせて使い方をチョイス

### スタンダードな使い方

義歯を軽く  
水洗いする。



適量 (1~2プッシュ)  
を義歯にかける。



ブラシ等を用いて  
全体を磨く。(30秒~)



しっかりと  
流水ですすぐ。



### 汚れがひどい時や使い始めに適した使い方

義歯を軽く  
水洗いする。



適量 (1~2プッシュ)  
を義歯にかける。



3~5分放置。



ブラシ等を用いて  
全体を磨く。



しっかりと  
流水ですすぐ。



### 入れ歯を外しておく時の使い方

義歯を軽く  
水洗いする。



適量 (1~2プッシュ)  
を義歯にかける。



ブラシ等を用いて  
全体を磨く。(30秒~)



水を入れた容器  
で一晩放置。



しっかりと  
流水ですすぐ。



\*入れ歯を口内に入れたまま使用しないようにご注意ください。歯磨剤ではありません。