


コンポジット3D フュージョンキットⅡ 新発売キャンペーン

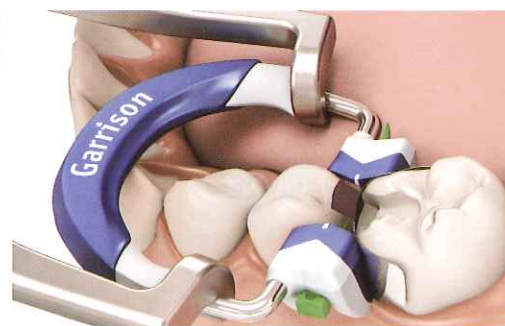

期間 2018年2月21日～3月20日 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたびコンポジット3DフュージョンキットⅡの新発売を記念いたしまして、『コンポジット3DフュージョンキットⅡ新発売キャンペーン』を企画いたしました。期間中、特別キットとしてコンポジット3DシステムフュージョンキットⅡスペシャルをご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

コンポジット3Dシステム フュージョンキットⅡスペシャルを

特別キット

特別価格にてご提供!

キャンペーンコード 新 206830802 旧 663802

＜商品構成＞

コンポジット3D システム フュージョンキットⅡ

3Dリテーナーフュージョン S 1入
フュージョンバンド 5種 ×各5入
・スモール ×5入
・エクストラスモール ×5入
・セミスタンダード ×5入
・スタンダード ×5入
・ラージ ×5入

リングフォーセップス フュージョン 1入
フュージョンウェッジ 4種 ×各10入
・エクストラスモール ×10入
・スモール ×10入
・ミディアム ×10入
・ラージ ×10入



3D リテーナー フュージョン L (グリーン) (1入)

従来間接法による修復が推奨されていた大きなⅡ級窩洞でもコンポジットレジンによる直接修復が可能です。



フュージョンバンド 3種 各5枚

3Dカーブが強く、面積が広いため適合性が良く、歯牙形態にフィットしやすい



スモール
[小白歯用]

セミスタンダード
[小白歯、大白歯用]

スタンダード
[大白歯用]

特別キット標準価格 54,800円

販売名:コンポジット3D リテーナー 一般的名称:歯科用マトリックスリテーナー クラス分類:一般歯産機器(クラスI) 産産機器届出番号:27B1X00109000233
販売名:コンポジット3D システム 一般的名称:歯科用充填・修復材補助器具 クラス分類:一般歯産機器(クラスI) 産産機器届出番号:27B1X00109000236
販売名:コンポジット3D リングフォーセップス 一般的名称:歯科用充填・修復材補助器具 クラス分類:一般歯産機器(クラスI) 産産機器届出番号:27B1X00109000234
販売名:フュージョンバンド 一般的名称:歯科用マトリックスバンド クラス分類:一般歯産機器(クラスI) 産産機器届出番号:27B1X00109000330

●標準価格の後の数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2018年2月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。
●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。


製 造 ギャリソン・デンタル・ソリューションズ

製造販売 株式会社 **モリタ**


大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

Ⅱ級窩洞のコンポジットレジン充填修復のポイント

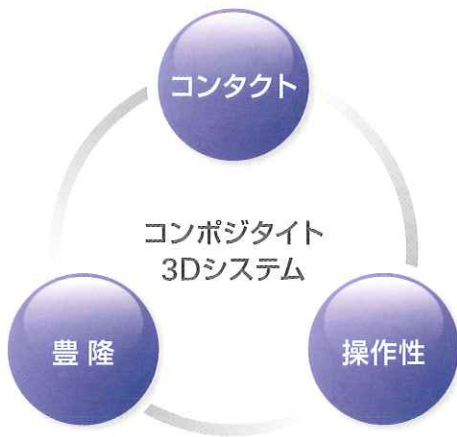

従来のトッフルマイヤーを使用したCR充填

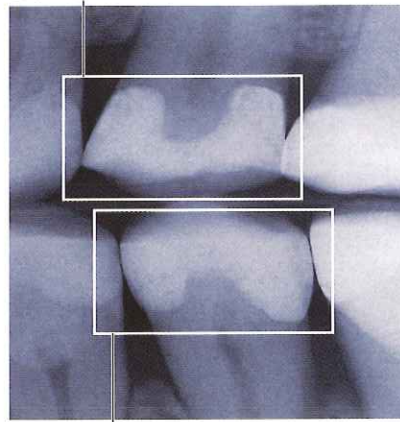

コンポジット3DシステムによるCR充填

緊密なコンタクトポイントと天然歯に近い豊隆を再現

高い歯間離間力と立体的な形状、優れた操作性によりⅡ級コンポジットレジン修復に最も重要な緊密なコンタクトポイントと自然な豊隆の再現を行うことが可能です。

コンポジット3Dシステム(白歯部)



離間力と適合性がキーポイント
従来のリテーナーの歯間離間力と解剖学的形状による脚部の適合性が向上されたことで、より歯にフィットしやすかつ緊密なコンタクトポイントの再現が可能です。




〈リテーナーS、Mを推奨する適応症〉

一般的なⅡ級窩洞 細くて広い又は深いⅡ級窩洞



直接修復の範囲を広げるリングLの追加
新しく追加されたリテーナーLにより従来間接法による修復が推奨されていた大きなⅡ級窩洞でもコンポジットレジンによる直接修復が可能です。

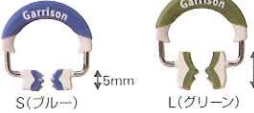

〈リテーナーLを推奨する適応症〉

歯と窩洞の大きさから選べる3種類のリテーナー 咬頭を失った大きなⅡ級窩洞

症例紹介① [Ⅱ級窩洞] フュージョン S(ブルー)を使用。



下顎左側第一大臼歯の窩洞形成を行う。
ラバーダム防湿し、コンポジット3Dシステムを装着する。
接着処理後、コンポジットレジン修復を行う。形態修正後、仕上げ研磨を行う。

(症例提供: 田代歯科医院 田代浩史先生)

症例紹介② [Ⅱ級窩洞] フュージョン L(グリーン)を使用。



上顎右側第二小臼歯の窩洞形成を行う。
ラバーダム防湿し、コンポジット3Dシステムを装着する。
接着処理後、コンポジットレジン修復を行う。形態修正後、仕上げ研磨を行う。

(症例提供: 田代歯科医院 田代浩史先生)

コンポジット3D システム フュージョンキットⅡ

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 3Dリテーナーフュージョン S 1入 | リングフォーセップス フュージョン 1入 |
| フュージョンバンド 5種 ×各5入 | フュージョンウェッジ 4種 ×各10入 |
| ・スモール ×5入 | ・エクストラスモール ×10入 |
| ・エクストラスモール ×5入 | ・スモール ×10入 |
| ・セミスタンダード ×5入 | ・ミディアム ×10入 |
| ・スタンダード ×5入 | ・ラージ ×10入 |
| ・ラージ ×5入 | |

標準価格 41,800円 番 206830003 色 683003

3D リテーナーフュージョン L(グリーン) (1入)

標準価格 17,900円 番 206830004 色 683004

フュージョンバンド

- | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
| スモール | エクストラスモール | セミスタンダード | スタンダード | ラージ |
| スモール[小白歯用] | エクストラスモール[小白歯用(歯頸部)] | セミスタンダード[小白歯、大白歯用] | スタンダード[大白歯用] | ラージ[白歯用(歯頸部)] |
| 50入 | 50入 | 50入 | 50入 | 30入 |
- 標準価格 各10,900円 番 206830005 色 683005