

アグサ TBS 錠

塩素系除菌剤

〔院内環境〕+〔石膏模型〕の感染対策 塩素系除菌剤

オプション追加キャンペーンセール

Aセット

歯科医院セット



- アグサTBS錠 100錠入×1……………1箱
- アグサTBS錠 1L溶液調製ボトル……………1本
- TBSパッファ(塩素中和剤)130mL×1……………1本

Bセット

院内環境セット



- アグサTBS錠 100錠入×1……………1箱
- アグサTBS錠 1L溶液調製ボトル……………1本
- アグサTBS錠 500mL溶液調製スプレーボトル……………1本

Cセット

歯科技工所セット



- アグサTBS錠 100錠入×1……………1箱
- 石膏模型 10分間浸漬容器(大)……………1個
- 石膏模型 60分間保湿容器(小)(かご付) 1個
- TBSパッファ(塩素中和剤)130mL×1……………1本

特長

速効性

多用途に
使用可能

低コスト

セット価格

各3,600円(税別)

お得なお試しパックがついてお値段据置き!

キャンペーン期間

平成30年 3月5日~7月31日

■使用方法

水1Lに本剤1錠を投入する。

→次亜塩素酸溶液となり除菌効果を発揮します!

(有効塩素濃度1,000ppm、pH約5.5 微酸性、溶解時間5分)

- ご使用に際しましては、製品説明書をよく読んでお使い下さい。
- 危険ですので酸類(塩素ガスが発生)、アルカリ類(危険物質の生成)と混ぜないで下さい。
- 本剤は次亜塩素酸系除菌剤で金属腐食性がありますので金属、金属パイプ等に使用後は拭き取る、水を十分に流す等の防錆処置をして下さい。

■アグサTBS錠仕様

主成分	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用期限	箱及びラベルに記載(製造日より5年間)

アグサ TBS錠中和剤 TBS パッファ

「アグサTBS錠」の塩素中和剤です!

TBS原液を使用(練和・浸漬)した石膏模型により、まれに casting (金属)の変色、複模型用印象材(シリコーン印象材)の硬化不良等を起こすことがあります。

本剤を噴霧するだけで石膏表面の塩素を中和し、塩素による諸問題を解決いたします。

特長

- 塩素臭を簡単に除去します。
- 塩素による casting の変色を防ぎます。
- 塩素による複模型用シリコーン印象材の硬化不良を防ぎます。

〈使用方法〉

石膏模型全体に直接噴霧してください。
※ご使用に際しましては製品ラベルに表示の説明書をお読み下さい。



包装130mL×2本(スプレーボトル)
3,600円(税別)

輸入・製造販売業者

アグサジャパン株式会社

〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目2番34号
TEL 06-6768-6344 06-6762-8022(営業部)
FAX 06-6768-6368 06-6762-8023(営業部)

アグサジャパン ホームページ <http://www.agsa.co.jp>

■お問い合わせ・ご用命は

アグサの感染予防対策


ご利用状況に合わせて3つのパターンからお選びください。今だけの限定品です！

Aセット

歯科医院 石膏模型の除菌



水1Lに「アグサTBS錠」1錠を投入
(1,000ppmの「TBS原液」の出来上がり！)

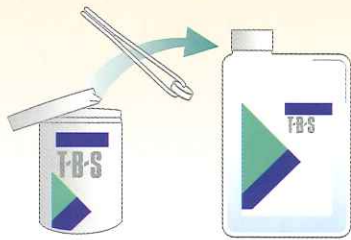

TBS原液で
練和した石膏泥を
印象体へ流し込む




※必要に応じて除菌した石膏模型に「TBSパフファ」を噴霧して下さい。


除菌された石膏模型

Bセット

院内環境の除菌 ノロウイルスの除菌

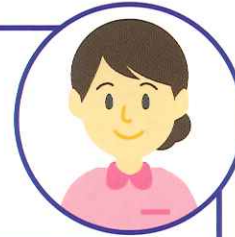

水1Lに「アグサTBS錠」1錠を投入
(1,000ppmの「TBS原液」の出来上がり！)

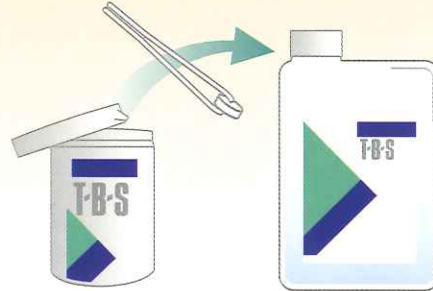

◎ユニット、チェアサイド、キャビネット床等の除菌

希釈した500ppmのTBS水溶液で拭く。
(希釈割合 TBS原液:水=1:1)



◎石膏トラップ、スピットン、排水パイプ流し台、トイレ等の除菌

希釈した400ppmのTBS水溶液を流し、
30分後に水を流す。
(希釈割合 TBS原液:水=2:3)

◎シャレ、薬瓶等の除菌

洗浄後、希釈した100ppmの
TBS水溶液に60分間浸漬する。
(希釈割合 TBS原液:水=1:9)



◎ノロウイルスの除菌

●手すり、ドアノブ、水道の蛇口等の除菌

希釈した200ppmのTBS水溶液で浸すように
ペーパータオル等で拭く。
(希釈割合 TBS原液:水=1:4)

●トイレの除菌

希釈した300ppm以上のTBS水溶液で
浸すようにペーパータオル等で拭く。
(希釈割合 TBS原液:水=1:2)





Cセット

歯科技工所 石膏模型の除菌




水1Lに「アグサTBS錠」1錠を投入
(1,000ppmの「TBS原液」の出来上がり！)

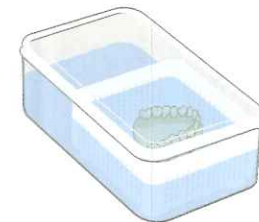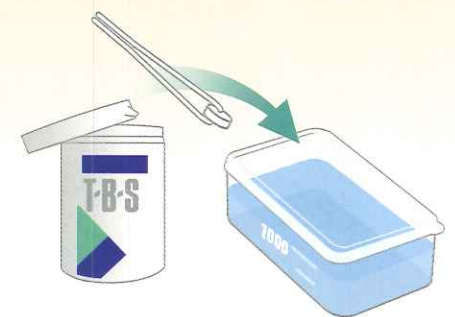

10分間浸漬



60分間保管

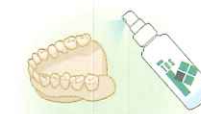

※必要に応じて除菌した石膏模型に「TBSパフファ」を噴霧して下さい。

除菌終了