

トレー清掃が楽々簡単!

アルギン酸塩印象材専用清掃材

ニシカトレークリーナーよくとれ〜る

ご愛用

2018年 3月23日 → 4月20日

感謝セール

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

このたびは日頃のご愛顧に感謝の気持ちをこめて、アルギン酸塩印象材専用清掃材「ニシカトレークリーナーよくとれ〜る」セールを実施いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

そのまま漬けて



はがすだけ!

【期間限定・数量限定】

標準価格:6,300円を

特別価格

にてご提供!!



〈包装〉1340mL 実用液 4L分

NISHIKA 日本歯科薬品株式会社

●販売店名

本社 山口県下関市西入江町2-5 〒750-0015 TEL 083-222-2221(代) FAX 083-222-2220
 大阪営業所 大阪市中央区道修町2-6-6 〒541-0045 TEL 06-6222-4090(代) FAX 06-6222-3950
 東京営業所 東京都台東区柳橋1-23-4 〒111-0052 TEL 03-5822-5350(代) FAX 03-5822-5351
 福岡営業所 福岡市南区大橋1-1-17-403 〒815-0033 TEL 092-559-1621(代) FAX 092-559-1622

お問い合わせ・資料請求は お客様窓口 ☎0120-8020-96 [ホームページ] <http://www.nishika.co.jp/>



ニョットレ-クリーナーよくとれ~るの特長

1. トレー清掃が楽々簡単




※本品は水で3倍に希釈して使用します。(ペースト状アルギン酸塩印象材「トクソー AP-1」ご使用の場合は2倍に希釈)

浸漬時間を大幅に短縮

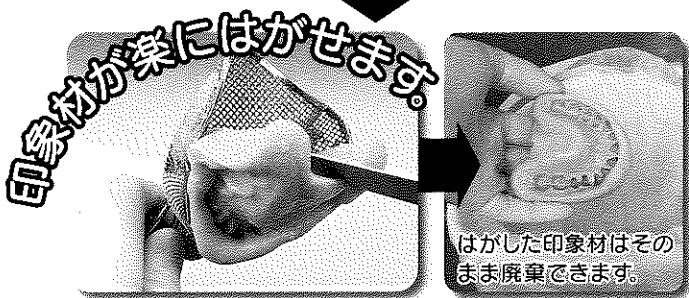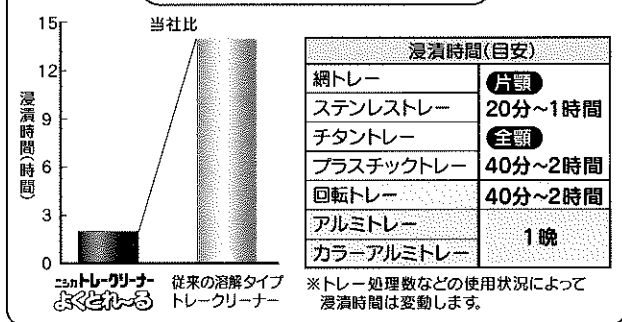

液を捨てた後、バケツがきれいです。

印象材の残渣が、バケツの底に沈殿しません。

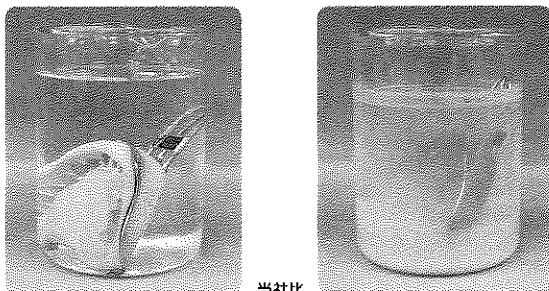


ニョットレ-クリーナーよくとれ~る

従来

2. トレーが長持ち

- トレーに無理な力をかけずに済みます。
- 防錆剤配合によりネットレー等がサビません。

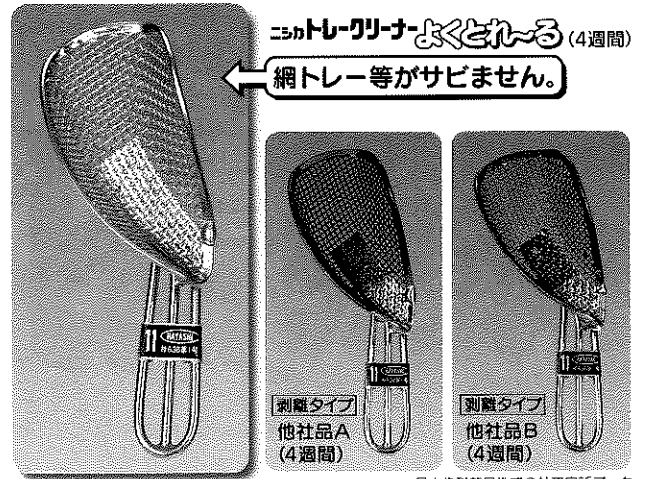

(各種印象用トレーをよくとれ~るに2週間浸漬したときの外観変化)

トレー製品名(メーカー)	外観変化
ハヤシネットレー (林歯科商店)	○ 変化なし
YSネットレー (YDM)	○ 変化なし
OU トレー (コマツ)	○~△ わずかに白変
エイブ印象用トレー (東京歯材社)	○ 変化なし
カラートレー (YDM)	○ 変化なし

日本歯科薬品株式会社研究所データ

◆スズ合金などのリムロックトレーは、黒く変色することがあるため、ご使用は避けてください。

3. すぐれた除菌力

実践臨床において2週間連続使用しても除菌効果が維持されます。

使用後2週間目の液

{よくとれ~る 使用済み液を用いた} 一般細菌数測定結果

対象	使用後2週間目の液
歯科医院A	一般細菌は検出されなかった
歯科医院B	一般細菌は検出されなかった

日本歯科薬品株式会社研究所データ

一般細菌は検出されず

手肌にやさしい

ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験の結果、無刺激性であることが確認されています(日本食品分析センター試験)。

環境に配慮

使用済み液は、微生物等により速やかに分解されるため、一般排水として廃棄できます。

ゴミ削減のため、折りたたんで小さくできるボトルを採用しています。

