

NEX NiTi FILE Ms

ご愛用感謝キャンペーン

GC



2018

5/21 ▶ 7/20

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「NEX NiTi FILE Ms ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。


キャンペーン期間中、

NEX NiTi FILE MsアソートセットA (21mmまたは25mm) または **NEX NiTi FILE MsアソートセットB (21mmまたは25mm)** と、
キャンペーンセット品『セーフティメモディスク(SMD) 12個入特別仕様』 を組み合わせでご提供!!

NEX NiTi FILE Ms アソートセットA

Aセット クラウンダウン法

歯冠側から始まり、根尖側で終わる根管形成

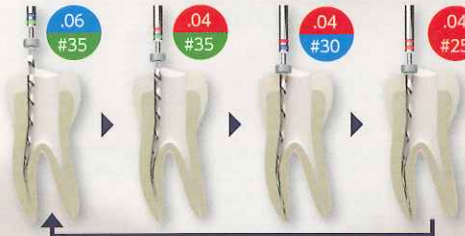

■作業長まで到達しない場合は最初のファイルに戻って作業を繰り返します。
■途中で作業長へ到達する場合があります。■作業長に到達しさらに根尖部の拡大を行う場合は逆の順番でファイルを作業長まで到達させ拡大を行います。(Aセットでは#40/.04まで拡大できます)

- POINT**
- フルレンジステックと比較して
 - ファイル先端が根管壁に比較的拘束されにくい
 - 破折のリスクが比較的低い
 - レジンやトランスポートーションがおきるリスクが比較的高い
 - 根管の彎曲に追従しにくい


【セット包装・希望医院価格】
アソートセットA 1函:6本入(#35/.08[※]、#35/.06、#35/.04、#30/.04、#25/.04、#40/.04
各1本入)=**¥10,500**
21mmまたは25mm ※印は長さ19mmです。

管理医療機器 225AABZX00077000

NEX NiTi FILE Ms アソートセットB

Bセット フルレンジステック

ファイルを作業長まで到達させながら行う根管形成

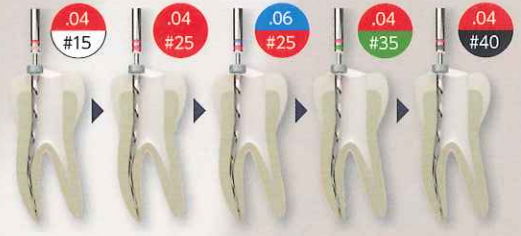

- POINT**
- クラウンダウン法と比較して
 - ファイル先端が根管壁に比較的拘束されやすい
 - 破折のリスクが比較的高い
 - 根管形成が比較的きれいにできる
 - 根管の彎曲に追従しやすい
 - ファイルの交換回数が少ない


【セット包装・希望医院価格】
アソートセットB 1函:6本入(#25/.08[※]、#15/.04、#25/.04、#25/.06、#35/.04、
#40/.04 各1本入)=**¥10,500**
21mmまたは25mm ※印は長さ19mmです。

管理医療機器 225AABZX00077000

キャンペーンセット品

セーフティメモディスク(SMD) 12個入特別仕様

期間限定販売品 希望医院価格 ¥1,500

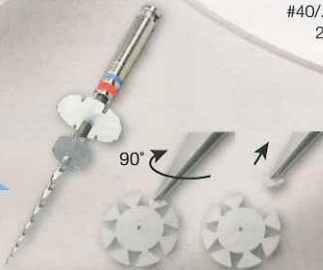

使用回数が確認できるSMD

セーフティメモディスクは、ファイルの使用回数の目安としてご使用いただけます。ファイルを使用することに[※]1枚ずつちぎり、8枚全てがなくなったらファイルを交換してください。
※負荷のかかる拡大形成に使用した場合は、2~3枚ちぎってください。

“Ms”形状記憶効果をもつマルテンサイト相(M相)のは柔らかく、しなやかに曲がる曲げるもどる

追従性

Ms独自のヒートリートメントテクノロジーにより高い柔軟性を実現したことで根管追従性が向上

形状記憶

形状記憶(Ms-2835)ワイヤー採用による優れた再生力

プレカーブ

NiTiファイルでありながらプレカーブの付与が可能

ご注文書

キャンペーン期間:2018年5月21日~7月20日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お取引販売店 _____

NEX NiTiファイルMs	ご注文数	キャンペーンセット品
アソートセット A (クラウンダウン法)	21mm	セーフティメモディスク(SMD) 12個入特別仕様
	25mm	
アソートセット B (フルレンジステック)	21mm	
	25mm	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受注発注業務に活用させていただきます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286