

歯科技工用アブレイブ研削器具

トリマーバンド キャンペーン

期間 2018年6月1日(金)～6月29日(金)

期間中、標準価格より **30%OFF!!**

石膏模型のトリミング等に威力を発揮!!

トリマーバンド


コース



ミディアム



トリマーバンド用 マンドレル

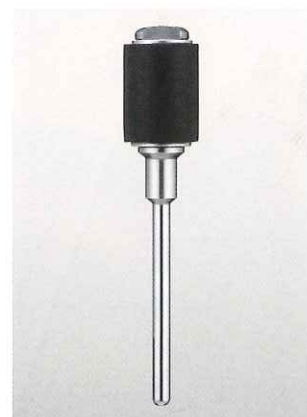

歯科用マンドレル 一般医療機器

医療機器届出番号 23B1X10001A49005

包装単位 1本 標準価格 ¥1,000 (税抜)

◆トリマーバンド用マンドレル 1本

標準価格 ¥1,000 (税抜) のところ
キャンペーン価格 **700円** まで提供!!

歯科技工用アブレイブ研削器具 一般医療機器

医療機器届出番号 23B1X10001C09074

用途	石膏模型のトリミング・レジンの研磨及び形態修正	回転数	15,000rpm以下
種類	コース・ミディアム	包装単位	20個/箱
サイズ	外径:12mm、高さ:12.7mm	標準価格	¥2,800 (税抜)

※トリマーバンド (20個/箱) にはマンドレルは付属していません。別途、「トリマーバンド用 マンドレル」をご購入下さい。

◆トリマーバンド (コース) 20個/箱

標準価格 ¥2,800 (税抜) のところ
キャンペーン価格 **1,960円** まで提供!!

◆トリマーバンド (ミディアム) 20個/箱

標準価格 ¥2,800 (税抜) のところ
キャンペーン価格 **1,960円** まで提供!!

トリマーバンドの取り付け方法



1 マンドレルの「留めネジ」「ワッシャー」「ラバー芯」を軸にはめます。1個を取り外します。
※1個のワッシャーは残しておきます。

3 「トリマーバンド」をラバー芯にはめます。

4 「ワッシャー1個」をはめて「留めネジ」で締め付けます。

※「留めネジ」の締め付けは非常にきつくなっています。ラバー芯を押しえつけながらネジを締めて下さい。ゴムの膨張によってトリマーバンドが固定され、空転防止になります。

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。