

フィジオクリーン 歯石除去用洗剤 発売2周年記念キャンペーン

期間 2018年5月21日～7月20日 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『フィジオクリーン 歯石除去用洗剤 発売2周年記念キャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を**特別価格**にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

【患者さん用】 義歯洗剤

フィジオクリーン 歯石くりん

6箱
と

■標準価格
30錠入(3g×30)1,000円
希望患者価格 1,200円(税別)

歯石の付きやすい患者さんへの毎日のお手入れに!!



フィジオクリーン 歯石くりん 患者向けサンプル1錠付き リーフレット

15部



詰め合わせて

特別価格にてご提供!!

キャンペーンコード 新 204530557 | 旧 453557

義歯洗剤

フィジオクリーン プロ 歯石用II

1.2L 3,900円
新204530548 | 旧453548

4.0L 9,800円
新204530549 | 旧453549



4Lの大容量タイプをラインナップ
ご希望にお応えし、容量の多い4Lの大容量サ
イズをご用意しました。4Lタイプには注ぎやす
いように専用の補助ホースを付属しています。

1.2L | **4L**
約10回 | **約33回**

※1回 120mL使用時



補助ホース

特別価格にてご提供!!

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2018年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

裏面に「歯石くりん」「フィジオクリーン プロ 歯石用II」の詳細を掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

歯石くりんが義歯をキレイにする




歯石溶解力

酸のチカラでゆるやかに歯石を除去!

歯石くりんはpH2.5の酸性でゆるやかに歯石を溶かし除去します。洗淨開始から約15分で0.45gの歯石を溶かし、金属を使った義歯でも30分の洗淨で十分な効果が期待できます。



歯石溶解量 (g/150mL)

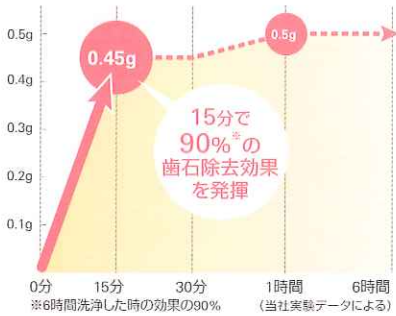

●義歯材料への影響

歯石くりんの使用で、金属など一部の義歯材料に変色などの影響が出るものがあります。歯石くりんを使用しても問題ないか義歯材料を確認してから使用してください。

	材料	影響	備考
床・裏装材	人工歯	○	
	床用レジン	○	
	ノンメタルクラスプ用樹脂	○	
	軟質裏装材 (シリコン系)	○	
	軟質裏装材 (アクリル系)	○	
	ティッシュコンディショナー	×	
金属材料	コバルトクロム合金	△	30分以内の使用
	金銀パラジウム合金	△	30分以内の使用
	チタン系	×	変色、くすみ
	歯科用銀ロウ	×	変色、くすみ
	銀合金	×	変色、くすみ

除菌力

30分の洗淨でカンジダ菌を強力除菌!

義歯性口内炎などの原因になるデンチャープラークは、カンジダ菌やその他細菌で構成されています。歯石くりんはそれら細菌に30分の洗淨で優れた除菌効果を発揮し、義歯を清潔に保ちます。

カンジダ菌除菌 生菌数 (mL)




⚠ 金属を使用した入れ歯は30分で取り出してください。(銀合金、銀ロウ材、チタンはご使用いただけません)

DENTURE CLEANER PHYSIO CLEAN PRO for DENTAL CALCULUS II

歯石溶解力 短時間の洗淨で歯石を溶解!

超音波洗淨機で5分から10分間洗淨することで、ガンコな歯石を短時間で除去します。当社従来品から洗淨時間を短縮しつつ、歯石溶解力は24倍と大幅にパワーアップしました。金属を使用した義歯にも問題なくご使用いただけます。

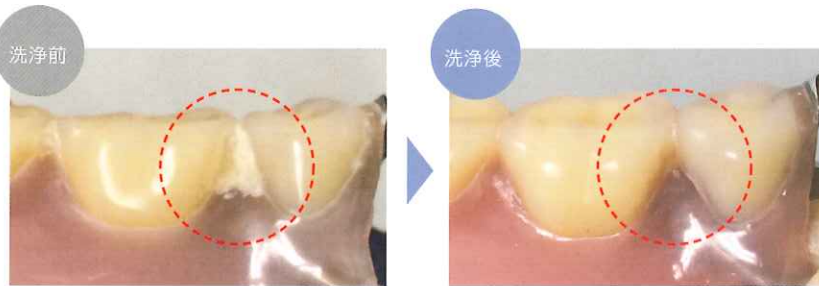

歯石溶解量 (g/120mL 超音波洗淨10分間)



洗淨力 歯石用洗淨剤ながら高い洗淨力



金属 金属のくすみをキレイに除去



製造販売 **NISSIN**

東日本営業所 東京都台東区台東 4-14-8 〒110-0016 T 03.3836 3691
西日本営業所 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 513 京都第一生命泉屋ビル 8F
〒604-0847 T 075.257 7255
<http://www.nissin-dental.jp>

発売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com