

2018年  
9.21  
▼  
2019年  
3.20

歯科用 入れ歯洗浄剤

Tokuyama Dental

トクヤマリベースクリーナー

# 新発売キャンペーン

組み合わせでご提供いたします! 標準医院価格 合計 ¥3,800

患者様向け  
リーフレット (1錠付) 10枚  
標準医院価格 ¥500

トクヤマリベースクリーナー  
標準医院価格 ¥3,300/6箱



\*一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。\*価格は2018年9月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。\*数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

## トクヤマリベースクリーナー 新発売キャンペーン注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

トクヤマリベースクリーナー  
+ 患者様用リーフレット キャンペーン

個

お届け歯科商店名

TEL

( )

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 **トクヤマデンタル**

お問い合わせ・資料請求  
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間  
9:00~12:00/13:00~17:00 (土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌 TEL011-812-5690 ●仙台 TEL022-717-6444 ●東京 TEL03-3835-7201 ●名古屋 TEL052-932-6851 ●大阪 TEL06-6386-0700 ●福岡 TEL092-412-3240



# トクヤマリベースクリーナー は...



※全ての菌を除菌できるわけではありません

## 汚れを素早く除去

★汚れがひどい場合には、浸漬後にスポンジ等で軽くこすると効果的です。

### 〈着色〉



洗浄前: 患者が着色の除去を希望  
洗浄後: 5分浸漬、こすり洗い後

### 〈プラーク〉



洗浄前: 染色液によるプラーク染め出し  
浸漬状態: 色素の浮きを確認  
洗浄後: 5分浸漬、こすり洗い後

【写真提供】神奈川県横浜市 田中歯科医院 田中五郎先生

### 患者・介護者 ● 毎日の入れ歯の洗浄に

入れ歯に付着した菌は12時間で約4,000倍に増殖します。\*

入れ歯を清潔にお使いいただくために毎日洗浄剤を使用するようお勧めください。

※【情報提供】二川 浩樹 先生 (広島大学大学院 教授)

### 歯科医師 ● 入れ歯の補修前の清掃に (裏装、床修理、増歯等)

補修前に義歯を清掃することは、より確実な仕上がりにつながります。



### 使用方法

- 150~200mL程度の水に1錠入れてください。
  - すぐに入れ歯全体を浸してください。
  - 洗浄後は水でよくすすいでください。
- 
- めるま湯(40°C程度)がより効果的。  
洗浄時間は5分程度。ひどい汚れは浸漬後にスポンジなどで軽くこするとより効果的。  
残った洗浄液はすぐに捨てる。毎日の洗浄が大切。

トクヤマリベースシリーズ、ソフリライナーシリーズで裏装された入れ歯の洗浄にもお使いいただけます。



歯科用 入れ歯洗浄剤

## トクヤマリベースクリーナー

- 用途: 入れ歯、矯正用リテーナー、マウスガードの洗浄
- 内容量: 6箱包装 (ディスプレイ箱) 1箱32錠入り(2.8g×32)
- 標準医院価格: ¥3,300(税抜) ※1箱単価 ¥550(税抜)
- 希望患者価格: ¥700(税抜)/1箱

## 株式会社トクヤマデンタル

〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

☎ 0120-54-1182 [受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土日祭日は除く)]

■ご用命は