

キャンペーン  
実施期間

2018年  
9月21日(金)~2018年  
10月30日(火)  
14:30 ご注文受付分まで

## プライム&ボンド ユニバーサル

# ダブルパック キャンペーン!

6月21日に発売以来、多くの先生方にご導入いただきましたプライム&ボンドユニバーサルを期間限定にてダブルパックキャンペーンを実施いたします。是非この機会にお求めください!



通常希望小売価格

4.0ml ボトル 1本 : 11,000円

コード : 60667350WP

キャンペーン希望  
小売価格 **19,800円**

※ 4.0ml ボトル 2本

販売名: プライム&ボンド ユニバーサル 一般的名称: 歯科用象牙質接着材・歯科用知覚過敏抑制材料  
認証番号: 230AGBZX00043000 クラス分類: II (管理)

① キャンペーン商品の返品および交換は一切いたしません。 ② 他の特別価格商品と併用してご利用いただくことはできません。 ③ 本キャンペーンをご注文いただく際には、本チラシの注文欄をご利用いただくか、注文用紙にキャンペーンである旨を必ずご記入下さい。 ④ 数量限定につき、期間中でも品切れの場合は終了とさせていただきます。

### ご注文書

プライム&ボンド ユニバーサル ダブルパック	注文数 個
------------------------	----------

ご施設名:

〒□□□□-□□□□ ※郵便番号は必ず記入してください。

ご住所:

TEL:

FAX:

※弊社では、お申込により取得した個人情報を厳重に管理し、予めご本人の同意を得ることなく第三者への開示・提供することはありません。  
当社での個人情報利用目的は下記の通りです。  
1. お申込に伴うご連絡 2. 弊社からのセミナー・サービス・新商品のご案内への利用  
□ 各種情報・案内を希望しない(印が付いていない場合は、「希望する」とさせていただきます。)

デンツプライシロナ株式会社 本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル  
カスタマーサービス ☎ 0120-789-123 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

# プライム&ボンドユニバーサル

新技術のアクティブガードテクノロジーが歯面の水分をコントロールし、接着阻害要因を除去。均質で薄い皮膜を形成するため安定した接着を実現します。




アクティブガードテクノロジーとは、デンツプライシロナ社が開発したひとつの分子内に親水性と疎水性をバランスよく持ったベースモノマーです。水分との接触や溶媒の揮発による層分離を起こさず、さまざまな環境下で安定した操作が可能となりました。また、機能性モノマーには歯質やジルコニアなどの金属にも高い接着性能を発揮するMDP\*モノマーと、PENTAを配合しており、高く効率的な接着性能を発揮します。

\* 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

## 1. 湿潤環境の歯面でも安定した接着性


アクティブガードモノマーは歯面上の水と接触しても分離せず、均質層を形成。分離することなく被着面にムラなく塗布できるため、歯面環境に影響されず安定した接着を実現。

異なる湿潤環境下でのせん断接着試験

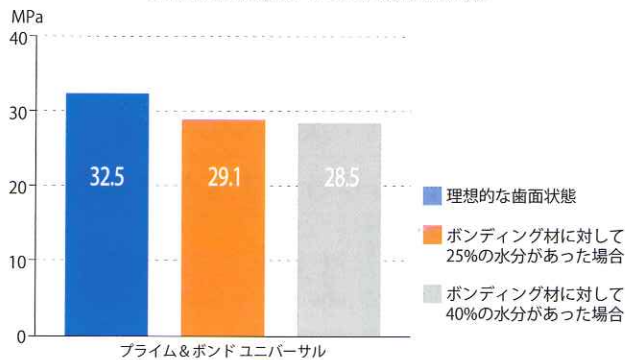

プライム&ボンドユニバーサルは過度に湿潤した象牙質でも安定した接着性能を示した。(データ測定：デンツプライディトレイ社)

水と接触した際のイメージ (従来品との比較)

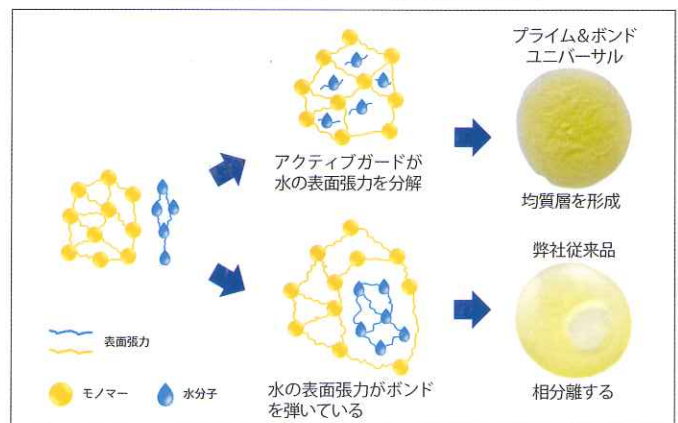

## 2. 窩洞に自然に広がり薄い皮膜を形成

ボンディング材を塗布すると同時にアクティブに窩洞に自然に広がってゆき、薄く均一な皮膜を形成します。塗りムラによるドライスポットの発生やギャップの形成がなく、術後痛のリスクも軽減します。



塗布直後 1秒後 3秒後  
ボンディング材を塗布後、数秒で薄く自然に広がる様子



弊社従来品



5~10μm以下の薄い皮膜を形成

## 3. 滴下後最長 30 分使用可能

専用のクリックスディッシュの遮光下では 30 分間使用が可能です。複数歯にわたる処置の際にも 1 滴を無駄なく使用可能です。

