

非ユージノール系仮着材

カチャックス 新発売キャンペーン

キャンペーン期間

2018
9/21~
[fri.]
12/20
[thu.]

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。
このたび、カチャックスの新発売を記念いたしまして、
「カチャックス 新発売キャンペーン」を
企画いたしました。
期間中、「カチャックス」を特別価格にて
ご提供いたします。
ぜひ、この機会をご利用ください。

- 優れた操作性
- 高い保持性と除去性の両立
- ユージノールフリー



歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント

カチャックス[®]

標準価格 ¥3,700 204610125

ベースペースト	1本(35g)
キャタペースト	1本(16g)
練和紙	1冊

キャンペーン特別価格にてご提供!!

●販売名 カチャックス ●一般的名称 歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント ●医療機器認証番号 229AKBZX00065000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。

●掲載商品の標準価格は2018年9月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

●お問い合わせは、お出入りのディーラーまでお願いします。

●ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。

●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。



Kachax®
カチャックス®

優れた
操作性

高い保持性

ユージノール
フリー



優れた操作性

適量採取できる細いノズル

チューブの先端ノズルが細いので、等量採取できます。



必要量の採取が可能

〈採取量の目安〉



単独冠の場合

複数冠の場合


練和しやすいペースト

ベースペーストとキャタペーストは、滑らかに練和することができ、ムラなく均一な状態が目視で確認できます。




操作ステップ

準備

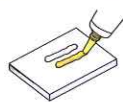

練和紙にベースペーストとキャタペーストを等長押し出す

練和
(30秒)

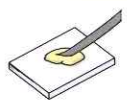

スパチュラで30秒間練和する

操作可能時間

0秒



テンポラリークラウンに移送する

硬化時間
(装着後2分)

2分30秒



テンポラリークラウンを支台歯に装着する

余剰セメント除去

4分30秒



硬化後、余剰セメントを除去する

余剰セメントの除去が容易

シャープに硬化するためベタつきがなく、余剰セメントが一塊で除去できます。



高い保持性と除去性を両立

良好な保持性

仮着期間中、テンポラリークラウンをしっかり保持します。



支台歯の清掃が容易

テンポラリークラウン撤去後の支台歯にセメントが残りにくく、清掃が容易です。



ユージノールフリー

臭いが少ない

仮着材特有の薬品臭やユージノール臭がなく、患者さんの不快感が抑えられます。

刺激が少ない

歯周組織に対する刺激が少なく、ユージノールアレルギーの患者さんにも使用できます。

レジンセメントの重合阻害がない

重合阻害作用があるといわれるユージノールを含まないので、最終修復物を接着性レジンセメントで装着する場合にも使用できます。

販売名 スーパーボンド
一般的名称 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号 Z21AABZX00115000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

最終修復物の装着には
スーパーボンド®



製造販売 サンメディカル株式会社
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com