

歯科材料の接着強さの向上に！

チェアサイドで使用できるサンドブラスター



マイクロエッチャー キャンペーン

2018年
9月21日(金)～
11月20日(火)

マイクロエッチャーII

ノズルのみ
オートクレーブ滅菌可能



歯科医院様参考価格
¥59,000

酸化アルミナ (50ミクロン)



歯科医院様参考価格
¥2,900



マイクロエッチャーII・ 酸化アルミナ(50ミクロン) セット

合計歯科医院様
参考価格 **¥61,900**

キャンペーン
特別価格

マイクロエッチャーII ブローキット



歯科医院様参考価格
¥65,000

酸化アルミナ (50ミクロン)



歯科医院様参考価格
¥2,900



マイクロエッチャーIIブローキット・ 酸化アルミナ(50ミクロン) セット

合計歯科医院様
参考価格 **¥67,900**

キャンペーン
特別価格

一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X10098010032

マイクロエッチャーII A

ノズル・ハンドピースは
オートクレーブ滅菌可能



歯科医院様参考価格
¥69,000



スリムノズル

酸化アルミナ (50ミクロン)



歯科医院様参考価格
¥2,900



マイクロエッチャーII A・ 酸化アルミナ(50ミクロン) セット

合計歯科医院様
参考価格 **¥71,900**

キャンペーン
特別価格

マイクロエッチャーII A ブローキット



歯科医院様参考価格
¥75,000

酸化アルミナ (50ミクロン)



歯科医院様参考価格
¥2,900



マイクロエッチャーII Aブローキット・ 酸化アルミナ(50ミクロン) セット

合計歯科医院様
参考価格 **¥77,900**

キャンペーン
特別価格


一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X10098010033

CAD/CAM冠コンポジットレジン製ブロック下顎第一大臼歯！※
2017年12月より保険適用！

CAD/CAM冠の内面処理に！チェアサイドで使用できるマイクロエッチャー

CAD/CAM冠を装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理（サンドブラスト処理およびシランカップリング処理等）を行った場合は、内面処理加算（45点）が算定できます。

※算定の留意事項につきましては各通知をご確認いただきますようお願い申し上げます。

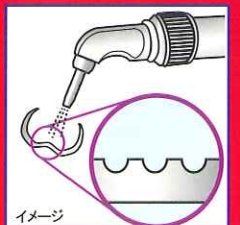

イメージ

マイクロエッチャーは、下記のサンドブラスト処理を行うことができます

メタル(金バラ・プレシャスメタル)

インレー、アンレー、クラウン、ブリッジ、コア、ポスト等

セラミックス・硬質レジン

CAD/CAM材料、インレー、クラウン、ベニア等


矯正用ブラケット、バンド等

接着スプリント

デンチャーリペアー

補綴物再合着


インプラント上部構造

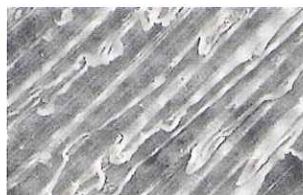


ダイヤモンドバー処理した金属面
金属面が一方方向に処理されますので、
接着面積があまり大きくなりません。
メタルプライマーが流れてしまうこと
もあります。



サンドブラスト処理した金属面
金属面全体に接着面積が約2倍に増大し
微小機械的保持力のある表面ができ、接
着力が向上します。

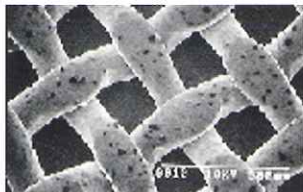

矯正用ブラケットサンドブラスト前

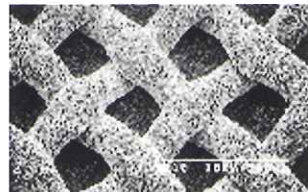

矯正用ブラケットサンドブラスト後

サンドブラスト処理を行うことにより、各種歯科材料の接着面積を迅速に向上させることができ、機械的保持力を強化します。

マイクロエッチャーを用いてサンドブラスト処理した面のSEM像

金バラ




プレシャスメタル



ニケイ酸リチウムブロック



ジルコニアブロック

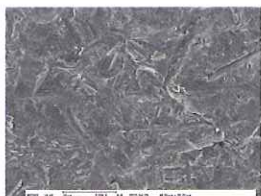

CAD/CAM レジンブロック



硬質レジン破損修復手順(例)



1) 硬質レジン破損後。



2) サンドブラスト後。



3) シランカップリング剤を塗布した後、メタルプライマーを塗布し、前面にボンディング材を塗布。金属面にオーバーコーを一層塗布。



4) 光重合型コンポジットレジン修復。



5) 光重合、形態修正、研磨後。

SEM像および症例ご提供: 宮崎 真至 先生(日本大学歯学部保存修復学教室修復学講座教授)

本紙に掲載されている価格は2018年8月21日のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製造国: アメリカ合衆国

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

製造販売業者 EIKO CORPORATION

株式会社エイコー
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

販売業者 株式会社モリムラ

株式会社モリムラ
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は