

歯科用印象材混こう器

速い! 簡単! キレイ!

Tokuyama Dental

トクヤマ APミキサーⅢ

2018 10.22(月) ▶ 2019 3.20(水)

新規導入キャンペーン

この機会にAP自動練和システムの導入を考えてみませんか?

歯科用印象材混こう器 (一般医療機器)届出番号08B2X00011000114

トクヤマAPミキサーⅢ セット
標準医院価格 **¥413,000**



アルギン酸塩印象材用清掃材
トクヤマ
APTレークリーナー
標準医院価格 **¥6,700**



アルギン酸塩印象材用接着材
トクヤマ
アルジボンドセット
標準医院価格 **¥4,200**



高純度安定型次亜塩素酸水
トクヤマ デントジア
印象体除菌スプレー
標準医院価格
¥1,800



歯科用アルギン酸塩印象材
トクヤマAP-1セット
標準医院価格
¥27,500

ファースト、
ノーマル、
スロー
1種類選択

バースト



(管理医療機器) 認証番号220AFBZX00071000



標準医院価格
合計 **¥453,200**
をセットで

特別価格

※価格は2018年10月現在のものです。消費税は含まれておりません。 ※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。 ※数量に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただくことがあります。

トクヤマAPミキサーⅢ(新規導入キャンペーン) 注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

()

	ファースト	ノーマル	スロー	セット 注文します
トクヤマ AP-1セット	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 **トクヤマデンタル**

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間
9:00~12:00/13:00~17:00
(土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル 検索

●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240

トクヤマAPミキサーⅡの特徴

アルジネート印象材はスイッチを押すだけ!



不要! 水・粉の計量 + 不要! 手練和

目で見ながら必要量の印象材を
直接トレーに盛り付ける事ができます!

HPでも動画で
紹介中!



※一部機種では閲覧できない場合もございます

使用後のお手入れもかんたん!

「攪拌子」、「外筒」についた印象材は、硬化後に清掃棒でかんたんに取ることができます。



攪拌子および外筒内の印象材は清掃棒を使用して押し出します。



攪拌子に付着した印象材は清掃棒で切り込みを入れます。



切り込み部分から手で剥ぎ取ります。

印象材の稠度も5段階で調節可能!



硬い



スタディモデルや義歯概形印象(一次印象)に応用可能です。



普通



寒天との連合印象や通常の有歯顎時印象等に適しています。



軟らかい




総義歯や局部義歯印象時の二次印象等に応用可能です。


ムラがなく、均一な練和物。かつ作業時間を短縮。

気泡の混入がほとんどありません。

作業時間を短縮できます。

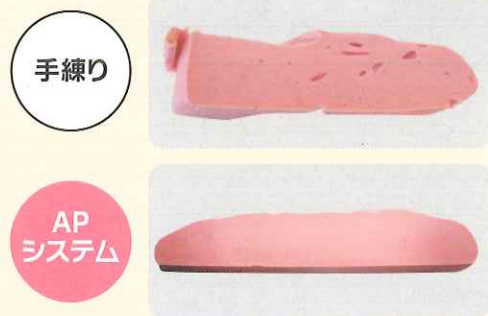

●印象採得1回あたりの作業時間比較

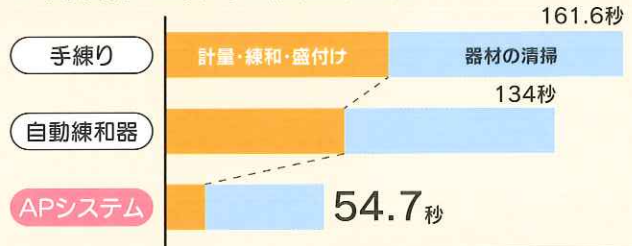

茨城県鹿嶋市開業 田中晃伸先生 小林正憲先生 著
「アルジネート印象材自動練和システム(APミキサーⅡ)の臨床における有用性」より(自動練和器は当社データによる)