

セメントフェスタキャンペーン

キャンペーン期間：2018年11月1日(木)～12月28日(金)

Campaign 1

リライエックス™ アルティメット レジン セメント

ダブルパックキャンペーン

セット内容


- ダブルパック (同色2本)
- スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ ユニドースタイプ×10本

キャンペーン希望医院価格

製品番号

56887WSC **56888WSC** **56890WSC**
(A1ユニバーサル) (A3オパーク) (トランスルーセント)

26,460円

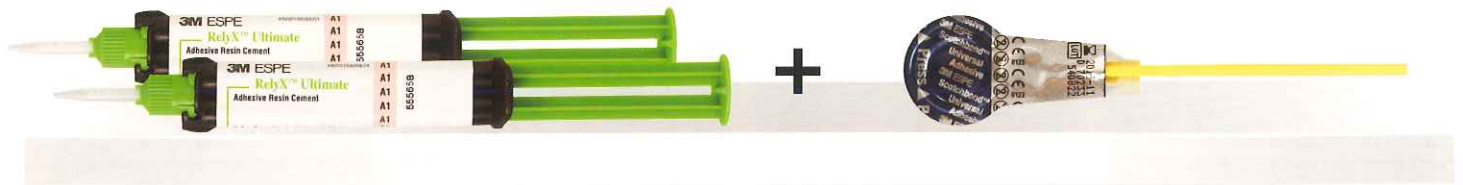

Campaign 2

リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス 歯科接着用レジンセメント

バリューパックキャンペーン

セット内容


- バリューパック (同色3本)
- フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジンU (ユニバーサル) ×1本

キャンペーン希望医院価格

製品番号

56849SC **56857SC** **56858SC**
(A2ユニバーサル) (A3オパーク) (トランスルーセント)

33,400円

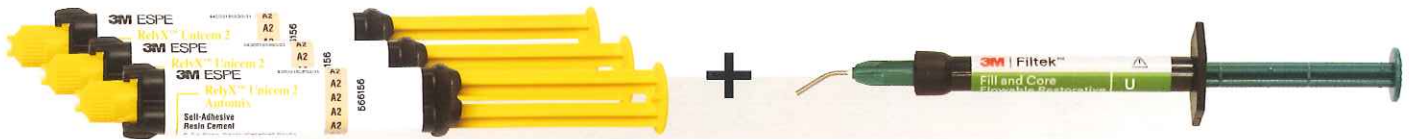

Campaign 3

リライエックス™ ルーティング プラス 合着用ガラスアイオノマー系レジンセメント

ジャンボパックキャンペーン

セット内容

- ジャンボパック (5本)
- Special Information Vol.10 佐氏 英介先生

キャンペーン希望医院価格

製品番号

3525JPSC

27,500円



上顎右側第一小白歯の補綴修復

臨床写真提供：松本 和久 先生(北海道ご開業)



上顎第一小白歯の根管治療後。グラスアイオノマーセメントを用いて二重仮封を行う。




仮封材を除去し、**リライエックス™ ファイバーポスト用根管形成ドリル**を用いてポスト孔を形成する。




水洗後ペーパーポイントを用いてしっかりと乾燥を行う。




リライエックス™ ユニセム2 オートミックス 歯科接着用レジンセメントを、エンド用チップを用いて填入する。

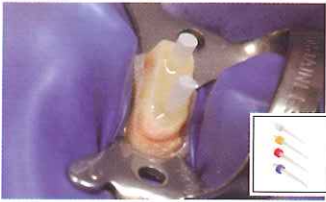


リライエックス™ ファイバーポストを植立する。

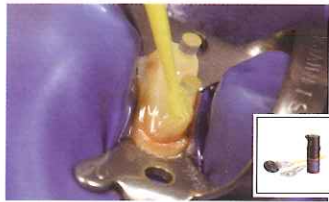

レジンセメントを照射した後、残存歯質、ファイバーポストに**スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ**を20秒間処理する。

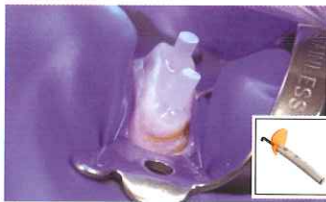


乾燥を5秒以上しっかり行った後、**エリパー™ ディープキュアLED 光重合器**で10秒間照射する。

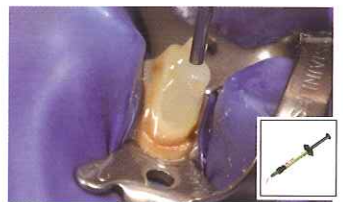


フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジンを築盛する。




最終形成後。

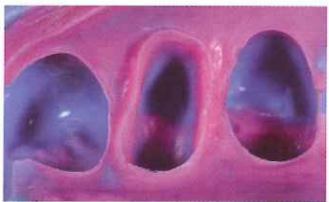


インプリント™ 4 印象材のライト ボディーとペンタ™ ヘビー ボディーを用いて精密印象を行う。

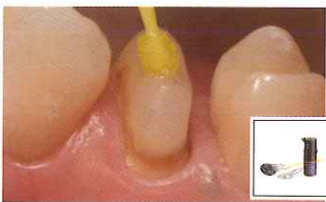

補綴物の装着に先立ち、支台歯に**スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ**を20秒間処理する。築造レジンの部分にも残存歯質にも塗り分ける必要がない。5秒以上エアードライをするが、照射は行わない。

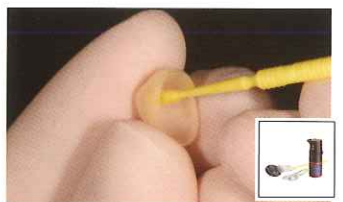

補綴物(二珪酸リチウム含有セラミックス)に**スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ**を20秒間処理する。5秒以上エアードライをするが、照射は行わない。

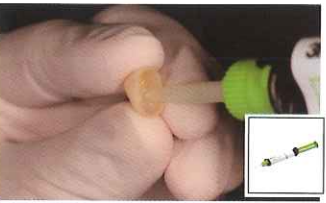

リライエックス™ アルティメットレジンセメントを補綴物に塗布し、支台歯に装着する。



術後。

フィルテック™ フィル アンド コア フロー コンポジットレジン



単品

内容：2g×1本、注入チップ×20個
製品番号：4872U(ユニバーサル)
4872A1(A1)
4872A2(A2)
希望医院価格：2,500円

バリューパック

内容：2g×3本、注入チップ×20個
製品番号：4872UT(ユニバーサル)
4872A1T(A1)
4872A2T(A2)
希望医院価格：6,000円

スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ ユニドースタイプ



50本入り

内容：50本(計5.5mL)
製品番号：41255
希望医院価格：6,800円

100本入り

内容：100本(計11mL)
製品番号：41256
希望医院価格：12,600円

販売名：リライエックス アルティメットレジンセメント 認証番号：225AKBZX00136000 / 販売名：リライエックス ユニセム2 オートミックス 認証番号：223AKBZX00006000

販売名：リライエックスルーティング プラス(歯科接着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント) 認証番号：229AKBZX00036000

販売名：スコッチボンド ユニバーサル アドヒーズブ 認証番号：224AKBZX00054000 / 販売名：フィルテック フィル アンド コア フロー コンポジットレジン 認証番号：229AKBZX00030000

販売名：リライエックス ファイバーポスト 認証番号：228AKBZX00013000 / 販売名：インプリント 4 印象材 認証番号：225AKBZX00168000

販売名：エリパー ディープキュア LED 光重合器 届出番号：13B1X10109000261

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー 歯科用製品事業部

Web
http://www.mmm.co.jp/hc/dental/

3M コールセンター ☎0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金(土・日・祝を除く)
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3157をご利用ください。

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2018年9月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3M、リライエックス、スコッチボンド、フィルテック、インプリント、エリパーは、3M社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2018. All Rights Reserved. DEN-1612-AJ (091880) PN/e.