

歯列矯正してる人のリテーナー洗浄剤

リテーナークリーン

VIVA^(美歯)

除菌力

99.9%

ご愛顧キャンペーン!

2018年10月22日(月)～12月19日(水)

新規歯科医院様に

限定：5,000箱

リテーナークリーンVIVA⁺ 1箱お買い上げで



リテーナークリーンVIVA
試供品 2錠入



歯科医院様参考価格
60錠入 ¥700

2個 プレゼント!!!!


※期間中でも限定数量(5,000箱)に達し次第、終了とさせていただきます。

キレイな歯並びには
キレイなお口環境を。
毎日のお手入れにより、
さらに効果が増します。



クリーンメカニズム トリプルパワーでスッキリ洗浄!

※イメージ図

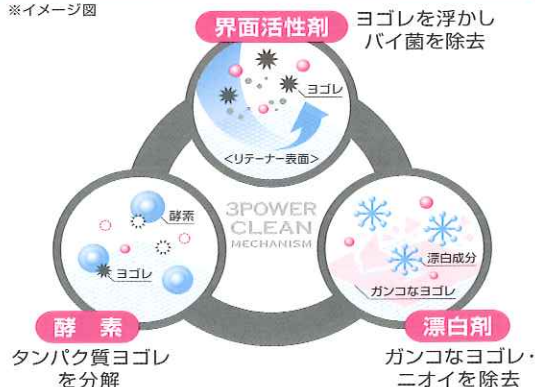

白元アース

リテーナークリーンviva
ホームページ
<http://retainer-clean.net/>





なぜリテナーをキレイに しなければいけないの？

その理由は

- ❶ ヨゴレが溜まりやすい。
- ❷ バイ菌が繁殖しやすい。
- ❸ 虫歯になりやすい。
- ❹ 口臭が臭くなる。

だからなの！



リテナーは専用の洗浄剤で 洗うのがベスト！

その理由は

- ❶ リテナーを傷つけない
- ❷ 目に見えないヨゴレやバイ菌も
ノックアウト
- ❸ 簡単・手軽

だからなの！

ママからの一言

歯並びはキレイ！でも虫歯だらけ・・・ということにならないように、毎日きちんとお手入れをすることが欠かせません。でもリテナーはとても傷つきやすいので、研磨剤入りの歯磨き粉を使ったり、自然歯用の硬い毛先の歯ブラシを使ってゴシゴシするのは逆効果です。正しい知識を持って、楽しみながら歯列矯正ライフを送って下さい。



リテナークリーンVivaの 3大特長



3大特長 その1 **Cool**

フレッシュなピンクグレープ
フルーツの香りと
クールなミントの香りでお口爽やか！



3大特長 その2 **Easy**

3ステップで簡単洗浄！

※使用方法をご参照下さい。




3大特長 その3 **Clean**

ニオイもバイ菌もクリーンアップ！

- ❶ 界面活性剤の「浮かし」効果
- ❷ 漂白剤の「除去」効果
- ❸ 酵素の「分解」効果

クリーンメカニズム トリプルパワーでスッキリ洗浄！

※イメージ図

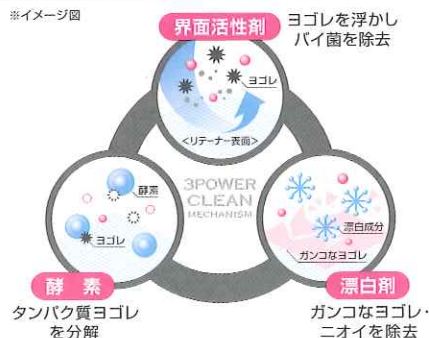

使用方法

step.1



約150mLの水またはお湯(40~50℃)に、本品を1錠入れます。

水温が低いとまれに発泡しにくくなることもあるため、お湯をお勧めします。

step.2



すぐにリテナーを浸してください。

ふつうのヨゴレの洗浄は5分程度、ひどい場合は浸け置きが効果的です。

step.3



洗浄後は水でよくすすいでください。

溶液は毎回お取替えください。同様の洗浄方法でリテナーレトリバーも洗浄できます。

成分

- ・漂白剤 (過硫酸塩、過ホウ酸塩)
- ・アニオン系界面活性剤
- ・酵素
- ・炭酸塩
- ・クエン酸
- ・結合剤
- ・流動改善剤
- ・香料
- ・色素

液性

- ・中性

内容量

- ・2.8g × 60錠

本紙に掲載されている価格は2018年10月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

販売元



株式会社モリムラ

株式会社モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL. 03-3836-1871 FAX. 03-3832-3810
http://www.morimura-jpn.co.jp

製造元



白元アース株式会社

お問い合わせ
〒123-0852 東京都足立区関原 2-42-1
TEL. 03-5845-5860 FAX. 03-3887-5350

●製品に関するご用命は