

トクヤマ デントジア 希釈用原液

高純度安定型次亜塩素酸水

新発売
キャンペーン

- 1 幅広い菌やウイルスに有効
- 2 素早く簡単除菌
- 3 様々な用途に対応

清拭用の除菌液が
ボトルの目盛線で
簡単に調製できます。



特別価格
にてご提供

標準医院価格
¥3,900 2L

標準医院価格
¥500 希釈用
スプレーボトル

*一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。*価格は2018年11月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。*数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

トクヤマ デントジア 希釈用原液 新発売キャンペーン注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

()

トクヤマ デントジア

希釈用原液2Lキャンペーンパック

セット

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル


検索

1 幅広い菌やウイルスに有効


「トクヤマ デントジア 希釈用原液」は高純度安定型の弱酸性次亜塩素酸水です。院内環境の衛生対策として、幅広い菌やウイルスの除菌に有効です。

「弱酸性次亜塩素酸水」は 次亜塩素酸ナトリウムを薄めたアルカリ性水溶液の約80倍の除菌効果を持つと言われています。高い除菌力を持ちながら、皮膚に触れても問題のない扱いやすさが特徴です。

【次亜塩素酸の抗微生物スペクトル】

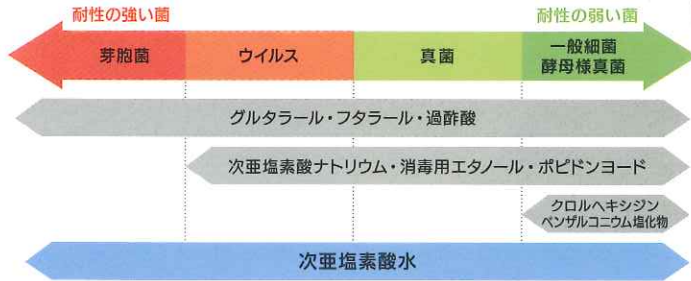

【次亜塩素酸の除菌のメカニズム】

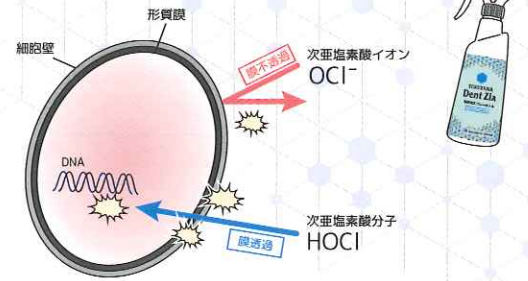

次亜塩素酸は小さい分子サイズに加え、微生物の細胞壁や形質膜を通り抜け内部に侵入することができるため、微生物の内部から弱体化・無力化することが可能です。

2 素早く簡単除菌

最短10秒で簡単除菌!



【菌・ウイルスに対する作用時間と除菌率】

	細菌・真菌	ウイルス	芽胞菌
500ppm 原液	10秒 >99.99%	10秒 >99.99%	25秒 >99.99%
50ppm 10倍希釈	10秒 >99.99%	10秒 >99.99%	5分 >99.98%

試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター
 試験品：「トクヤマ デントジア」
 試験方法：試験品に直接菌・ウイルスを接種する方法

3 様々な用途に対応

推奨希釈倍率：原液 5倍 10倍

- ユニットまわりの除菌に
- キャビネットの除菌に
- 待合室のソファやテーブルの除菌に
- 保護メガネの除菌に
- 歯ブラシやTBI時のツールの除菌に
- マウスガードやホワイトニングトレーの除菌に
- スパチュラやツール類の除菌に
- トイレの除菌・消臭に
- 往診時のツール類の除菌に
- スリッパの除菌・消臭に
- タオルや布類の除菌・消臭に
- 床や壁の除菌に
- 吐瀉物処理時の除菌に
- 次亜塩素酸水対応噴霧器で空間除菌に

【使用上の注意】 ●他の製品との併用は避け、本品は単独でお使いください。●使用期限は未開封時冷暗所に保存の場合、製造より1年ですが、開封後は3ヶ月を目途に使い切ってください。●スプレー噴霧後は拭き取りを、浸漬後は水洗いをしてください。●金属への腐食や樹脂・ゴム・布等の変色を起こす可能性があります。●塩素に対しアレルギーのある方は使用をお控えください。

トクヤマ デントジア
 印象体除菌スプレー
 印象体、石膏模型の除菌に
 400mL/1本
 標準医院価格：1,800円

トクヤマ デントジア
 希釈用スプレーボトル
 清拭用の除菌液がボトルの目盛で簡単に調製できます
 1本 標準医院価格：500円

トクヤマ デントジア
 空間除菌
 次亜塩素酸水対応超音波噴霧器
 1セット
 標準医院価格：19,800円

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。価格は2018年11月現在のものです。消費税は含まれておりません。

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス
 ☎ 0120-54-1182 受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00(土日祭日は除く)
 札幌 TEL 011-812-5690 仙台 TEL 022-717-6444 東京 TEL 03-3835-7201
 名古屋 TEL 052-932-6851 大阪 TEL 06-6386-0700 福岡 TEL 092-412-3240
 ホームページ <http://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ ご用命は