

2018.12.21 ▶ 2019.1.21

特別価格にてご提供!



clene  
white

コーヒーやワインによる黄ばみや、タバコのヤニなどの頑固なステイン汚れをすっきりと白く!

消臭・除菌効果にも優れ、入れ歯の気になるお悩みを一気に解決!

大切な入れ歯のスペシャルケアにぴったりなアイテムです。

recommend!

コーヒーやワインが好きで人工歯が黄ばんでいる方

タバコのヤニで義歯が黒ずんでしまっている方

義歯のニオイが気になっている方

【使用例】

金属床や部分床義歯への使用には特にご注意ください。コバルトクロム合金・チタン合金に関してのご使用は可能ですが、パラジウム合金・ニッケルクロム合金・金・銀など貴金属を含む金属へのご使用はお控え下さい。



洗浄前



クリネホワイト洗浄後

使用方法

1. コップ一杯(約 200ml)の水(ぬるま湯)に、「クリネホワイト」を付属のスプーンで 1 杯(約 4g)入れ、溶かします。
2. 入れ歯を洗浄剤に入れ、約 20 分以内で洗浄をしてください。入れ歯を痛めることがありますので、時間を守ってください。
3. 洗浄後は、入れ歯を流水で十分にすすいでください。

# clene クリネシリーズ ~毎日の入れ歯洗浄に~

クリネシリーズは、お客様の声から生まれた、入れ歯の種類・汚れの種類に合わせて選べる高機能・高品質入れ歯洗浄剤です。粉末タイプで100%洗浄成分。余計な成分が入っていません。

clene  
全ての入れ歯

毎日使用

カンジタ菌除去に優れ、**99.9%** 除去。

入れ歯洗浄において重要となるカンジダ菌除去に大変優れ、99.9% 除去。コンフォートなどのやわらかい入れ歯にはもちろん、全ての入れ歯（チタン床除く）にご使用いただけます。5種類の酵素配合で、様々な“入れ歯の汚れ”に効果を発揮します。

【カンジダ菌洗浄実験】  
(中央微生物研究所調べ)

液性：弱アルカリ性 / 内容量：2.5g×30包 / 希望医院価格 1,200円 希望患者価格 1,600円

clene metal guard  
ナイーブな素材に

毎日使用

素材に**やさしく**洗浄。

酵素に加え、銀イオンや殺菌成分 IPMP 配合で、様々な“入れ歯の汚れ”に効果を発揮します。さめ細やかな泡が義歯のすみずみにゆき渡り、入り組んだ部分の落ちにくい汚れを包み込み、はがして落とします。

【金属への影響】

× 酸性・アルカリ性  
チタン合金 純チタン パラジウム合金

○ 中性 clene metal guard  
チタン合金 純チタン パラジウム合金

液性：中性 / 内容量：30錠 / 希望医院価格 1,200円 希望患者価格 1,600円

clene white  
ステイン汚れ

プラスケア

短い時間で、**白く輝く** 歯に。

お茶やコーヒーによる黄ばみ・タバコのヤニなどの頑固なステイン汚れを短時間（20分以内）で強力に落とし、白く輝きをもたらします。汚れを落とすと同時に、優れた除菌・消臭効果もあり、日々の入れ歯のお手入れにプラスして、ご使用をお勧めいたします。

【使用例】

液性：強酸性 / 内容量：200g(約50回分) / 希望医院価格 1,200円 希望患者価格 1,600円

clene melt  
カルシウム汚れ

プラスケア

カルシウムを**溶かして**落とす。

カルシウム系固着物（歯石や歯垢など）を強力に溶かして落とします。天然成分リンゴ酸・クエン酸などの有機酸を配合し、入れ歯にも環境にもやさしい洗浄剤です。日々の入れ歯のお手入れにプラスして、ご使用をお勧めいたします。

【使用例】

液性：酸性 / 内容量：3g×30包 / 希望医院価格 1,000円 希望患者価格 1,500円

【販売代理店】



## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【販売元】

株式会社バイテック・グローバル・ジャパン 〒104-0052 東京都中央区月島 2-14-12-3F <http://www.bitecglobal.jp>

ご用命は ...

※価格に消費税は含まれておりません。