

# フィジオクリーンプロ歯石用Ⅱ・キラリ錠剤ご愛顧感謝キャンペーン

期間 2019年1月21日～3月20日 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「フィジオクリーンプロ歯石用Ⅱ・キラリ錠剤ご愛顧感謝キャンペーン」を企画いたしました。期間中、下記対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

義歯洗浄剤

## フィジオクリーンプロ 歯石用Ⅱ

### 歯石溶解力が大幅UP!!

短時間での歯石除去が可能になりました!

**1.2L**

標準価格 3,900円

品目コード 新204530548 |旧453548

**4.0L**

標準価格 9,800円

品目コード 新204530549 |旧453549



4Lの大容量タイプをラインナップ

ご要望にお応えし、容量の多い4Lの大容量サイズをご用意しました。4Lタイプには注ぎやすいように専用の補助ホースを付属しています。

1.2L

約10回

4L

約33回

※1回 120ml使用時



補助ホース

## 特別価格にてご提供!!

患者さん用 義歯洗浄剤

## フィジオクリーン キラリ錠剤 6箱と

優れた洗浄・除菌力で色素汚れはもちろん、バイオフィルムのヌルヌル感を落としカンジダ菌などをスッキリ除菌します。

■標準価格 4,500円

## フィジオクリーン キラリ錠剤 1箱と

■標準価格 30錠入(3g×30) 750円  
希望患者価格 900円(税別)



## フィジオクリーン キラリ錠剤 患者向けリーフレット (30枚)

■標準価格 30枚入 550円



詰め合わせて



表面

中面

スタンドPOP付

## 特別価格にてご提供!!

キャンペーンコード 新204530582 |旧453582

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2019年1月21日現在のものです。標準価格には消費税は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

裏面に「フィジオクリーンプロ 歯石用Ⅱ」「フィジオクリーンキラリ錠剤」の詳細を掲載しています。ぜひ、ご覧ください。


# DENTURE CLEANER PHYSIO CLEAN PRO for DENTAL CALCULUS II



## 歯石溶解力 短時間の洗浄で歯石を溶解!

超音波洗浄機で5分から10分間洗浄することで、ガンコな歯石を短時間で除去します。メーカー従来品から洗浄時間を短縮しつつ、歯石溶解力は24倍と大幅にパワーアップしました。金属を使用した義歯にも問題なくご使用いただけます。

歯石溶解量 (g/120mL 超音波洗浄10分間) (メーカー実験データによる)

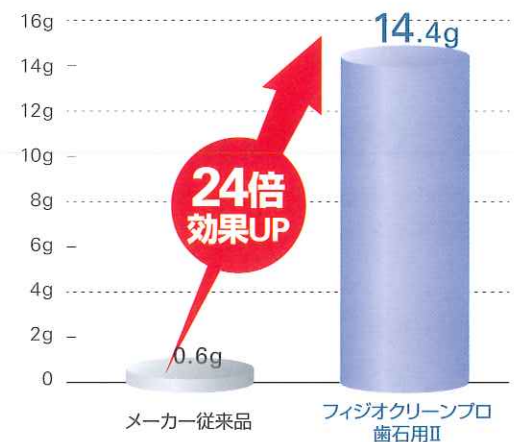

## 洗浄力 歯石用洗浄剤ながら高い洗浄力

歯石だけでなく着色汚れへの洗浄力も付与しており、義歯表面のヌルヌルするヌメリなどもスッキリ落とします。マウスピースなど義歯以外の洗浄にも効果的です。


## 金属 金属のくすみをキレイに除去

金属のくすみをキレイにすることができます。金属製のクラスプなどを使用した義歯は「フィジオクリーンプロ 歯石用II」で洗浄することでレジンや金属部分まで一度にキレイにすることができます。



オススメできる洗浄剤キラリ。

## ヌメリ・臭いをスッキリ洗浄!

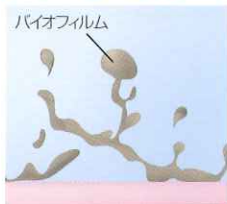

汚れが剥がれ落ちるイメージ

義歯のヌメリの原因はバイオフィームです。キラリ錠剤は二酸化チタンの触媒効果でバイオフィームに浸透して剥がし落とします。汚れの再付着を防ぎカンジダ菌や細菌を除菌・脱臭します。また無香料ですので、刺激臭が苦手な方にもお勧めできます。

## 義歯を傷めない中性タイプ。

洗浄・除菌効果の高いキラリですが、義歯を痛めないpH中性に配合しています。金属の黒ずみ化を抑え、チタンやパラジウム合金などの金属床義歯や部分義歯にも使用可能です。

## タバコのヤニやしつこい着色汚れをしっかりと洗浄!

長時間発泡により、配合している各種成分をすみずみまで行き渡らせ、汚れをしっかりと洗浄します。40度くらいのぬるま湯で一晩浸け置きすると、より洗浄効果があります。

※レジンや人工歯内部に入り込んだ汚れや強固な歯石には効果がありません。院内にて修理・洗浄の後にご利用ください。

### 義歯洗浄剤 フィジオクリーン 歯石くりん



#### 歯石溶解力 酸のチカラでゆるやかに歯石を除去!

歯石くりんはpH2.5の酸性でゆるやかに歯石を溶かし除去します。洗浄開始から約15分で0.45gの歯石を溶かし、金属を使った義歯でも30分の洗浄で十分な効果が期待できます。

■標準価格  
30錠入(3g×30) 1,000円(税別)  
希望患者価格 1,200円(税別)  
#204530572 #3453572

### 義歯洗浄容器 フィジオクリーン 入れ歯保温洗浄容器



- 上下2床のフルデンチャーがそのまま入るゆとりのある容器
- 持ち運びに便利な取手を装着
- 上フタを装着したままで水切りが可能

■標準価格 400円(税別)  
希望患者価格 500円(税別)  
#204530571 #3453571

## 製造販売 NISSIN

東日本営業所 東京都台東区台東 4-14-8 〒110-0016 T 03.3836 3691  
西日本営業所 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町 513 京都第一生命泉屋ビル 8F  
〒604-0847 T 075.257 7255  
<http://www.nissin-dental.jp>

## 発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)  
<歯科医療従事者様専用>  
[www.dental-plaza.com](http://www.dental-plaza.com)