

トクヤマ キュアグレース

Spring キャンペーン

2019 1.21月 → 3.20水

今回「トクヤマ キュアグレース」ユーザー様に「トクソー 即重レジックリーナー」をご使用いただきたく、**〈特別セット〉**を作りました。
是非この機会にご用命ください。



「トクヤマ キュアグレース」
液(250mL)
標準医院価格 ¥6,000

「トクソー 即重レジックリーナー」
(100mL)
標準医院価格 ¥2,800

**特別セットで
お届けします**

トクヤマ キュアグレース 歯科汎用アクリル系レジン (管理医療機器) 認証番号 226AABZX00048000
※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2018年12月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数量に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただくことがあります。

トクヤマ キュアグレース キャンペーン 注文書

キュアグレース 液 250mL + 即重レジックリーナー キャンペーンセット ご注文商品コード [21335] セット

貴歯科医院名 _____ お名前 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お届け歯科商店名 _____

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 **トクヤマデンタル**

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

[トクソー即重レジンクリーナー] のご紹介




トクソー 即重レジンクリーナー
100mL入 ¥2,800

筆やインスツルメントに固着した即時重合レジンスピーディに、かつ強力に溶解します。



また、金属補綴物ルージュ研磨後の洗浄や、補綴物内面に固着したユージノールセメントも、レジンクリーナーに浸漬することで、容易に除去できます。



ガラスまたはシリコン製ダッペングラスに適量取り出し、使用後の筆を液に浸します。

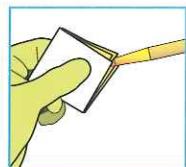

軟化、溶解したレジンティッシュで拭き取ります。硬化が進んだレジンの除去は、蓋付のガラス容器等に毛先のみ浸る程度液を入れ、軟化するまで筆を浸しておきます。

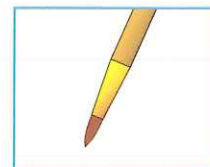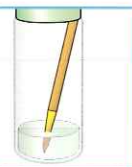

レジンの除去が完了したら、毛先を整え、乾燥後、保管します。

メタルインレーを、
スチームクリーナーで洗浄中、
噴射の勢いで飛ばされてしまって




溶解できるもの

- 即時重合レジン
- 研磨用ルージュ
- ワックス
- 硬化前のコンポジットレジン (ペースト状態)
- PMMA系レジンセメント
- ユージノールセメント
- レジン歯 (硬質レジン歯含む)

※注意 ・接着剤で毛先を固定している筆は、毛が抜ける場合がありますのでご注意ください。
・長時間液に浸漬すると筆を痛める場合がありますのでご注意ください。
・洗浄する補綴物はレジンを含まない物のみにしてください。

小さな金属補綴物のルージュ研磨後の洗浄にもオススメ!

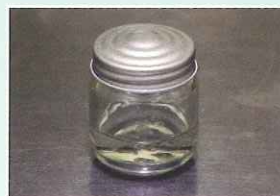

ガラス容器に補綴物を浸します。超音波洗浄すると、より効果的です。(蓋付ガラス容器推奨)




新しい液のですすぎ洗浄を推奨します。洗い液が汚れてきたら、すすぎ洗い用を洗浄用に使います。

ご使用の際は必ず製品添付の文書類をよくお読みください。

トクヤマデンタルのお奨めの筆たち! 毛が抜けにくく、筆が長持ちします。

液材塗布・レジン筆積み向き No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.11 No.12 No.21 シルバー 曲 シルバー 直 両頭筆 No.24 No.31

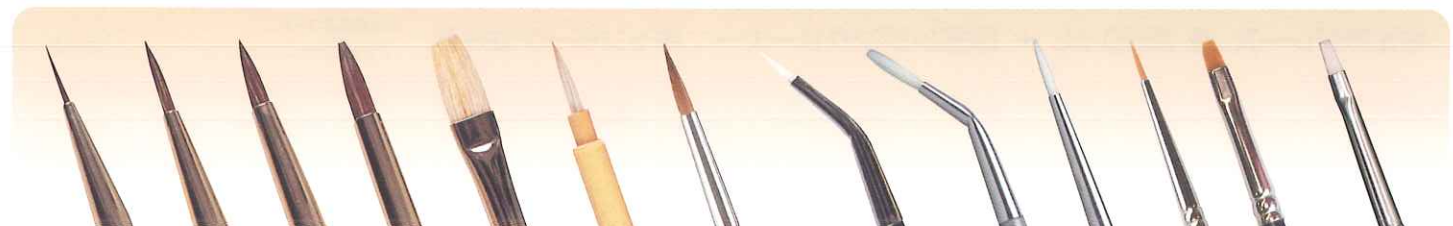

各4本入
各¥1,100

1本入
¥1,200

各4本入
¥2,200

5本入
¥5,000

柄1本
筆先10本
¥1,300

毛材: ジャコウ入ポニー

毛材: 山羊

毛材: 馬

毛材: イタチ

毛材: ナイロン

※価格は2018年12月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 トクヤマデンタル

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌 TEL011-812-5690 ●仙台 TEL022-717-6444 ●東京 TEL03-3835-7201 ●名古屋 TEL052-932-6851 ●大阪 TEL06-6386-0700 ●福岡 TEL092-412-3240