

コメット カーバイドバー

2019/1/21~2019/3/20

メタルクラウン撤去用バー H34

数量限定

お試しには！

**導入
キャンペーン**




標準医院価格
5本 5,000円(税抜)

⇒

**特別
価格**


さらにお得な！

**増量
キャンペーン**



標準医院価格
10本 10,000円(税抜)

+




=

1,000円(税抜)

**特別
価格**

★POINT★

破折を防ぐクラウン撤去の方法

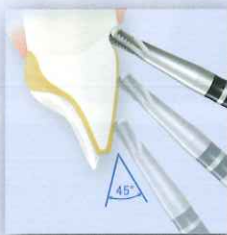

メタルクラウンの撤去はバーを歯頸部から切端に向けて使用して下さい。
その際、バーを約45度の角度でメタルに接触させ表面を一層ずつ剥ぐように何度かに分けて行って下さい。(左図参照)

5倍速コントラでのご使用を推奨いたします。
適正回転数:16万回転
(タービンでのご使用はトルク不足により十分な切削能が発揮されない可能性と、高回転によるヘッド破折の危険性が高まる恐れがあります)

品番	H34-010	H34-012
作業長(mm)	2.0	2.0
最大径(mm)	1.0	1.2
全長(mm)	20.0	20.0
カラーコード	黒&黒	黒&黒
適正回転数	160,000	160,000
最高回転数	450,000	450,000

お問い合わせは



製造販売元 株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL.06-6773-3333 附
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL.03-3835-2653 附
 九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL.092-575-6060 附
 URL : <http://www.momose-dm.co.jp/>



タフなネックで 破折を防ぐ

メタルクラウン撤去用カーバイドバー H34



医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科用カーバイドバー
販売名：コメットカーバイドバー
届出番号：27B2X00091000002

Quality Products
Made in Germany

製品動画は
こちら



H34-012



FG330

切れ味を高めるブレードデザイン

ラージブレード&ディープクロスカットで
メタルクラウンを素早く撤去

太いネックが破折を防止

FG#330 と比べると約2倍の太さで
破折しにくくなっています



H34-012



FG330

振動を抑えるチップスペース

目詰まりを防ぐ大きなチップスペースが
もたらす低振動



H34-012



FG330