

トクヤマAPトレーナーをご使用の歯科医院様へ

# 特別なキャンペーン



トクヤマAPトレーナーをご使用中の歯科医院様に、ぜひ高純度安定型次亜塩素酸水「トクヤマ デントジア 印象体除菌スプレー」をご使用していただきたく、キャンペーンを企画いたしました。

印象体の除菌で  
院内感染リスクを  
減らします!

## 2019年3月22日(金)～5月20日(月)

### アルジネート印象材用 清掃材


トクヤマAPトレーナー  
1本/2000mL  
標準医院価格 ¥6,700

収縮軟化  
させるタイプ

溶解させないので  
液汚れが少なく、  
臭気発生も少ない

トクヤマAP-1以外の  
アルジネート印象材  
にも使用可能

粉タイプのアルジネートの場合は、  
3倍に希釈して使用してください

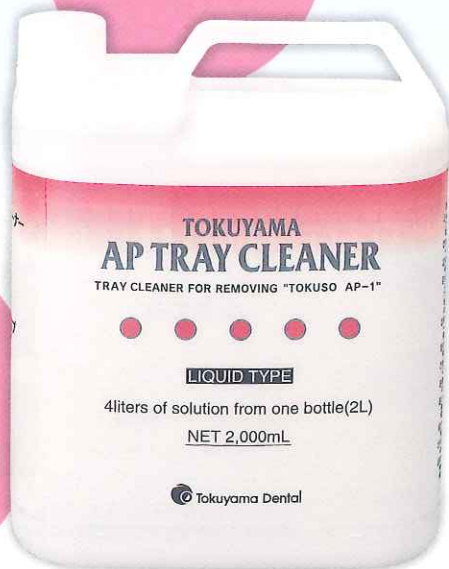

### 印象体除菌スプレー

トクヤマ デントジア 印象体除菌スプレー  
1本/400mL  
標準医院価格 ¥1,800

高純度安定型  
次亜塩素酸水

印象採得後の  
印象体除菌に

幅広い菌や  
ウイルスに有効

印象体への  
影響が少ない

石膏模型の  
除菌にも有効



詳しくはウラ面もご覧ください →

## セットにしてご提供!

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2019年3月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

### キャンペーン注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

( )

トクヤマAPトレーナー  
+トクヤマ デントジア 印象体  
除菌スプレーキャンペーン

[26083]

セット

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただいたご個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求  
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00～12:00/13:00～17:00(土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240


# トクヤマ デントジア 印象体除菌スプレーのご紹介

「トクヤマ デントジア」は 高純度安定型の弱酸性次亜塩素酸水です。印象体除菌スプレーは印象体や石膏模型の表面を素早く除菌できるよう、最適な濃度とpHに調整した除菌スプレーです。


## 1 幅広い菌やウイルスに有効

「弱酸性次亜塩素酸水」は 次亜塩素酸ナトリウムを薄めたアルカリ性水溶液の約80倍の除菌効果を持つと言われています。高い除菌力を持ちながら、皮膚に触れても問題のない扱いやすさが特徴です。

### 【次亜塩素酸の抗微生物スペクトル】

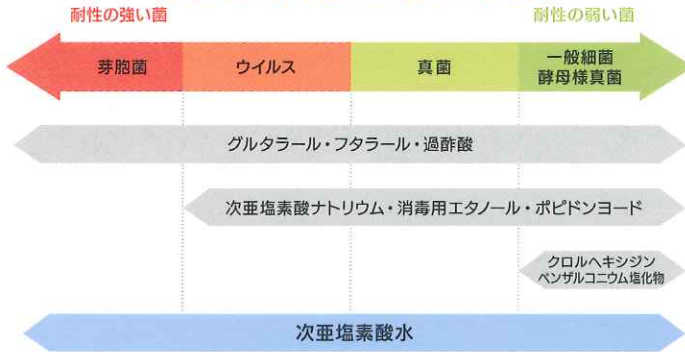

### 【次亜塩素酸の除菌のメカニズム】

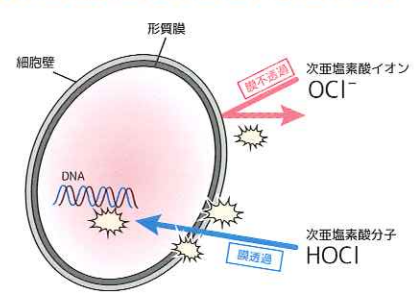

次亜塩素酸は小さい分子サイズに加え、微生物の細胞壁や形質膜を通り抜け内部に侵入することができるため、微生物の内部から弱体化・無力化することが可能です。

## 2 素早く簡単除菌

### ●印象体の除菌

### 【使用方法】



印象採得後、流水下で付着している血液や唾液等を洗い流してください。



印象体表面が十分濡れるほどトクヤマ デントジアをスプレー 噴霧してください。



10秒放置後※再び水洗します。

※一部耐性の強い菌(芽胞菌) に対しては25秒放置

### ●石膏模型の除菌

石膏模型表面にまんべんなくスプレー 噴霧してください。

※完全に硬化した後に噴霧してください。



### 【デントジアの除菌効果】



水洗のみ



水洗後デントジア噴霧

試験方法：アルジネート印象材の硬化体に唾液を塗布し、A 水洗のみ、B 水洗後トクヤマ デントジアにて処理。硬化体をBHI寒天培地に塗りつけ、3日間37℃で培養(当社つくば研究所測定)

## 3 印象体への影響が少ない

### 【印象採得後石膏表面の確認】

	100倍	1000倍
水洗のみ		
デントジア噴霧 → 水洗		

試験方法：細線再現性金型にて印象を採り、水洗のみの印象体およびデントジア処理の印象体に石膏を注入。石膏硬化体表面をSEMで観察。(当社つくば研究所測定)

### ●用途●

- 印象採得後の印象体の除菌に
- 歯科医院・ラボでの石膏模型の除菌に  
印象体：アルジネート印象材、シリコーン印象材、寒天印象材  
石膏模型：普通石膏、硬石膏、超硬石膏

### ●使用上の注意●

- ・用途以外に使用せず、また他の薬剤等との併用は避けてください。
- ・冷暗所に保存の上、開封後は早めに使いつつください。
- ・印象体除去後の印象トレーは通法に従って清掃ください。
- ・金属への腐食や樹脂・ゴム・布等の変色を起こす可能性があります。
- ・塩素に対しアレルギーのある方は使用をお控えください。

## トクヤマ デントジア

### 印象体除菌スプレー

【1本/400mL】

標準医院価格：¥1,800(税抜)



※価格は2019年3月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 トクヤマデンタル

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求  
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌 TEL011-812-5690 ●仙台 TEL022-717-6444 ●東京 TEL03-3835-7201 ●名古屋 TEL052-932-6851 ●大阪 TEL06-6386-0700 ●福岡 TEL092-412-3240