

# お勧め義歯クリーナー キャンペーン

弊社シリコン系リライニング材「ソフリライナーシリーズ」(タフ含む)でリライニングを施した患者さんに「トクヤマ リベースクリーナー」をご紹介していただきたくキャンペーンを企画致しました。是非この機会にご用命ください。

2019年

3/22金 ▶ 9/20金

\\セットにしてご提供!\\

“ソフリライナーシリーズ”の  
ペースト単品 (1本) 標準医院価格  
¥12,500

プラス

「トクヤマ リベースクリーナー」  
(1箱/32錠) ¥550相当

「トクヤマ リベースクリーナー」  
サンプル付きリーフレット (10枚)

ディスプレイ用  
リーフレットスタンド



\*ソフリライナーシリーズ\*: ソフリライナー 義歯床用長期弾性裏装材 (管理医療機器) 認証番号21000BZZ00297000 ソフリライナータフ 義歯床用長期弾性裏装材 (管理医療機器) 認証番号21400BZZ00004000  
ソフリライナータフ スーパーソフト 義歯床用長期弾性裏装材 (管理医療機器) 認証番号 222AABZX00184000  
※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2019年3月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

## ソフリライナー・ソフリライナータフ+トクヤマ リベースクリーナー キャンペーン注文書

貴歯科医院名  
.....  
お名前  
.....  
ご住所 〒  
.....  
TEL  
( )

ペースト	+	組み合わせ	ご注文数
ソフリライナー (スーパーソフト)		トクヤマ リベースクリーナー 1箱 (32錠)	[23210] セット
ソフリライナー (ミディアムソフト)		トクヤマ リベースクリーナー サンプル付きリーフレット 10枚	[23213] セット
ソフリライナータフ (ミディアム)		ディスプレイ リーフレットスタンド	[23217] セット
ソフリライナータフ スーパーソフト			[23253] セット

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 **トクヤマデンタル**

お問い合わせ・資料請求  
インフォメーションサービス

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

0120-54-1182

受付時間  
9:00~12:00/13:00~17:00(土・日祭日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索



# トクヤマリベースクリーナーのご紹介

入れ歯に付着した菌は  
12時間で約4,000倍に  
増殖します！



イラストはイメージです

※【情報提供】二川 浩樹 先生(広島大学大学院 教授)

だから

毎日の洗浄が重要！

## 使用方法

150mL程度の  
水に1錠入れてください。



1

ぬるま湯(40°C程度)  
がより効果的。

すぐに入れ歯全体を  
浸してください。



2

洗浄時間は5分程度。  
ひどい汚れは浸漬後に  
スポンジなどで軽く  
こするとより効果的。

洗浄後は水でよく  
すすいでください。



3

残った洗浄液は  
すぐに捨てる。  
毎日の洗浄が大切。

## 汚れを素早く除去

★汚れがひどい場合には、浸漬後にスポンジ等で軽くこすると効果的です。

### 着色



洗浄前：  
患者が着色の除去を希望



洗浄後：  
5分浸漬、こすり洗い後

### プラーク



洗浄前：  
染色液によるプラーク染め出し



浸漬状態：  
色素の浮きを確認



洗浄後：  
5分浸漬、こすり洗い後

【写真提供】神奈川県横浜市 田中歯科医院 田中五郎先生

## トクヤマリベースクリーナーの特徴



※全ての菌を除菌できるわけではありません。



一晩漬け置きも可能です。



トクヤマリベースシリーズ、ソフリライナーシリーズで裏装された入れ歯の洗浄にもお使いいただけます。



歯科用 入れ歯洗浄剤

## トクヤマリベースクリーナー

- 用途：入れ歯、矯正用リテーナー、マウスガードの洗浄
- 内容量：6箱包装(ディスプレイ箱)  
1箱32錠入り(2.8g×32)
- 標準医院価格：¥3,300(税抜) ※1箱単価 ¥550(税抜)
- 希望患者価格：¥700(税抜)/1箱

株式会社トクヤマデンタル

〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

☎ 0120-54-1182 [受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土日祭日は除く)]