

3M Science.
Applied to Life.™

フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン
光重合型低粘度ナノフィラー コンポジットレジン

バリューパック キャンペーン

キャンペーン期間：2019年5月7日(火)～6月28日(金)



セット内容.01

フィルテック™ シュープリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン バリューパック (同色3本セット)



くさび状欠損
充填前



程良い粘稠度で
豊隆部デザインが整いやすい



ナノフィラーにより
簡単な研磨で艶がでます

セット内容.02

スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブ ユニドースタイプ × 10本

- 準備も後片付けも楽
- いつも新鮮、最後の1本まで安定した接着力
- 遮光されているので30分間使用可能、多数歯の処置にも
- 使いきりなので衛生的



セット内容

- シリンジ 2g × 3本
- 注入チップ × 20個
- スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブ ユニドースタイプ × 10本


製品番号

6032A2TA (A2 ボディシェード) **6032A3TA** (A3 ボディシェード) **6032A3.5TA** (A3.5 ボディシェード)

———— キャンペーン希望医院価格(本体価格) ————

9,060円

サッと流れてピタッと留まるので、これ1本で多様な症例に対応!

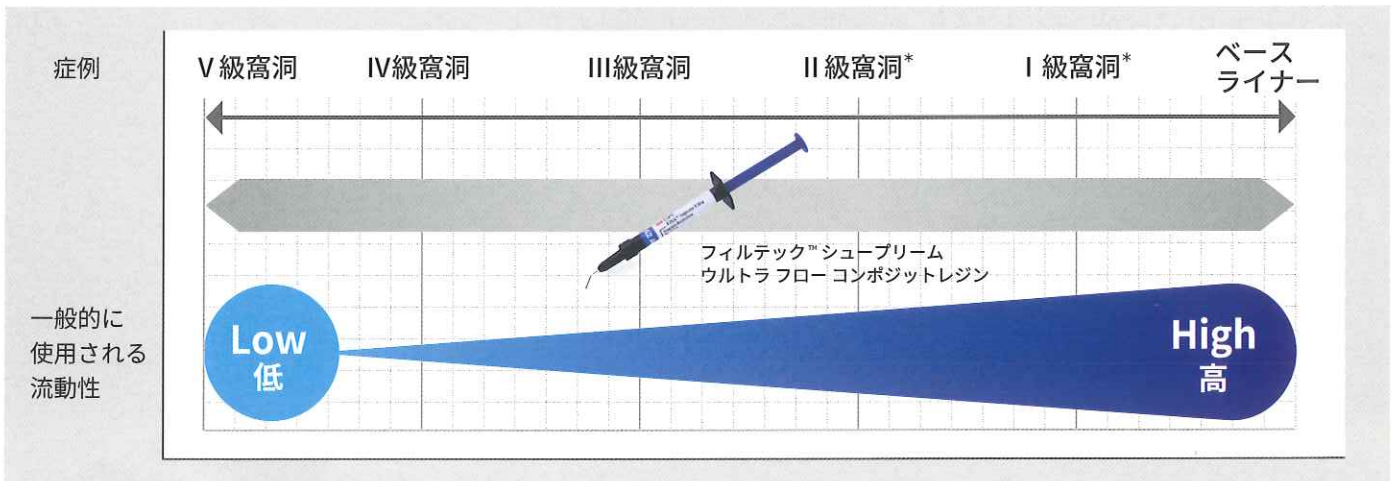

*咬頭を除く

主訴

**3の咬耗に起因する
顎関節症及び審美障害**

臨床写真提供: 高橋 英登 先生(井荻歯科医院)

1 術前

2 歯面処理

接着阻害因子除去のため、ラウンドバーで一層削除する。また、着色がある場合は着色層を除去する。その後、スコッチボンド™ユニバーサル アドヒーズブを用いてボンディング処理を行う。

3 フィルテック™シュープリーム ウルトラフロー コンポジットレジン充填(OA3)

残った着色層を遮蔽するためにまずOA3を充填する。

4 フィルテック™シュープリーム ウルトラフロー コンポジットレジン充填(A1)

A1を充填する

5 術後

形態修正・咬合調整を行い研磨を行う。周囲のシェードと問題なく調和しており、機能的、そして審美的に良好な結果をもたらすことが可能である。

関連製品

本製品をより効果的に使っていただくために、以下の製品との組み合わせもご検討ください。



スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ ボトルタイプ

この1本で10の症例に使える、新しい1ステップの接着材です。

補充品	ダブルパック
内容:5mL×1本 製品番号:41258 希望医院価格:12,600円	内容:5mL×2本 製品番号:41258W 希望医院価格:22,700円



スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーズブ ユニドースタイプ

ボンディング材・混和血・プライナーが一体となった1回使い切りのタイプです。

50本入り	100本入り
内容:50本(計5.5mL) 製品番号:41255 希望医院価格:6,800円	内容:100本(計11mL) 製品番号:41256 希望医院価格:12,600円

販売名:フィルテックシュープリームウルトラフローコンポジットレジン 認証番号:222AKBZX00110000 / 販売名:スコッチボンドユニバーサルアドヒーズブ 認証番号:224AKBZX00054000

スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー 歯科用製品事業部

Web 3M 歯科 Q
http://www.mmm.co.jp/hc/dental/

3M コールセンター ☎0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00月~金(土・日・祝を除く)
※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3157をご利用ください。

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2019年3月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3M、フィルテック、スコッチボンドは、3M社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2019. All Rights Reserved. DEN-1639-AJ (031980) PN/e.