



カンジダ
溶菌酵素
配合

歯科用

ロトピカ

入れ歯洗浄剤

特別キャンペーン

〈期間〉

2019年6月3日月～6月28日金

〈内容〉

ピカ 1カートン(6箱入)をご購入の方に、
患者さま説明用見本として

義歯用泡ハミガキ

ピカ泡クール1本

を提供いたします。

(当キャンペーンは数量限定販売です。期間中でも限定数量に達し次第、
終了させていただきますのでお早めにご用命ください。)

この機会に、
ぜひお買い求め
ください。



×1カートン
(6箱入)



患者さま説明用見本

1本!

標準医院価格 **¥3,600**

(標準患者価格 ¥4,200)

注文数

カートン

貴医院名

ご住所 〒

TEL.

()

ご使用の際は説明書等をよく読んでお使いください。

価格は2019年6月現在の標準医院価格(消費税抜き)ならびに
標準患者価格(消費税抜き)です。

取扱い店

歯科用 義歯用泡ハミガキ

ピカ泡クール

食後の泡ハミガキ！ 就寝時の錠剤洗浄！

デンチャープラークは錠剤洗浄だけでは除去することができません。

義歯用のハミガキ剤でやさしくしっかりと磨くことが大切です。

就寝時には錠剤の「ピカ」、食後には泡ハミガキの「ピカ泡クール」による入れ歯のお手入れをおすすめください。


除菌率
99.9%
※ロート製薬調べ (in vitro)

カンジダ菌の
溶菌作用



ピカ泡クールの勧め方 >>>

- 1 患者さまの入れ歯を口からはずしてください。
- 2 適量を入れ歯に押し出します。
- 3 片面60秒を目安に全体をブラシで磨きます。
- 4 流水でしっかりとすすいでください。

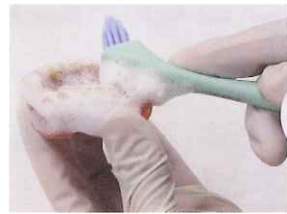

ハミガキ後、患者さまに入れ歯を再装着していただくと、その効果を実感いただけます！




患者さまの意識は高まっています！

高齢化に伴い、入れ歯の使用者はどんどん増加しています。その9割以上の方が入れ歯のお手入れが「大切なこと」と認識しており、ユーザーの意識が高まっていることがわかります。

入れ歯のお手入れはどの程度大切なことですか？

とても大切なこと
大切なこと

あまり大切ではない	3.7%
大切ではない	0.5%
気にしたことがない	1.6%

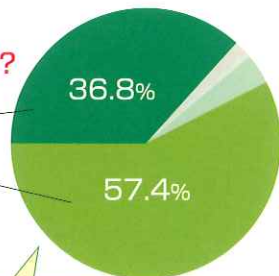


- ★9割以上が「大切なこと」と思っている
- ★「とても大切なこと」に多数の女性ユーザー

入れ歯のお手入れはどのくらいの頻度ですか？

1日2回以上
1日1回

2~3日に1回	4.5%
1週間に1回	1.9%
ほとんどしない	2.4%
まったくしない	2.6%

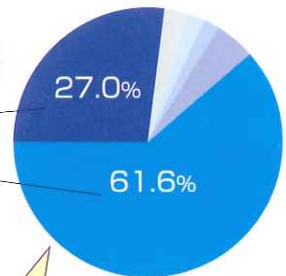

- ★3割弱の人が1日2回以上のお手入れ
- ★1日1回のお手入れは6割以上

包装・価格

義歯用泡ハミガキ
ピカ泡クール

1本 ¥840
(標準患者価格 ¥980)



Tools

各種ツールを無料でご用意しています。ご入用の際は、お取引先の歯科商社にご連絡ください。



患者様向けリーフレット

POPシール

製造販売元

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1丁目8番1号

販売元

世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社: 東京(03)3832-4366 ●営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

1904DBJSa