

# KURARAY NORITAKE DENTAL CAMPAIGN NEWS

6月号  
診療編

クラレ ノリタケ デンタル キャンペーンニュース

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。  
このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、  
『クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース6月号診療編』と  
いたしまして、キャンペーンを企画いたしました。  
ぜひ、この機会をご利用ください。

この資料は、歯科医師・歯科衛生士様への案内です

NEW!

クリアフィル® マジエスティ® IC



●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2019年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社  
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販 売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525  
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161  
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)  
www.dental-plaza.com

歯科充填用コンポジットレジン

# クリアフィル® マジェスティ® IC

## 新発売

## クリアフィル® マジェスティ® IC 新発売キャンペーン

【実施期間】 2019.5.21>>> 6.20

期間中、クリアフィル® マジェスティ® IC を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

### クリアフィル® マジェスティ® IC 単品を

内容 レジン充填材(各2.6g、1.5mL)  
色調 A1、A2、A3、A3.5、A4、W(乳歯色)、A2E、A2D(OP)  
付属品 ディスベンシングチップ(20個)、  
          ディスベンシングチップキャップ(3個)

標準価格 各4,300円  
202430781~202430875  
202430880  
202430882~202430883



## 特別価格にてご提供!

フロアブル  
でないのに  
ダイレクト充填!?

ダイレクトなのに  
形態を  
付与できる!?

## 臼歯単純窩洞にお使いください!

臼歯単純窩洞に使っていただくことで、より製品の特性を実感いただけます!



防湿・う蝕の除去・窩洞形成及び歯髄保護  
「クリアフィル®ユニバーサルボンド  
Quick ER」による接着処理



「クリアフィル®マジェスティ®IC」  
(A2とA2Eを積層)を充填※1



充填器による形態付与後、光照射※2



形態修正・研磨

写真提供：岸川隆蔵先生

※1 ディスベンシングチップ、ディスベンシングチップキャップは再使用禁止です。直接口腔内で使用する場合は、交差感染を防ぐため、必ず保護カバーでシリンジ全体を覆い、唾液・血液等が接触しないように注意してください。また、シリンジは使用前後に、ディスベンシングチップは使用前にアルコール綿球で拭き消毒してください。

※2 照射時間及び条件に関しては本ページ「硬化深度について」及び製品の添付文書をご参照下さい。

### この他の症例の使用ステップは カタログでご紹介!

さらに!

特設サイトでは動画なども使って  
特長を詳しくご紹介いたします。

※クラレノリタケデンタル株式会社の  
ホームページにアクセスします。



●販売名 クリアフィル®マジェスティ®IC ●一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン  
●医療機器認証番号 230ABBZX00001000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)  
●販売名 クリアフィル®ユニバーサルボンドQuick ER ●一般的名称 歯科用象牙質接着材  
●医療機器認証番号 228ABBZX00065000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

# フロアプロレジンでもペーストレジンでもない CR 「直接充填」と「形態付与」を実現するコンポジットレジン



## パッと充填、サッと形態付与


臼歯 I 級窩洞などのコンポジットレジン充填に

新容器の採用と新規設計のペーストにより、  
「フロアブルレジンのような窩洞への直接充填」と  
「インスツルメントによる形態付与」を両立。

臼歯部咬合面への充填操作が  
スムーズに行えます。





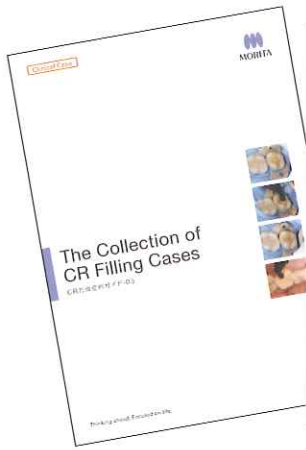

CR充填症例ガイド-03 208530314



Case 1  
クリアフィルマジェスティ ICについて  
江川 光治 先生



Case 2  
クリアフィルマジェスティ ICを  
使用した臼歯Ⅰ級窩洞の修復  
徳永 耕一郎 先生

クリアフィル®  
マジェスティ® IC  
関連のセミナー

詳細・お申込みはWebから！

モリタ セミナー |  検索

もしくは  
QRコードで



コンポジットレジン修復の発想転換

開催日 札幌 / 2019年6月9日(日)  
沖縄 / 2019年10月6日(日)

講師 田代 浩史 先生



患者さんのための接着修復治療という選択肢  
～ジルコニア・CAD/CAM冠を臨床で用いるにあたって～

開催日 東京 / 2019年6月16日(日)

講師 脇 宗弘 先生



接着修復治療の可能性  
～ダイレクトレストレーション、  
インダイレクトレストレーションについて～

開催日 大阪 / 2019年11月10日(日)

講師 江川 光治 先生

新しくなった

早く入会するほど  
お得!

注目の新商品を  
いち早くお試し  
ください!

2019年度 モリタ友の会

一般会員入会受付中!

第1弾

募集期間 2019年11月30日まで

年会費 8,000円(税別) [会費 1,000円 / 商品代 7,000円 / 消費税]

ご提供!

歯科充填用コンポジットレジン  
クリアフィル® マジェスティ IC A2 1本  
クラレノリタケデンタル株式会社



さらに!今年は他にも、モリタ推奨の新製品や  
優良品をお届け予定!ご期待ください。

