



# (株)松風 福岡営業所 企画

ヨシダ製薬

## グルタラール製剤 **劇薬** グルトハイド® プラス3.5%液

# 新規獲得キャンペーン

### 2019年 6月3日(月)~7月31日(水)

広範囲の細菌・真菌・抗酸菌(結核菌)  
芽胞・ウイルスに対する幅広い  
抗微生物スペクトル♪♪

金属に対する影響がほとんどない!!

1回/28日の調剤でOK♪♪

製品特長について  
詳しくはカタログへ



劇薬 グルタラール製剤  
**グルトハイド® プラス3.5%液**  
化学的滅菌・殺菌消毒剤(医療用器具・機器・装置専用)  
(指定卸売歯科用医薬品)

|            |                  |
|------------|------------------|
| 日本標準商品分類番号 | 877321           |
| 承認番号       | 21200AMZ00063000 |
| 薬価取載       | 薬価基準対象外          |
| 販売開始       | 2001年5月          |

標準医院価格  
4,500g 1本

## ¥4,800 /

### 専用消毒トレイ(5L用) グルトチェッカー(50枚入)

## ▶ ご提供

注文数

セット

貴医院名

ご住所 〒

TEL.

( )

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2019年6月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号等の個人情報は、今後弊社で開催するセミナー及び研修会のご案内、並びに製品情報のご提供のためにに利用し、管理いたします。

# SHOFU INC.



医療機器



内視鏡



飲用不可



吸入厳禁

### 医療器具の消毒手順

グルトハイド® プラス 3.5%液を安全に使用いただくために

#### セーフティー消毒トレー器具用を用いた一般的消毒手順



安全に使用する  
ための準備



体液などの付着した  
医療器具

#### 1 予備洗い



体液等の付着した医療器具は、酵素洗浄剤で汚れを落とし、その後水道水等で十分にすすぎます。

#### 2 浸漬



密閉性のあるふた付容器を用い、医療器具をグルタラル実用液の中に浸漬します。浸漬中はふたをすること。

#### 3 放置(消毒)



体液等の付着した医療器具は60分以上、体液の付着していない医療器具は30分以上放置します。この時、必ずふたは閉めた状態にしておいてください。

#### 4 水洗い



洗浄では蒸気が発生しないよう、すすぎには熱湯を使用しないでください。

**注意** 医療器具の化学的滅菌または殺菌消毒剤です。絶対に人体に使用しないでください。

### 実用液の調製法

グルトハイド® プラス 3.5%液の調製法

#### グルトハイド® プラス 3.5%液を使い実用液を作る場合

調製例

| グルトハイド® プラス 3.5%液 | 緩衝化剤             |
|-------------------|------------------|
| 4500g(約4300mL)    | 202.5g(約155.8mL) |


グルトハイド® プラス 3.5%液 4500g(約4300mL)



添付の緩衝化剤(緑色液体) 202.5g(約155.8mL)



グルトハイド® プラス 3.5%液 4500g(約4300mL)

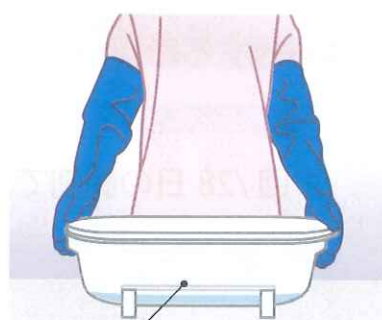

グルトハイド® プラス 3.5%液実用液

[グルトハイド® プラス 3.5%液 4500g(約4300mL) + 緩衝化剤 202.5g(約155.8mL)]

**注意** 危険ですので浸漬槽には必ずふたをしてご使用ください。



### セーフティー消毒トレー 非売品

作業環境衛生と機能性に配慮した安全性の高い消毒トレー  
Y's Productのセーフティー消毒トレーをご使用になればより効果的な器具消毒を行うことが可能です。

#### 器具用 5L用

作業環境と安全性に配慮し、  
効率よく消毒が行える中カコ  
付きの器具用消毒トレー



W513×D238×H162 (mm)



グルタラル実用液は使用しているうちに濃度低下がおきる場合があります。定期的に濃度確認をおこなってください。

### グルタラル製剤濃度判定試験紙 グルトチェッカー

グルトチェッカーはグルトハイド® 製剤の  
実用液専用濃度判定用試験紙です。

#### 〈使用方法〉

1. 検査に必要な試験紙を容器から取り出し、容器は直ちに密栓する。
2. グルトハイド® 製剤の実用液に、プラスチックフィルム端部に貼付してある試験紙部分を完全に浸し、約2秒後に取り出す。
3. 試験紙の裏面をペーパータオルなどに軽く押し当て過剰の液を取り除く(試験紙表面は決してタオル等につけたり触れたりしないこと)。
4. 試験紙表面を上にして水平な場所に静置する。3分経過後直ちに試験紙の色を、ボトルの比色表と比較し濃度を判定する。



(50枚入)

非売品



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

福岡営業所

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目3-15  
TEL(092)472-7595 FAX(092)472-7596