

トクヤマ ヒカリライナー

新規導入キャンペーン

2021
9.21 [火]
2022
2.18 [金]

義歯床用硬質裏装材(光硬化・粉液型)
トクヤマ ヒカリライナー



標準医院価格
¥15,000/セット
(管理医療機器) 認証番号302AFBZX00091000

トクヤマ ヒカリライナー プラケース
標準医院価格 ¥2,000/個

歯科技工用重合装置(光重合装置)
トクヤマ ポータライト



標準医院価格
¥64,800/セット
(一般医療機器) 届出番号14B2X00002000040

トクヤマ ポータライト キャリーバッグ
標準医院価格 ¥8,000/個

| |
|---------------------|
| Aセット 色調選択 |
| [71906] ライトピンク |
| セット |
| [71907] ピンク |
| セット |
| [71908] ライブピンク |
| セット |

A セット 上記4点の組合せ **限定セット** を特別価格にてご提供

義歯床用硬質裏装材(光硬化・粉液型)
トクヤマ ヒカリライナー



標準医院価格
¥15,000/セット
(管理医療機器) 認証番号302AFBZX00091000

トクヤマ ヒカリライナー プラケース
標準医院価格 ¥2,000/個

| |
|---------------------|
| Bセット 色調選択 |
| [20303] ライトピンク |
| セット |
| [20304] ピンク |
| セット |
| [20305] ライブピンク |
| セット |

B セット 上記2点の組合せ **限定セット** を特別価格にてご提供

↑ 持っていない **Aセット**

↓ 持っている **Bセット**

技工用光重合装置 (BOX型)はお持ちでしょうか?

【参考】トクヤマ ヒカリライナー
光重合波長域 400~500nm
※トクヤマ ヒカリライナーの特長については裏面へ

トクヤマ ヒカリライナーは3色の中からお選びください

色調



ライトピンク ピンク ライブピンク(繊維入り)

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2021年9月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので、期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

トクヤマ ヒカリライナー 新規導入キャンペーン 注文書

貴歯科医院名 _____

お名前 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お届け歯科商店名 _____

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル
本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求
インフォメーションサービス
0120-54-1182

受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!
トクヤマデンタル

トクヤマ ヒカリライナーは何に使う材料ですか？

光硬化型の硬質裏装材です

弊社トクヤマリベースⅡやリベースⅢと同様、トクヤマ ヒカリライナーは有床義歯内面適合法に用いる硬質材料に分類されます。

光硬化型のため、様々なアンダーカットの症例に（残存歯・補綴物・骨隆起等）有効です。

有床義歯内面適合法(硬質材料)の保険算定表



| 令和3年9月現在 | 点数 | |
|----------|------|------|
| | 通常 | 訪問 |
| 1歯～ 4歯 | 276 | 427 |
| 5歯～ 8歯 | 328 | 516 |
| 9歯～ 11歯 | 490 | 749 |
| 12歯～ 14歯 | 692 | 1092 |
| 総義歯 | 1020 | 1573 |

※令和2年度診療報酬改定より。
(装着料・材料料を含む、人工歯料は別算定)

トクヤマ ヒカリライナーのおすすめポイントは？

口腔内ではゴム状、口腔外で光硬化するため、アンダーカットがある症例でも取り外しが簡単です。トクヤマ ポータライトで光硬化を行う場合、空気遮断の方法を選択(お湯 or エアーバリア材)できます。

弊社化学硬化型裏装材と比較して表面硬度が高い為、良好な研磨性を有しています。口腔内での硬化発熱による刺激がありません。先生と患者さんのストレスを低減します。

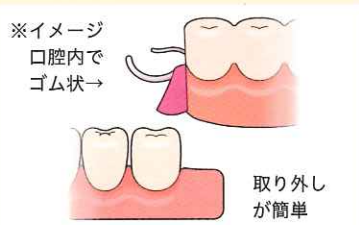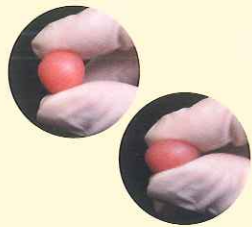


アンダーカットのある症例でも取り外しが簡単



口腔外で光硬化。光照射は5分。※厚み4mmまでの場合
トクヤマ ポータライトは小型(直径14cm、高さ15cm、重さ880g)で持ち運び便利(省スペース)。

硬化後の経過時間と表面硬さの関係

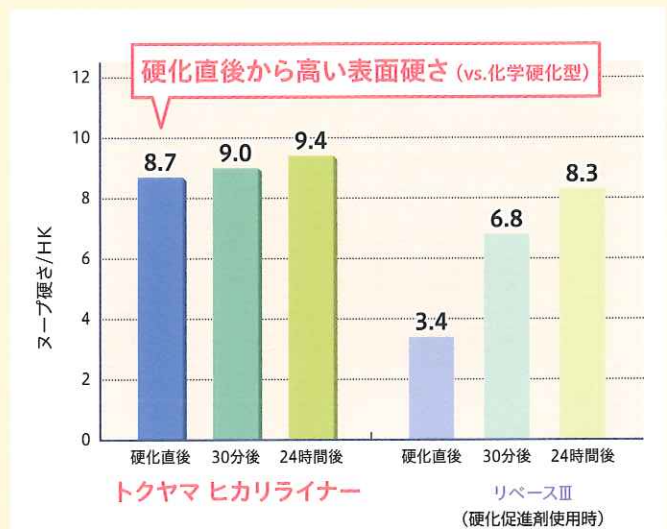

特設サイトのご案内

臨床家の声

動画

トクヤマ ヒカリライナー
トクヤマ ポータライト

① パーシャルデンチャー



パーシャルデンチャー症例紹介1

村岡秀明先生



トクヤマ ヒカリライナーの詳しい紹介、臨床動画はこちら。

<https://www.tokuyama-dental.co.jp/hikareliner/>

資料等



パーシャルデンチャーの裏装時に、時間を気にせず調整できる光硬化型の裏装材！
デンタルダイヤモンド 2021年6月1日発行 掲載 田中五郎先生