

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント **プラス**

ご愛顧キャンペーン!

第1弾

# 薬用発泡入浴剤 プレゼント

限定 3,000 個 2021 年 10 月 21 日 (木) ~ 2021 年 12 月 17 日 (金)

スマイルデントプラス  
120錠 4個 お買い上げで



スマイルデントプラス  
48錠 6個 お買い上げで



## 薬用発泡入浴剤プレゼント!

アソート20錠入 (4種類・各5錠)



- アソート種類
- さくら (桃白色)
- ゆず (乳黄色)
- ラベンダー (淡藤色)
- 森林 (浅若草色)

※商品はイメージです。

※キャンペーンは数量限定販売につき、期間中でも限定数量 (景品: 3,000 個) に達し次第、終了とさせていただきます。

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

カンジダ菌  
除菌率\*  
99.99%



スマイルデントプラス

※40℃・5分で99.99%除菌します。  
※全ての菌に効果があるわけではありません。

2021年2月 スマイルデントはスマイルデントプラスにリニューアルしました。

リニューアル

1 トリプル除菌剤配合

Ag<sup>+</sup>

アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出されます。

CPC

塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。

IPMP

イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で歯磨剤などにも使用されています。

リニューアル

2 さらに金属の変色を防ぐ処方

防サビ剤(金属の変色を防ぐ成分)を新配合

● 部分入れ歯の割合も増えており、金属床入れ歯は保険適用となっています。

● 金属への影響(変色等)を防ぐために、配合成分を調整し、洗浄力を維持しました。

※ごく一部の金属でまれに変色することがあります。

リニューアル

3 約150~200mLに対し錠剤1錠

● 部分入れ歯の割合も増え、300mLも必要としない状況があります。

● 市販の入れ歯洗浄ケースの容量も、200mLのものが多いです。

特長

- 1 強力除菌※ 入れ歯に付着している菌をしっかり除菌します。
- 2 ニオイ除去 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを消します。
- 3 酵素配合 酵素がしつこい汚れも取り除きます。
- 4 発泡洗浄 発泡洗浄し、漂白できます。
- 5 防サビ剤入 入れ歯の金属部分の変色・変質を防ぎます。
- 6 ミントの香り さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

※全ての菌に効果があるわけではありません。

部分入れ歯 兼用 総入れ歯  
ノンクラスプ入れ歯

部分入れ歯



総入れ歯



ノンクラスプ入れ歯



成分 発泡剤(炭酸塩、クエン酸)、漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、漂白活性化剤(TAED)、ポリリン酸塩、酵素、防錆剤、結合剤、流動改善剤、色素、香料


液性 中性

本紙に掲載されている価格は2021年10月のものです。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

使用方法

1 約150~200mLの水またはお湯(40~50℃)に錠剤を1錠入れます。

※60℃以上のお湯で使用しないでください。  
入れ歯が変色、変形することがあります。  
※水温が低いと発泡力が弱くなりますので、40~50℃のお湯を使うことをおすすめします。

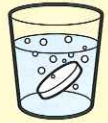

2 すぐに入れ歯を浸してください。

※通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。  
※特に汚れがひどい場合は一晩浸しておく効果的です。



3 洗浄後は水でよくすすいでください。

※ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせず、歯科医にご相談されることをおすすめします。



■48錠 歯科医院様参考税抜価格 ¥680 患者様参考税抜価格 ¥850  
■120錠 歯科医院様参考税抜価格 ¥1,150 患者様参考税抜価格 ¥1,440

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL.0120-33-8020 FAX.0120-66-8020



株式会社 MORIMURA

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は