

ORTHOLY ALIGNER CONNECT

歯科矯正用レジン材料
オルソリー アライナーコネクト



アタッチメント作製のためのレジン誕生

アライナーコネクトは、マウスピース型矯正装置で使用するアタッチメント作製のためのレジンです。

新発売

管理医療機器 歯科矯正用レジン材料
303AK8ZX00054000



通常販売価格 4,800 (税抜) 円

→ 特別価格

2021/12/20(月)まで

審美性

- ・広い天然歯の色調をカバーするユニバーサル色
- ・低吸収で着色しにくい



A1

A2

A3

A3.5

操作性

- ・充填しやすい切れの良さ
- ・形態を維持しつつ流れるチキソトロピー性を付与

ALIGNER CONNECT



糸引きしにくい


自社従来品



糸引きが強い

耐摩耗性

- ・トレーの取り外しに負けない耐摩耗性
- ・毎日の歯ブラシでもアタッチメントの形状維持

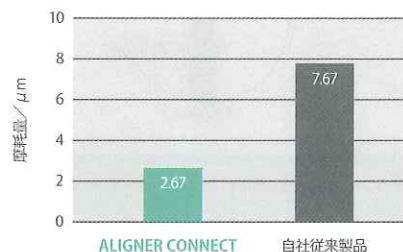

臨床ステップ (アタッチメント作製ステップ)



01 研磨ペーストをブラシ又はカップにとり、歯面を清掃し、接着部位のプラークを取り除きます。



02 接着部位にユニバーサルボンドフロー SE プライマーを塗布し、10秒間放置します。



03 放置後、強圧エアードで約5秒間乾燥します。



04 接着面に、光照射を行います。

G-ライトフリアII Plus 10秒または6秒(3秒×2回)



05 シリンジからトレーのくぼみにレジンを充填します。



06 トレーを歯列に装着します。



07 レジン充填された箇所に対して光照射し、硬化させます。



08 トレーを歯列から外し、必要に応じて形態修正を行います。

UNIVERSAL BOND FLOW SEプライマー

ユニバーサルボンドフロー
SEプライマー


「高い接着力」と「簡便性」を実現する **3つの特長**



通常販売価格
15,000円^(税別)

→ **特別価格**

- 特長 ①** MDP (リン酸エステル系モノマー) 配合により
エナメル質 (ハイドロキシアパタイト) 及びレジンと結合
- 特長 ②** 液垂れしにくいオリジナルボトルデザイン
- 特長 ③** 水洗不要! 強圧ブローのみで前処理が完了

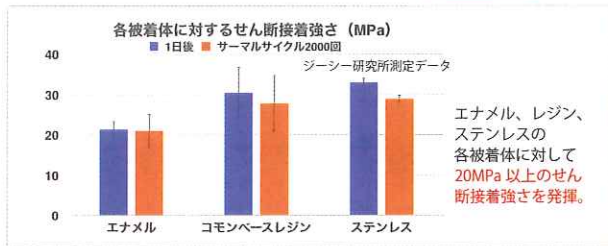

IPR BUR

IPR バー

アソート NEW

型番: T-Assort
仕様: φ0.18mm/6mm (fff) 2本入
φ0.28mm/6mm (fff) 2本入
φ0.38mm/6mm (fff) 2本入 } (1函)

価格: 6,500円 (税別)

→ **特別価格**

※推奨回転数 30万回転以下でご使用ください。

7月1日 発売

φ0.18mm / 6mm

型番: T018-06
仕様: φ0.18mm/6mm (fff) 6本入 (1函)
中心径 0.3mm
価格: 6,500円 (税別)

→ **特別価格**

※推奨回転数 30万回転以下でご使用ください。

φ0.28mm / 6mm NEW

型番: T028-06
仕様: φ0.28mm/6mm (fff) 6本入 (1函)
中心径 0.4mm
価格: 6,500円 (税別)

→ **特別価格**

※推奨回転数 30万回転以下でご使用ください。

7月1日 発売

φ0.38mm / 6mm NEW

型番: T038-06
仕様: φ0.38mm/6mm (fff) 6本入 (1函)
中心径 0.5mm
価格: 6,500円 (税別)

→ **特別価格**

※推奨回転数 30万回転以下でご使用ください。

7月1日 発売

φ0.5mm/6mm・7mm

型番: P050-06 (φ径長6mm) / P050-07 (φ径長7mm)
仕様: φ0.5mm/6mm (fff) 6本入 (1函)
φ0.5mm/7mm (fff) 6本入 (1函)
価格: 各5,000円 (税別)

→ **特別価格**

※推奨回転数 10万回転以下でご使用ください。

<使用例>

一級匠専科 歯科用ダイヤモンドバー
1183X0025G000001

製品情報 Web Site

新規採用キャンペーンご注文用紙

セール期間: 2021年12月20日(月)まで

◆歯科矯正用レジン材料 ALIGNER CONNECT	2ml 1本 色調=ユニバーサル	通常販売価格 4,800 <small>円</small> ^(税別)	→ 特別価格	函
◆ブラケット用ボンディング材 Universal Bond Flow	SE プライマー 1本	通常販売価格 15,000 <small>円</small> ^(税別)	→ 特別価格	函
◆歯科用ダイヤモンドバー IPR バー (直径 0.18 mm / 0.28 mm / 0.38 mm / アソート)	T018-06 1函 6本入 T028-06 1函 6本入 T038-06 1函 6本入 T-Assort 1函 6本入	通常販売価格 6,500 <small>円</small> ^(税別)	→ 特別価格	φ0.18 mm × 6 mm 函 φ0.28 mm × 6 mm 函 φ0.38 mm × 6 mm 函 アソート 函
◆歯科用ダイヤモンドバー IPR バー (直径 0.5 mm)	P050-06 1函 6本入 P050-07 1函 6本入	通常販売価格 5,000 <small>円</small> ^(税別)	→ 特別価格	φ0.5 mm × 6 mm 函 φ0.5 mm × 7 mm 函

貴医院名	フリガナ		
〒	都府	TEL	()
ご住所 お電話番号	道県		

ジーシーグループ
JAPAN DENTAL SUPPLY
株式会社日本歯科商社

東京本社 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL: 03-3625-3111 (代) FAX: 03-3625-1110
 大阪支店 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL: 06-6643-0085 (代) FAX: 06-6632-1910
 北海道営業所 〒001-0016 札幌市北区北 16 条西 5-3-18 TEL: 011-716-7001 (代) FAX: 011-716-7002
 九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL: 092-436-2288 (代) FAX: 092-436-2289

【発売元】株式会社 ジーシー オールソリ

●ご用命は

担当者: