

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデント **プラス**

ご愛顧キャンペーン!

第4弾

# ビタミンC1200プレゼント

限定 3,000 個 2023 年 7 月 21 日 (金) ~ 2023 年 9 月 20 日 (水)

スマイルデントプラス  
120錠 4個 お買い上げで



スマイルデントプラス  
48錠 6個 お買い上げで



+

+



## ビタミンC1200

2g×24袋入 1箱

## プレゼント!

普段の生活の中で消費されやすいビタミンCは、体内でつくることができないため、積極的に補う必要があります。コラーゲンの生成にも深く関わっており、健康だけではなく美容にも良い成分として親しまれています。本品は、1袋(2g)にレモン果実 約60個分\*のビタミンC、さらにビタミンB2を配合し、水なしでそのまま食べられる手軽な顆粒スティックです。健康補助食品として、1日1袋を目安に、そのままお召上がりください。1袋(2g)中：ビタミンC 1200mg / ビタミンB2 0.6mg レモン味

\*レモン果実1個 120g

※商品はイメージです。

※キャンペーンは数量限定販売につき、期間中でも限定数量(景品: 3,000 個)に達し次第、終了とさせていただきます。

歯科医院専用 入れ歯洗浄剤

スマイルデントプラス



カンジダ菌  
除菌率※  
99.99%

※40℃・5分で99.99%除菌します。  
※全ての菌に効果があるわけではありません。

トリプル除菌剤  
配合

Ag<sup>+</sup>

アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)から銀イオンが放出されます。

CPC

塩化セチルピリジニウム(CPC)は、歯磨剤、のど飴などにも使用されています。

IPMP

イソプロピルメチルフェノール(IPMP)は、環境にやさしい成分で歯磨剤などにも使用されています。

さらに金属の  
変色を防ぐ処方

防サビ剤(金属の変色を防ぐ成分)を新配合

- 部分入れ歯の割合も増えており、金属床入れ歯は保険適用となっています。
- 金属への影響(変色等)を防ぐために、配合成分を調整し、洗浄力を維持しました。

※ごく一部の金属でまれに変色することがあります。

約150~200mLに  
対し錠剤 1錠

- 部分入れ歯の割合も増え、300mLも必要としない状況があります。
- 市販の入れ歯洗浄ケースの容量も、200mLのものが多いです。

特長


- 1 強力除菌** ※ 入れ歯に付着している菌をしっかり除菌します。
- 2 ニオイ除去** 漂白洗浄成分が入れ歯のニオイを消します。
- 3 酵素配合** 酵素がしつこい汚れも取り除きます。
- 4 発泡洗浄** 発泡洗浄し、漂白できます。
- 5 防サビ剤入** 入れ歯の金属部分の変色・変質を防ぎます。
- 6 ミントの香り** さわやかなミントの香りでスッキリ爽快。

※全ての菌に効果があるわけではありません。

使用方法

- 約150~200mLの水またはお湯(40~50℃)に錠剤を1錠入れます。

※60℃以上のお湯で使用しないでください。  
入れ歯が変色、変形することがあります。  
※水温が低いと発泡力が弱くなりますので、40~50℃のお湯を使うことをおすすめします。

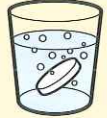

- すぐに入れ歯を浸してください。

※通常の汚れの洗浄は、5分程度で終了します。  
※特に汚れがひどい場合は一晩浸しておく効果的です。



- 洗浄後は水でよくすすいでください。

※ごくまれに汚れが落ちない場合がありますが、無理な洗浄やブラッシングはせずに、歯科医にご相談されることをおすすめします。



部分入れ歯 兼用 総入れ歯  
ノンクラスプ入れ歯

部分入れ歯



総入れ歯



ノンクラスプ入れ歯



成分 発泡剤(炭酸塩、クエン酸)、漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩(銀イオン含有)、塩化セチルピリジニウム(CPC)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、漂白活性化剤(TAED)、ポリリン酸塩、酵素、防錆剤、結合剤、流動改善剤、色素、香料

液性 中性

本紙に掲載されている価格は2023年7月のものです。形態・仕様は予告なく変更することがあります。



■48錠 歯科医院様参考税抜価格 ¥680 患者様参考税抜価格 ¥850  
■120錠 歯科医院様参考税抜価格 ¥1,150 患者様参考税抜価格 ¥1,440