

MicroMega Remover

リムーバー

ガッタパーチャー除去

地域限定

新規採用キャンペーン

期間 9月21日～11月20日

#30/7% (19mm/23mm)



より解剖学的な再根管治療が可能に



ポイント① 従来品GP除去ファイルより柔軟性と切削除去効率を向上させた熱処理NiTiワイヤーを使用

ポイント② マイクロメガ ワンレシと同様、直径1mm MI-NiTiワイヤーを使用

非対称

断面形状
トリプルヘリックス

対称


マイクロメガ リムーバー プロトコル

MicroMega
One Flare

MicroMega
Remover

MicroMega
One Flare

MicroMega
Remover

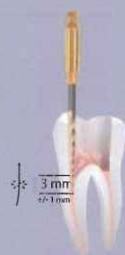

400 rpm
Max torque 3 N.cm



作業長
3mmアンダー

400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm



400 rpm
Max torque 3 N.cm



400-800 rpm
Max torque 2.5 N.cm

充填材が根尖までである場合

充填材がアンダーの場合

ガッタパーチャー除去後は、マイクロメガ ワンレシで残り3mmのガッタパーチャーを除去し、再度拡大形成を行ってください。

優れたクロス・セクション工程により

切削力と柔軟性を兼ね備えたガッタパーチャー除去ファイルを実現

正回転：400-800 rpm
トルク：2.5 N.cm
単回使用

STERILE EO 滅菌済み

C-Wire 熱処理NiTiワイヤー使用

ORDER INFORMATION

製品名

マイクロメガ リムーバー 19mm/23mm #30/7% 各5本

価格: ~~各7,000円~~ ▶ **特別価格**

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。一般的名称:電動式歯科用ファイル 医療機器分類:管理医療機器 認証番号:304AGBZ100001000

ジーシーグループ [販売元]

ご用命は



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[輸入元]
コルテンジャパン合同会社
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目25-1
TEL: 042-595-6945
FAX: 042-595-6946
www.coltene.com

選任製造販売業者
AJMD 株式会社
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-4-5
真光ビルディング
TEL: 03-5614-0733
FAX: 03-5614-0734

Follow Us



COLTENE