

遠赤外線寒天コンディショナー
2ステージフルオートタイプ

JDS遠赤ウォーマー

カートリッジタイプ

地域限定

特別キャンペーン

2023年9月21日▷10月20日



Pカートリッジ
シリンジ付



期間中、特別価格にてご提供いたします。

Pカートリッジシリンジ
一般的名称：歯科用注入器具
医療機器分類 一般医療機器
届出番号：11B2X00019CL1003

JDS遠赤ウォーマー



遠赤外線電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また物性劣化を最小に抑えます。



マイコン制御により、高精度に温度をコントロールします。保存温度55℃～70℃、溶解時間1分～30分の間で変更可能



ボタンをOFFにしている時も予約タイマー時間・溶解保持時間・保存温度等をメモリーしています。※元電源を落とした場合は、保存温度のみ保持されます。



最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。

Pカートリッジシリンジ



耐久性に優れ、オートクレーブにラクラク対応します。

JDS遠赤ウォーマー仕様 (8本フルオート×2ステージ)

寸法	W120×D150×H95mm	重量	約1.5kg
電圧	AC100V	周波数	50/60Hz

JDS遠赤ウォーマー

カートリッジタイプ



(8本フルオート×2ステージ)



JDS遠赤ウォーマー本体



Pカートリッジシリンジ付



価格：**82,000円**





(Pカートリッジシリンジ無しは76,000円)

- ▶ 各ステージ(寒天槽)専用のデジタル表示があり、使用状況が一目瞭然。
- ▶ 操作パネルも各ステージ専用であり、隣の槽を誤操作してしまふことがありません。
- ▶ 遠赤外線の電磁波がムラのない理想的な加熱を寒天に与えます。また、物性劣化を最小に抑えます。
- ▶ マイコン制御により、精度の高い温度コントロールを実現しています。
保存温度55℃~70℃、溶解時間1分~30分の間で変更可能。
- ▶ 最大60時間の予約タイマー機能により、待つことなくご使用できます。

一般的名称：一般医療機器
医療機器分類 歯科材料加温器
届出番号：11B2X00019JDS001

かんたん操作

※詳しくは使用説明書をご覧ください。

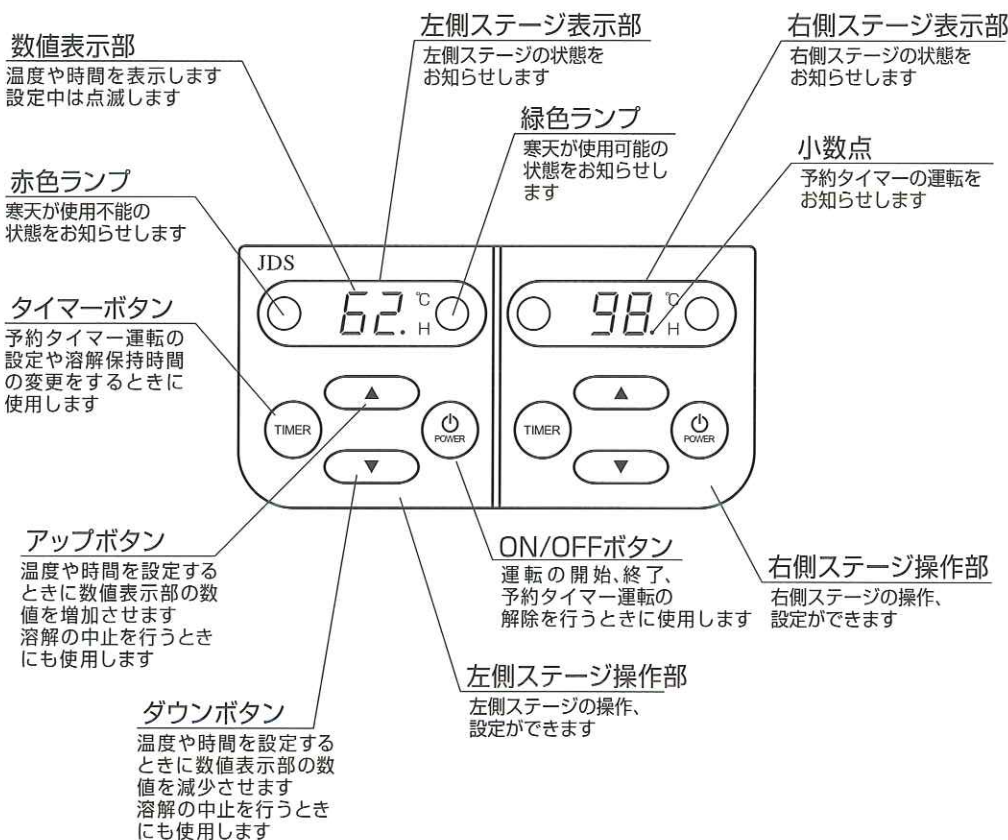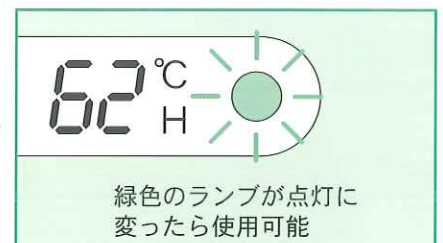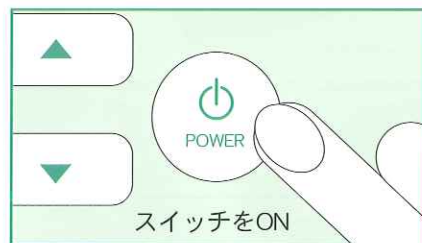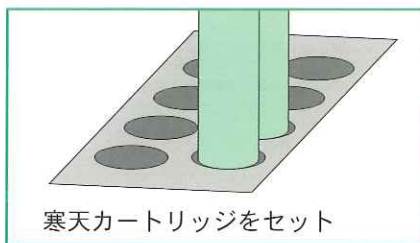

メンテナンス

販売店やメーカーに依頼しなくても寒天槽を清掃できます。

- ①電源プラグをコンセントから抜き、本器を十分に冷ましてください。
- ②プラスドライバーでガイドカバーの止めネジを取外してください。
- ③ガイドカバーを取外し、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用し、硬く絞った雑巾で拭いてください。
- ④寒天カートリッジ挿入口内の清掃は、割り箸等挿入口内壁を傷つけない材質の棒状のもので、乾燥した寒天または異物をこすり落として下さい。
- ⑤元通りに組立ててください。

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれません)。

販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288
製造販売元 株式会社クラーク

ご用命は

