

新規入会のご案内

2018年度GC友の会新製品は、今までにない特徴を持った製品をお届けします。ぜひご入会のうえお試しください。



《実施期間》2018年6月30日まで

製品一般包装

超速硬石こう(模型用)
シェイク!ミックスストーン
1.5kgシンプルパック×2袋



一般医療機器
13B1X00155000290

専用シェイカー
・1個

- ・シェイク!ミックスストーン 1.5kgシンプルパック×2袋=¥2,980
- ・シェイク!ミックスストーン 専用シェイカー 1個=¥800

希望医院価格 /合計 **¥3,780**

20秒間
シェイク!



友の会包装 ※歯科技工士会員

友の会新製品! 通常特典

超速硬石こう(模型用)
シェイク!ミックスストーン
1.5kgシンプルパック×1袋



一般医療機器
13B1X00155000290

専用シェイカー
・1個

新規入会特典!

1 コンテナボックス
1個

※模型は含みません。色は写真と異なる場合がございます。



GC友の会にてお届け!※1

2 「歯冠形態回復ガイド」
(前歯編)



3 「歯冠形態回復ガイド」
(臼歯編)



歯の幅を細く見せる方法や咬合面の形態の法則などを解説!

監修 医療法人社団嵐城会 五十嵐歯科医院
歯科技工士 内藤孝雄 先生

「GC友の会 歯科技工士会員」会費 **¥3,000** (※2)

※1 2018年度GC友の会 歯科技工士会員の方にお届けしています!
<会員の方はお試ください。未入会の方は、お申し込みを! >

2018年度 GC友の会 歯科技工士会員 入会申込書 (FAX用)

※2 歯科技工士会員 (会費) 3,000円(+消費税) / 会期: 2017年10月1日~2018年9月30日

ご入会者名	生年月日	年	月	日
貴医院名				
ご住所 〒				
TEL ()	FAX ()			
お取扱販売店		(本支店名)		

お申し込みは、お取り引きの歯科販売店を通じてお申し込みください。

※歯科販売店の方へ
本申込書をジーシーにお渡しください。
(友の会専用FAXでも受付します。FAX:03-3815-3421)

裏面、GC友の会入会のご案内に記載されています「個人情報のお取り扱いについて」を確認し、ご承諾いただいた上でご記入ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

- 支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
営業所 ●北海道(011)729-2130
●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

《シェイク!ミックス ストーンの特長》




シェイクして → 流して → 5分待つだけ!

だれでもどこでも
ハイオリティ!

アンチフォームテクノロジーで
気泡混入のリスク低減!!

院内ワークフローの効率化!!!

物性比較表	硬石ころ	超硬破石ころ
	ニューブラストーンII	シェイク!ミックスストーン
初期硬化時間(分)	11分	2分20秒
操作余裕時間(分)	8	2
取り外し時間(分)	40	5
硬化膨張率(%) (120分後)	0.25	0.13
圧縮強さ (MPa)(60分後)	49	40

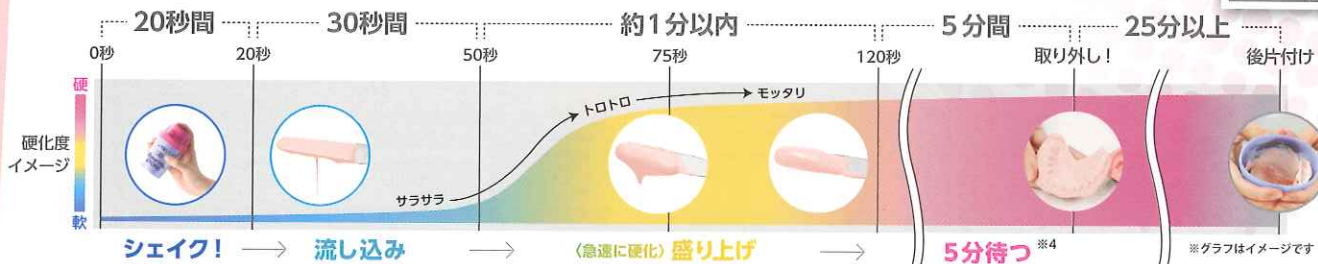

動画はこちら

計量のポイント キャップとボトルでムダなく計量!※1

- ・粉の計量はよくほぐされたフワフワの状態!
- ・水の計量はキャップの目盛りでらくらく!

専用シェーカー計量の目安

	片額	(標準希釈水比: 99% : 0.25%)
粉 (ボトル)	60g	
水 (キャップ)	12.5mL	

※1 ボトルの目盛りは目安としてご使用ください。粉の計量は秤の使用がより正確です。水の段の上部に合わせてください。

シェイクのポイント

最後までしっかりギョツとキャップを締める

20秒間シェイク!

逆さにしてトントンと底を叩き、粉と水をなじませる

※2 キャップの締めがゆるいと石こう練和泥が飛び散る可能性があります。

流し込み

キャップを開けて流し込み開始!※3

サラサラで流しやす!

※3 シリコーン印象材へ注入する場合は、界面活性剤を噴霧しゆっくりと流し込んでください。

盛り上げ

シェイク開始から約50秒後

一気にトロツツと盛り上げやすい

急速に粘度が増します

印象から外して完成

※4 アルジネート印象材、注入後5分シリコーン印象材、注入後7分

後片付け

「クシャッ・パリッ・ポイッ!」

→ 石ころが硬化したら、ボトルをクシャッと揉んでください。パリッとキレイに割れます。(※30分以上硬化させてください。)

《GC友の会 歯科技工士会員のご案内》

特典 知識や技術をさらに磨ける!

GC友の会オリジナル冊子をお届けします。
臨床のスキルアップ、医院との連携など日々の臨床に役立つコンテンツが満載です。

『歯冠形態回復ガイド』(前歯編・臼歯編) (2016・2017年)
監修 医療法人社団嵐城会 五十嵐歯科医院 歯科技工士 内藤孝雄 先生



図や写真を多く
使いやすい
テキスト

前歯部における代表的な3つの歯冠形態について解説

歯冠幅縁を細く見せる形態修正の方法

《GC友の会会員専用専用ページ(Web)には多数のコンテンツを掲載!》



(2017年)
『速くキレイにできる形態付与のレベルアップポイント』
監修 青島デンタルオフィス 青島 徹児 先生



特典 優待価格で講演・セミナーに参加!



友の会会員限定の優待価格で講演会やセミナーに参加いただけます。

特典 会員情報誌をお届け!



臨床情報盛りだくさんの会員情報誌「GCサークル」をお届けします。

その他 会員特典はジーシーホームページをご覧ください。



GC友の会 歯科技工士会員 対象は歯科技工士となります。

【2018年度会期】2017年10月1日～2018年9月30日
【2018年度会費】3,000円(消費税別)

【更新について】GC友の会会期更新は、会期自動更新システムを採用しております。なお、会期更新時期には、自動更新のご意志確認のためのご案内状をお送りします。

【個人情報の取り扱いについて】●ご記入いただいた個人情報は、GC友の会の運営に活用させていただきます。また、ジーシー取扱商品やセミナー、講演会開催のご案内などに活用させていただく場合もあります。なお、ご記入内容に不足があると、お申し込みに支障が生ずる場合があります。●個人情報は、業務委託先に預託する場合がありますが、個人情報の安全管理体制が整備された業務委託先を選定し、かつ業務委託先を適切に監督いたします。また、法令等による場合を除いて、第三者に提供することはありません。●個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせは下記の窓口へご連絡下さい。お客様窓口 0120-416480 ●個人情報管理責任者(代理人) 株式会社ジーシー デンタルインフォメーションセンター 所長