



健康ビジネス連峰

平成19年度  
新潟県健康関連ビジネスモデル推進事業採択

口腔機能 測定機器

みんなの  
笑顔のために



「健口<sup>ハンディ</sup>くん」なら  
オーラルディアドコネシスの  
測定が簡単にできます。

軽量・コンパクトで使い易い！  
本体内蔵のマイクを対象者に向け  
開始スイッチを押すだけで  
オーラルディアドコネシスの  
測定が可能。

高齢者の口腔機能向上トレーニングの測定に「健口<sup>ハンディ</sup>くん」をお使いください。  
従来の測定方法に比べグーンとラクになりました。



# 「健口<sup>ハンディ</sup>」は口腔機能の測定が簡単にできます。

## オーラルディアドコネシスとは

「パ」「タ」「カ」をそれぞれ5秒間発音し、口の周りや舌の動きを測定します。

「パ」の音は、唇をしっかりと閉じることで発音される。

「タ」の音は、舌の前方が口蓋に触れて発音される。

「カ」の音は、舌の後方が口蓋の奥の方に触れて発音される。



唇をしっかりと閉じることは、咀嚼くし、食べるために重要です。



上手に飲み込むためには、舌の前方の動きが重要です。



舌の奥の部分の機能が、飲み込む際には重要です。

「健口<sup>ハンディ</sup>」で簡単に測定・評価できます

測定時間内の発音回数を測定し、1秒あたりの回数を表示します。




### 測定手順

- ①マイクを対象者の口元に近づけて数回発音練習を行わせます。
- ②測定は、「パ」「タ」「カ」それぞれを5秒間すばやく発音してもらいます。
- ③開始スイッチを押して離すと「ピッ」という音が出て測定を開始します。
- ④5秒経過すると「ピー」という音で測定が終了し、5秒間の積算回数と1秒あたりの回数が交互に表示されます。
- ⑤測定値を記録紙等に記入し、次の発音を測定します。「パ」「タ」「カ」それぞれ1回ずつ測定し、終了します。

## 仕様

測定	オーラルディアドコネシス (発音回数の自動カウント) (1秒あたりの回数)
測定時間	5秒
表示	液晶表示2桁
カウントモニタ	有り
オートパワーオフ	約3分
電源	単三電池2個
連続使用時間	約100時間(アルカリ乾電池使用の場合)
寸法	約63(W)×140(D)×31(H)mm
質量	約150g

## 付属品

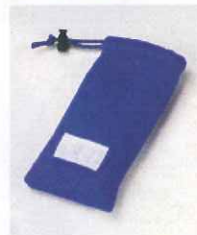

●収納袋

健口<sup>ハンディ</sup>  
Produced by TAKEI  
T.K.K. 3351

定価 34,000円  
+消費税



人間の可能性を科学する  
**竹井機器工業株式会社**

仙台支店	〒984-0051	仙台市若林区新寺1-7-21 (新寺KSビル7F)
新潟支店	〒956-0113	新潟市秋葉区矢代田619
東京支店	〒142-0064	東京都品川区旗の台1-6-18
名古屋支店	〒460-0008	名古屋市中区栄5-26-39 (GS栄ビル4F)
大阪支店	〒532-0011	大阪市淀川区西中島6-7-8 (大昭ビル7F)
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東1-1-33 (はかた近代ビル7F)
本社	〒956-0113	新潟市秋葉区矢代田619

TEL.022-291-2765  
TEL.0250-38-4132  
TEL.03-3786-4111  
TEL.052-264-9201  
TEL.06-6304-6015  
TEL.092-411-1430  
TEL.0250-38-4131