

Neo

ミラーのくもりどめ

ミラーを浸けるだけで スッキリ! クッキリ!

CPC〈セチルピリジニウム塩化物〉配合でより衛生的に!

(容量)

500mL



特長 1 浸けるだけですっきりくっきり見える!
「Neoミラーのくもりどめ」です。

特長 2 CPC〈セチルピリジニウム塩化物〉配合により
使用中の液をより衛生的に保ちます。

特長 3 便利な小分け容器付です。

商品について
詳しくは
YouTubeにて
ご覧になれます。



Neo ミラーのくもりどめ **謝恩セール**

通常価格: ¥2,200

⇒ 特別価格

セール期間: 2023/10/23(月)~12/20(水)

◎セール期間中は特別価格にてご提供いたします。

Neo ミラーのくもりどめ

用途

デンタルミラーのくもりどめ

口腔内で使用していただける成分配合

食品添加物ベースで作られています。

ご使用方法

- 滅菌後のミラーを「Neoミラーのくもりどめ」に浸けて、軽く振ってご使用ください。
- 小分け容器のご利用で、衛生的に最後までお使いいただけます。


ご注意

- 飲み込んだり、使用目的以外にはご使用にならないでください。
- 小分け容器に移した液は元に戻さず、ご使用後は廃棄してください。


1 小分け容器に本液を入れる。



2 小分け容器に滅菌消毒済みのミラーを浸ける。

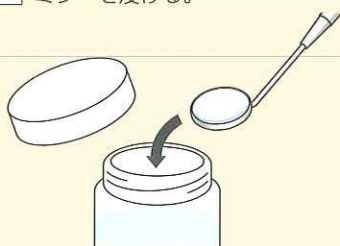

3 軽く振る。

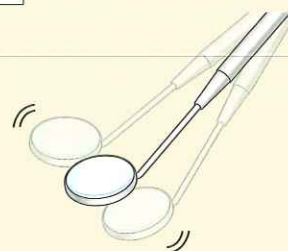

◎菌試験結果 (CPCなし、CPCありの製剤における菌の繁殖比較)

+ 菌の増殖あり - 菌の増殖なし

	1分	10分	1時間	6時間	12時間	24時間
CPCなし	+	+	+	+	+	+
CPCあり	-	-	-	-	-	-

注) 時間は液剤と菌との接触時間 ※アグサジャパン株式会社試験室調べ

CPCなし



CPCあり



【内容量】

1本 500mL
小分け容器1個付

ご注意：浸漬後、エアースリンジでの乾燥や自然乾燥後の鏡面ににじみが出る場合がございます。その際は、浸漬後すぐにご使用ください。また、にじみはミラーの洗浄で落ちます。

販売元

SD サンデンタル株式会社

〈本 社〉 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号
Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
〈東京営業所〉 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号
Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
〈福岡営業所〉 〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号
Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

サンデンタルホームページ <http://www.sundental.jp>

製造元

アグサジャパン株式会社

■お問い合わせ・ご用命は