

# トクヤマリベースクリーナー

**+ 患者様向け  
リーフレット**

# キャンペーン

2023年 11.21 火 → 2024年 2.20 火

数量限定!



マスクをはずす機会が増えてます。  
義歯、マウスピース等の汚れは口臭の原因に。

## 消臭・除菌にトクヤマ リベースクリーナー

5分で洗浄完了。一晩漬けでも大丈夫。  
除菌率99.99%



患者様向けリーフレット  
(1錠付)10枚

トクヤマリベースクリーナー

標準医院価格 ¥500

標準医院価格 ¥3,300/6箱

組み合わせでご提供いたします!

\*一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。\*価格は2023年11月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。\*数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

### トクヤマ リベースクリーナー | キャンペーン注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

トクヤマ リベースクリーナー(32錠)6箱 [20702]  
+ リーフレット(1錠)10枚

個

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求  
インフォメーションサービス  
0120-54-1182

受付時間  
9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝日は除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル



本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

●札幌 TEL 011-812-5690 ●仙台 TEL 022-717-6444 ●東京 TEL 03-3835-7201 ●名古屋 TEL 052-932-6851 ●大阪 TEL 06-6386-0700 ●福岡 TEL 092-412-3240



# トクヤマリベースクリーナーのご紹介


入れ歯に付着した菌は  
**12時間で約4,000倍に**  
増殖します！

付着



増殖

12時間後…

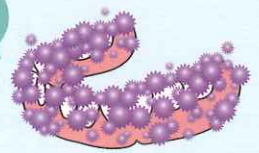

イラストはイメージです

※【情報提供】 二川 浩樹 先生(広島大学大学院 教授)

だから

## 毎日の洗浄が重要！

### 使用方法

150mL程度の水に  
1錠入れてください。

1



ぬるま湯(40℃程度)  
がより効果的。

すぐに入れ歯全体を  
浸してください。

2



洗浄時間は5分程度。  
(一晩漬け置きも可能。)

洗浄後は水でよく  
すすいでください。

3



ひどい汚れは  
スポンジなどで軽く  
こするとより効果的。  
残った洗浄液は捨てる。

### 汚れを素早く除去

汚れがひどい場合には、浸漬後にスポンジ等で軽くこすると効果的です。

#### 着色



洗浄前  
患者が着色の除去を希望



洗浄後  
5分浸漬、こすり洗い後

#### プラーク



洗浄前  
染色液によるプラーク染め出し



浸漬状態  
色素の浮きを確認



洗浄後  
5分浸漬、こすり洗い後

【写真提供】 神奈川県横浜市 田中歯科医院 田中五郎 先生

## トクヤマリベースクリーナーの特徴



※全ての菌を除菌できるわけではありません。

トクヤマリベースシリーズ、ソフリライナーシリーズで裏装された入れ歯の洗浄にもお使いいただけます。



歯科用 入れ歯洗浄剤

## トクヤマリベースクリーナー

- 用途：入れ歯、矯正用リテーナー、マウスガードの洗浄
- 内容量：6箱包装(ディスプレイ箱)  
1箱32錠入り(2.8g×32)
- 標準医院価格：¥3,300(税抜) ※1箱単価 ¥550(税抜)
- 希望患者価格：¥700(税抜) / 1箱

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求  
インフォメーションサービス

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00 / 13:00~17:00(土日祝日は除く)