

キャンペーン期間 2023年11月21日(火)～  
2024年 1月19日(金)まで



高純度安定型次亜塩素酸水

# トクヤマデントジア キャンペーン

## 希釈用原液 2L

- 1 幅広い菌やウイルスに有効
- 2 素早く簡単除菌
- 3 様々な用途に対応



セットにして  
ご提供

掃拭用の除菌液が  
ボトルの目盛線で  
簡単に調製できます。

トクヤマ デントジア  
希釈用原液 2L 標準医院価格  
¥4,100

希釈用  
スプレーボトル 標準医院価格  
¥600

\*一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。\*価格は2023年11月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。\*数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

### トクヤマ デントジア 2L キャンペーンパック 注文書

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL

( )

トクヤマデントジア

[41303]

希釈用原液 2L キャンペーンパック

セット

お届け歯科商店名

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否をされた場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社トクヤマデンタル

お問い合わせ・資料請求  
インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日を除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

●札幌TEL011-812-5690 ●仙台TEL022-717-6444 ●東京TEL03-3835-7201 ●名古屋TEL052-932-6851 ●大阪TEL06-6386-0700 ●福岡TEL092-412-3240

## 1 幅広い菌やウイルスに有効

「トクヤマ デントジア 希釈用原液」は高純度安定型の弱酸性次亜塩素酸水です。院内環境の衛生対策として、幅広い菌やウイルスの除菌に有効です。


## 2 素早く簡単除菌

【菌・ウイルスに対する作用時間と除菌率】

|        | 細菌・真菌   | ウイルス    |
|--------|---------|---------|
| 100ppm | 10秒     | 10秒     |
| 10倍希釈  | >99.99% | >99.99% |

試験機関：一般財団法人 北里環境科学センター  
 試験品：「トクヤマ デントジア」  
 試験方法：試験品に直接菌液・ウイルスを接種する方法

最短10秒で簡単除菌！

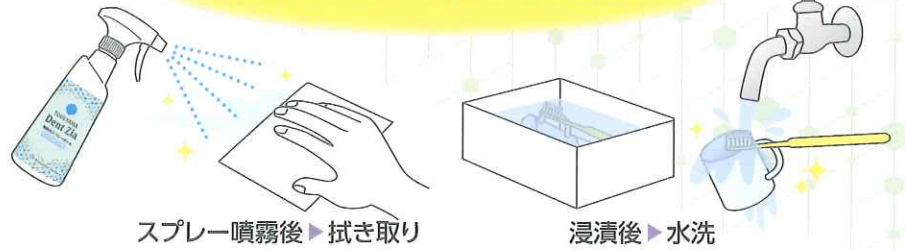

スプレー噴霧後 ▶ 拭き取り

浸漬後 ▶ 水洗

## 3 様々な用途に対応

推奨希釈倍率： 原液 5倍 10倍



ユニットまわりの除菌に



キャビネットの除菌に



待合室のソファや  
テーブルの除菌に



保護メガネの除菌に



歯ブラシやTBI時の  
ツールの除菌に



マウスガードや  
ホワイトニングトレイの除菌に



スパチュラや  
ツール類の除菌に



トイレの除菌・消臭に



往診時の  
ツール類の除菌に



スリッパの除菌・消臭に



タオルや布類の  
除菌・消臭に



床や壁の除菌に



吐瀉物処理時の除菌に



次亜塩素酸水対応  
噴霧器で室内の除菌に

### ▶ 希釈方法

#### 《5倍希釈》

希釈専用ボトル「トクヤマデントジア希釈用ボトル」は側面に線（エンボス）※が入っています。下線まで原液を入れ、上線まで水道水で希釈します。

※説明のため赤色で示しています。

（注）希釈した液は、1ヶ月を目安に使い切ってください。

希釈ボトルは、高温および直射を避け、冷暗所に保管してください。また、1ヶ月以上経過した希釈液は廃棄して新たな希釈液をお作りください。



### ▶ 除菌効果について

次亜塩素酸水は、その製法にかかわらず、新型コロナウイルスに対する有効性について発表がありました。[NITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）令和2年6月26日報告資料] 弊社では、大腸菌、MRSA、ノロウイルス、肝炎ウイルス、インフルエンザウイルス、カンジダ菌、結核菌などを用いて第三者機関（北里環境科学センター）において試験を行っています。

### ▶ 手指消毒について

デントジアは手指消毒を使用目的としておりませんので、効果の検証は行っていません。

【使用上の注意】 ●他の製品との併用は避け、本品は単独でお使いください。●使用期限は未開封時冷暗所に保存の場合、製造より1年ですが、開封後は3ヶ月を目途に使い切ってください。●掃拭用途でスプレーボトルに希釈した除菌液は1ヶ月を目途に使い切ってください。●スプレー噴霧後は拭き取りを、浸漬後は水洗をしてください。●金属への腐食や樹脂・ゴム・布等の変色を起す可能性があります。●塩素に対しアレルギーのある方は使用をお控えください。